



NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO - VYSOKÉ

Zb.č. 11992010





Informace před použitím přípravku / fungování zdravotních výrobků

Vážení kupující,

blahopřejeme vám k zakoupení zdravotnického výrobku Koval. Vezměte prosím na vědomí následující body:

1. Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití.
2. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.
3. Výrobek smí ovládat pouze personál, který je obeznámen s jeho fungováním.
4. Údržbu, jakož i bezpečnostní a technickou kontrolu smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společnostmi Koval.
5. Montáž, rozšíření, revizi nebo opravy smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společnostmi Koval.

V případě jakýchkoli technických zásahů do výrobku ve smyslu doplnění nebo revizí, které nevykonává společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společnostmi Koval, se ruší jakákoliv záruka ve vztahu k těmto revizím, jakož i ve vztahu k výrobku a jeho funkcím.

Preventivní opatření

Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.

Je třeba vzít v úvahu poznámky uvedené pod nadpisem „VAROVÁNÍ“.

Účel použití

Toto chodítko se používá jako podpora pacientů při chůzi.

Předpisy a normy

Při používání chodítka se musí dodržovat veškeré platné předpisy a normy, které se na takovéto použití vztahují.

Značka CE

Značka CE odkazuje na směrnici 93/42 / EHS pro zdravotní výrobky.

Odpovědnost a záruka

Výrobce produktu odpovídá za bezpečnost a spolehlivost výrobku, pouze pokud:

- A. se výrobek používá výhradně ke stanovenému účelu použití.
- B. se provádí pravidelné kontroly funkčnosti.



Poškození při přepravě

Při dodání zkontrolujte, zda není výrobek nebo obal jakýmkoli způsobem poškozen. V této souvislosti pamatujte na lhůty pro ohlášení škod: je stanovena 2denní lhůta pro viditelné škody a 7denní lhůta pro skrytá poškození.

Výrobní číslo

Typové označení chodítka Koval se nachází na spodním rámu. V případě dotazů uveďte sériové číslo chodítka.

Používejte pouze ve vnitřních prostorách.


Zobrazení produktu

Obrázek 1:
Zobrazení tlačítka pro nastavení výšky






Obrázek 2:
 Zobrazení chodítka s rukojetmi

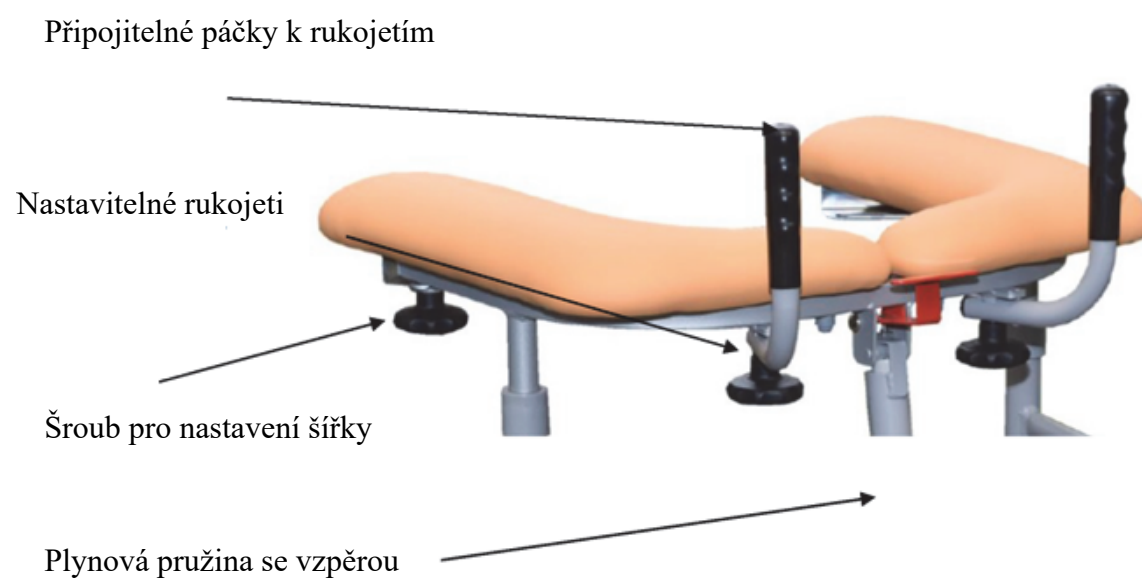

Obrázek 3:

Upevnění plynové pružiny ze spodní strany

Kolečka 100 mm s brzdami

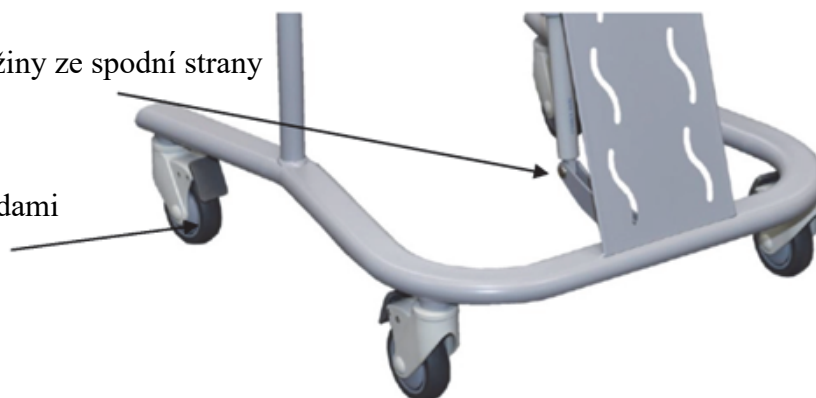



Technické informace

Šířka:	max. 72 cm
Délka:	max. 75 cm
Nastavení výšky:	104 - 134 cm
Hmotnost bez obalu:	cca 20,5 kg
Nosnost:	170 kg

Ovládání výrobku

Chodítko je připraven k použití ihned po vyjmutí obalu a nastavení rukojetí.

Nastavení výšky pomocí zabudované plynové pružiny

Horní část chodítka lze nastavit pomocí mačkácké páčky (obrázek 1).

Zvednutí horní části: zatlačte rukojeť dolů; tlakem plynové pružiny dojde k posunu směrem nahoru.

Spuštění horní části: zatlačte rukojeť dolů; malým tlakem spustíte horní část chodítka dolů.

Vezměte prosím na vědomí, že může dojít k natažení plynové pružiny, pokud se delší dobu nepoužívá. Může dojít k jejímu zablokování.

VAROVÁNÍ

Poté, co byla plynová pružina delší dobu nepoužívána, lze ji mírným tlakem na plynovou pružinu odblokovat. Tlumič nárazů přitom musí být stlačen dolů.



Řešení problémů

Nedá se nastavit výška vozíku:

MOŽNÉ PŘÍČINY:

Plynová pružina je zablokována.

Chodítko se nehýbe.

ŘEŠENÍ:

Povolte spodní upevnění plynové pružiny a otočte ji ve směru hodinových ručiček. Plynovou pružinu znovu připojte.

Zadní kola jsou zablokována brzdami. Uvolněte brzdy.

Opravy, servis a náhradní díly

V případě jakýchkoli technických problémů se