

KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

(03) 747 19 00
(03) 747 19 18
koval@koval.si



www.koval.si



NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO

Zb. č. 11992000





Informace před použitím přípravku / fungování zdravotních výrobků

Vážení kupující,

blahopřejeme vám k zakoupení zdravotnického výrobku Koval. Vezměte prosím na vědomí následující body:

1. Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití.
2. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.
3. Výrobek smí ovládat pouze personál, který je obeznámen s jeho fungováním.
4. Údržbu, jakož i bezpečnostní a technickou kontrolu smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval.
5. Montáž, rozšíření, revizi nebo opravy smí provádět pouze společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval.

V případě jakýchkoli technických zásahů do výrobku ve smyslu doplnění nebo revizí, které nevykonává společnost Koval nebo jiná profesionální společnost oprávněná společností Koval, se ruší jakákoliv záruka ve vztahu k těmto revizím, jakož i ve vztahu k výrobku a jeho funkcím.

Preventivní opatření

Přečtěte si pozorně přiložený návod k použití. Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu použití.

Je třeba vzít v úvahu poznámky uvedené pod nadpisem „VAROVÁNÍ“.

Účel použití

Toto chodítka se používá jako podpora pacientů při chůzi.

Předpisy a normy

Při používání chodítka se musí dodržovat veškeré platné předpisy a normy, které se na takovéto použití vztahují.

Značka CE

Značka CE odkazuje na směrnici 93/42 / EHS pro zdravotní výrobky.

Odpovědnost a záruka

Výrobce produktu odpovídá za bezpečnost a spolehlivost výrobku, pouze pokud:

- A. se výrobek používá výhradně ke stanovenému účelu použití.
- B. se provádí pravidelné kontroly funkčnosti.

KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

(03) 747 19 00
(03) 747 19 18
koval@koval.si



www.koval.si



Poškození při přepravě

Při dodání zkontrolujte, zda není výrobek nebo obal jakýmkoli způsobem poškozen. V této souvislosti pamatujte na lhůty pro ohlášení škod: je stanovena 2denní lhůta pro viditelné škody a 7denní lhůta pro skrytá poškození.

Výrobní číslo

Typové označení chodítka Koval se nachází na spodním rámu. V případě dotazů uveďte sériové číslo chodítka.

Používejte pouze ve vnitřních prostorách.

Zobrazení produktu


Obrázek 1:

Zobrazení tlačítka pro nastavení výšky






Obrázek 2:
Zobrazení chodítka s rukojetími

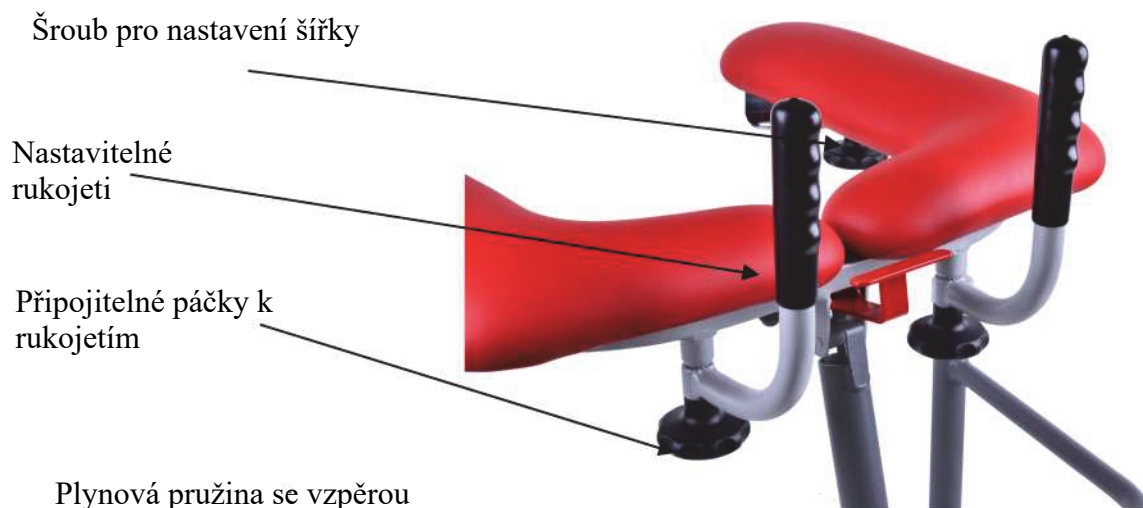

Obrázek 3:

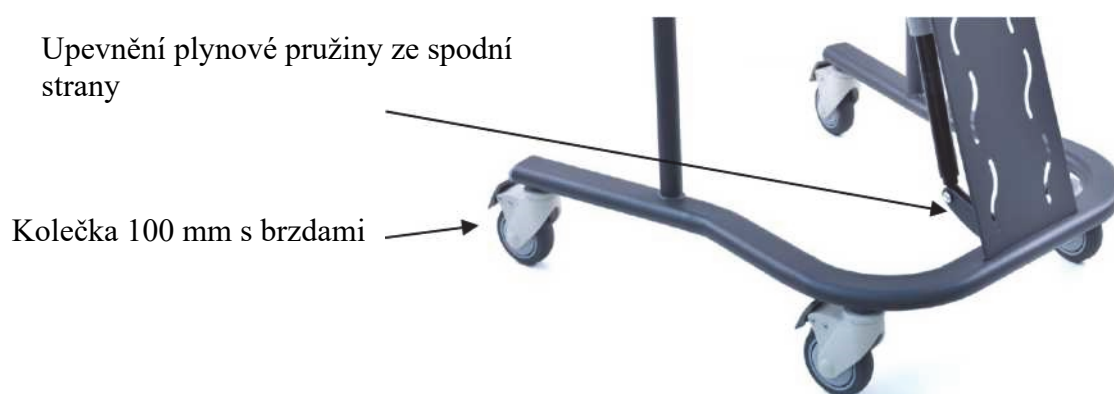



Technické informace

Šířka:	max. 72 cm
Délka:	max. 75 cm
Nastavení výšky:	92-122 cm
Hmotnost bez obalu:	cca 18,5 kg
Nosnost:	170 kg

Ovládání výrobku

Chodítko je připraven k použití ihned po vyjmutí obalu a nastavení rukojetí.

Nastavení výšky pomocí zabudované plynové pružiny

Horní část chodítka lze nastavit pomocí mačkácí páčky (obrázek 1).

Zvednutí horní části: zatlačte rukojeť dolů; tlakem plynové pružiny dojde k posunu směrem nahoru.

Spuštění horní části: zatlačte rukojeť dolů; malým tlakem spustíte horní část chodítka dolů.

Vezměte prosím na vědomí, že může dojít k natažení plynové pružiny, pokud se delší dobu nepoužívá. Může dojít k jejímu zablokování.

VAROVÁNÍ

Poté, co byla plynová pružina delší dobu nepoužívána, lze ji mírným tlakem na plynovou pružinu odblokovat. Tlumič nárazů přitom musí být stlačen dolů.

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si



www.koval.si

Řešení problémů

Nedá se nastavit výška vozíku:

MOŽNÉ PŘÍČINY:

Plynová pružina je zablokována.

Chodítko se nehýbe.

ŘEŠENÍ:

Povolte spodní upevnění plynové pružiny a otočte ji ve směru hodinových ručiček.
Plynovou pružinu znovu připojte.

Zadní kola jsou zablokována brzdami. Uvolněte brzdy.

Opravy, servis a náhradní díly

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na:

 KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu

 (03) 747 19 00
 (03) 747 19 18
 koval@koval.si