

1. Základní instrukce – KP060 Nástavec na WC

1.1 Úvod

Tyto provozní instrukce obsahují informace jak používat zvýšené toaletní prkénko bezpečně a správně.

Přečtěte si důkladně instrukce k použití toaletního prkénka a postupujte dle instrukcí.

Uchovejte si dokumenty na bezpečném místě.

1.2 Správné použití

Zvýšené toaletní prkénko se používá k zvýšení posedu a je přizpůsobeno, aby pasovalo na toaletní mísu.

Jiný způsob používání není povolen.

Zvýšené prkénko je určeno pro dospělé. Nepoužívejte ho jako toaletní sedátko pro děti.

Kontraindikace

Žádné kontraindikace nejsou známy, pokud je produkt správně použit.

1.3 Likvidace

Produkt je vyroben z recyklovatelných materiálů.

Staré výrobky a balení musí být zlikvidovány a zrecyklovány v souladu s místními předpisy.

1.4 CE značka

Tento produkt je v souladu se směrnici 93/42/EEC.

1.5 Opakované použití

Produkt je možno opakovaně použít. Množství použití závisí na stavu produktu.

Před opětovným použitím postupujte dle hygienických pokynů a také kontrolujte technický stav a bezpečnost produktu.

1.6 Životnost

Produkt je navržen, aby vydržel alespoň 3 roky, pokud je používán dle pokynů a pokud je kladen důraz na čištění a údržbu.

Tato životnost se dá prodloužit, pokud je produkt správně opečováván a používán.

2. Bezpečnostní pokyny

Nepřetěžujte toaletní prkénko (maximální zátěž: 200 kg).

V případě visací záchodové mísy, nedosáhněte povolené zátěže toaletní mísy.

Ujistěte se, že je prkénko suché před usednutím na záchod.

Osoby s omezeným pohybem by měly usedat na prkénko zepředu, ne z boku.

Nezatěžujte prkénko pouze na jedné straně.

Nepoužívejte prkénko, když je poškozené.

Ujistěte se, že je prkénko připevněno tak, aby neskouzlo.

Nesedte na prkénku po dlouhou dobu.

Nepoužívejte prkénko jako asistenci při nasedání a nestůjte na něm.

Při používání prkénka, držte stálou polohu těla a vyhněte se prudkým pohybům těla. Jinak hrozí riziko úrazu.

V následujících případech, používejte prkénko jen ve společnosti s asistentem: pokud máte poruchu balancu nebo smyslů; pokud nemůžete sedět nezávisle; pokud nedokážete držet vrchní část těla nezávisle.

Sluneční svit může prkénko nahřát. Riziko popálení!

Neupravujte produkt.

Pravidelně kontrolujte produkt kvůli poškození. Kontrolujte upínací šrouby, jestli jsou dotažené.

3. Popis

Zvýšené prkénko je dostupné v následujících variantách:

- s krytem
- bez krytu

3.1 Technická data

Podívejte se na „Technická data“ na konci instrukcí k použití.

3.2 Štítek

Štítek je přilepený na spodní boční části prkénka a obsahuje následující informace:

Prodejní a servisní adresa, označení shody, výrobce, číslo položky, typ produktu, maximální zátěž, poznámka, datum výroby, číslo šarže a čárový kód.

3.3 Připojení bočních svorek

Upozornění! Riziko chycení. Připojte boční svorky opatrně.

1. Natlačte svorky do výklenků na spodním okraji prkénka, dokud se nedotknou závitu.

Poznámka: Nepoužívejte nářadí. Ujistěte se, že nejsou závity a šrouby poškozeny.

2. Opatrně otáčejte šrouby po směru hodinových ručiček, aplikujte nízký tlak, dokud pokračují závitem a boční svorka je zřetelně sunuta dále do prkénka.

3.4 Připojení prkénka

1. Složte nynější toaletní prkénko nahoru.

2. Položte zvýšené toaletní prkénko na mísu. Prkénko musí na míse sedět přesně a nekývat se.

3. Tlačte prkénko dozadu, dokud se přední část nedotkne mísy.

4. Otáčejte šrouby po směru hodinových ručiček ručně, než se boční svorky dotknou mísy rovnoměrně. Prkénko musí být na míse vycentrováno.

Poznámka: Nepoužívejte nářadí. Pouze přitáhněte šrouby ručně. Nepřetahujte šrouby. Jinak může být závit poškozen.

5. Dotáhněte šrouby ručně, aby nedošlo k uklouznutí prkénka

3.5 Odstranění zvýšeného prkénka

1. Otáčejte šrouby proti směru hodinových ručiček.

2. Odstraňte zvýšené toaletní prkénko.

4. Údržba a péče

Poznámka: Nepoužívejte žádný čisticí prostředek. Hrozí poškození plastového povrchu.

Produkt může být čištěn standardními prostředky (nerozpustné a s hodnotou pH 5-9).

Pokud je to nutné, nebo pokud používá produkt více než jedna osoba, povrch může být vydezinfikován volně dostupnou dezinfekcí (max. 70% alkoholu) **po čištění**. V závislosti na použité dezinfekci (nanášení sprejem nebo látkou) dodržujte pokyny použití dezinfekce.

Pokud se budete držet instrukcí k čištění a bezpečnosti, je produkt bezúdržbový.

Po čištění, usušte prkénko čistou látkou.

Jákoli nutně opravy nechte provést autorizované dílny.