

ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8,
tel: 266 313 652, fax: 266 313 652-11

M
VITA MAXIMA



MOBILNÍ KOUPACÍ VANA



pro dospělé a děti



Návod k použití - verze 11/2014

Popis:

Koupací vana slouží k provádění osobní hygieny ležících pacientů obsluhujícím personálem. Vana je určena k průtočnému omývání nebo k napuštění vody v nejvyšším bodě hladiny na 10 cm (myšleno i s pacientem), je třeba ale zamezit průtoku vody odtokovým rukávem.



Součástí sady je kromě vany i hustilka a 15 l kýbl k zachytávání použité vody. Dále je možno dokoupit sprchovací sadu (sprchovací hlavice se 4m hadicí). Při instalaci vany mimo lůžko lze dokoupit podložku s podhlavníkem.

Instalace vany:

Při instalaci mobilní vany je potřeba brát ohled na zdravotní stav pacienta, kterého přesuňte nebo překulte na bok k jedné straně lůžka a vanu položte po celé délce lůžka. Vanu na straně u pacienta po délce přeložte tak, aby po překulení pacienta na druhý bok bylo možno vanu rozvinout. Nafoukněte obvodové stěny vany přes oboustranný prepouštěcí ventil přiloženou hustilkou na střední tvrdost tak, aby stěny udržely vodu. Vana je určena pro ložné plochy lůžka 200x90 cm, ložná plocha dětské verze je 150x80 cm.

Odtokový rukáv umístěte v nohách lůžka. Po instalaci vany zkontrolujte, zda není odtokový rukáv přiskřípnutý nebo přeložený a jeho konec zaveďte do odpadu, nebo do kýble. Pokud to lůžko umožňuje, napoložte lůžko do mírného sklonu, aby mohla voda plynule odtékat a pacient v této vodě neležel.



Vanu lze instalovat i mimo lůžko, je třeba ale nutno zajistit pod vanu podložku pro lepší pohodlí pacienta. Sprchování provádějte s ohledem na míru postižení a stáří pacienta vlažnou vodou.

Materiál vany:

Vana je vyrobena z odolné, antialergické, gumové textilie, s atestem zdravotní nezávadnosti. Je uzpůsobena k tomu, aby se snadno „podvlékla“ pod ležícím pacientem. Materiál je konstruován tak, aby se vana udržela v nafouknutém stavu po dobu 12ti hodin.

Zásadní pravidla pro obsluhu, údržbu a skladování:

1. Vanu skladujte v suchu do teploty 40°C a nevystavujte přímému slunci.
2. Výrobek je určen pouze pro hygienu pacientů, nepoužívat např. jako člun.
3. Pozor na ostré hrany a špičaté předměty.
4. Nafukovat pouze přiloženou hustilkou a nepoužívat elektrický kompresor, mohlo by dojít k přehuštění a poškození výrobku.
5. Při nafukování ventil uzavřít, tedy lehce dotáhnout ve směru hodinových ručiček.
6. Při vyfukování ventil otevřít cca o tři obrátky proti směru hodinových ručiček.
7. Vždy používat ochranné víčko ventilu, aby nedošlo k jeho zanesení.
8. Na mytí výrobku před dalším použitím užít běžný saponát a schválený desinfekční roztok. Nepoužívat ředila čistící prostředky na bázi acetyleny, benzínu a abraziva.
9. Při provádění hygieny pacienta se řídit se všemi schválenými bezpečnostními a hygienickými předpisy.

Dodržováním těchto pravidel prodloužíte životnost a funkčnost tohoto výrobku!

Záruka:

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením a nesprávným skladováním.

Dodavatel ujišťuje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.

Veškeré záruční i pozáruční opravy zajišťuje výhradně firma ORTOSERVIS v následujících střediscích:

ORTOSERVIS
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
fax: 266 313 652 11

ORTOSERVIS
Pivovarská 7/71
746 01 Opava
tel/fax: 553 775 226

ORTOSERVIS
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 432 502

ORTOSERVIS
Minská 100
616 00 Brno
tel/fax: 541 240 393

Váš

ORTOSERVIS