

# ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO MONACO RA-173



Chodítko s hliníkovým rámem, předními otočnými koly 250mm v průměru a zadní 200 mm. Sedák má otočnou opěrku zad pro krátký odpočinek během chůze nebo je možno otočit a zavěsit podnožky pro funkci transportního vozíku. Brzdy na rukojetích umožňují přizpůsobit rychlost chůze potřebám uživatele. Výšku rukojetí je možné nastavit. Chodítko je skládací, jeho součástí je taška a držák hůl.

## Technické údaje:

Rozměry chodítka (š x h) .....	66 x 77 cm
Výška rukojetí .....	85 – 102 cm
Rozměry sedáku .....	37 x 35 cm
Výška sedáku .....	52,7 cm
Hmotnost .....	8,8 kg
Nosnost .....	136 kg

## Návod k použití:

### A. První rozložení chodítka

1. Vyjměte rám z krabice a zasuňte přední kola.
2. Zasuňte zadní kola a madla s brzdami.
3. Zajistěte výšku madel pomocí šroubů.
4. Nasadte na levé spodní straně objímku držáku hole. Na horní straně je spona na držení hole.

### B. Složení chodítka

1. Odkolpte sedátko a za kovové madle zvedněte chodítko. Tímto se složí.

## Upozornění:

Chodítko používejte pokud možno na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou vpustě do kanálů a podobně. Za mokra a sněhu pamatujte na to, že brzdy chodítka ztrácejí na účinnosti a hrozí nebezpečí úrazu a poškození chodítka.

V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Brzdy jsou nastavitelné a pro bezpečnost provozu je nutné kontrolovat, zda jsou obě nastaveny stejně.


Chodítko se nesmí přetěžovat - maximální hmotnost uživatele je 135 kg.

## Používání chodítka:

Obsluha chodítka je velmi jednoduchá.

Černá páčka na rukojeti slouží k přibrzdování chodítka při chůzi tak, aby poskytovalo dobrou oporu. Stříbrné tlačítko na brzdě slouží jako parkovací brzda, která se používá při zastavení. Tlakem na tlačítko při plně zmáčknuté černé páčce dojde k zabrzdění chodítka. Jestliže chcete pokračovat v chůzi, přitlačte černou páčku směrem k rukojeti, tím chodítko vypne parkovací brzdu a je připraveno na další cestu.

Po skončení chůze opět můžete chodítko snadno složit pro lepší transport.

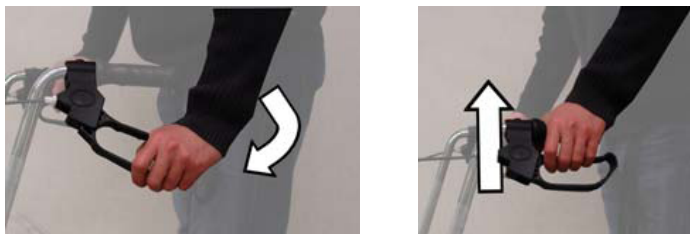

## Údržba:

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík, na silnější nečistotu použijte běžné čisticí prostředky.

**Materiál:** hliník, nylon, plast

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Datum poslední revize: 22. 5. 2022



**Vyrábí:** Intermed A.S. Milano, Itálie, [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)

**Dodává:** Orlandino s.r.o., Elišky Přemyslovny 433, Praha 5, Tel: 257 923 005

[orlandinosro@seznam.cz](mailto:orlandinosro@seznam.cz)