

STOLEK K LŮŽKU EASY

CZ — Před použitím si důkladně přečtěte tyto poznámky. Postupujte podle pokynů a uschovejte je na bezpečném místě. Mají-li tuto pomůcku používat další osoby, musí být před použitím plně informovány o těchto bezpečnostních varováních.

1. Bezpečnostní indikace

- VŽDY se poraďte se svým lékařem nebo dodavatelem, abyste zjistili správné nastavení a použití zařízení.
- Neskladujte venku a nenechávejte na slunci (POZOR: nenechávejte zařízení v autě v případě vysokých venkovních teplot!!!).
- Nepoužívejte v extrémních teplotách (nad 38°C nebo 100°F nebo pod 0°C nebo 32°F).
- Pečlivě zkontrolujte všechny části tohoto zařízení (šrouby, trubky, kolečka...).
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části dotaženy.
- Používejte pouze správným způsobem: nestávejte na stůl.
- VŽDY dodržujte hmotnostní limit uvedený na štítku výrobku.
- Po sestavení stolu se ujistěte, že je stůl před použitím bezpečně zajištěn v poloze OPEN a vodorovně k zemi.
- Na tomto zařízení nesmí být prováděny žádné úpravy. Poškozené nebo vadné díly vyměňte pouze za originální díly a nechte to provést technickým personálem.
- Pokud jste svůj stůl neužívali dlouhou dobu, nechte ho před použitím zkontrolovat technickým personálem.

2. Určený účel, indikace a kontraindikace

Pouze odborník může produkt seřadit a naučí vás, jak jej používat. Nesprávné použití nebo seřazení by mohlo vést k přetížení zařízení nebo pacienta. Zeptejte se technického personálu, jak tento produkt používat a ujistěte se, že jste jasně rozuměli jejich vysvětlení. Každý krok je popsán v tomto uživatelském manuálu. V případě pochybností se neváhejte zeptat znovu.

Určený účel:

Tento stolek je funkční pomůckou pro ošetřovatelství, která umožňuje jíst, pít a číst si, zatímco pohodlně sedíte v posteli.

Indikace:

Cílem tohoto výrobku je pomoci zdravotnickému personálu, když je postel ošetřovatelské péče nebo rám postele používán pro pacienta upoutaného na lůžko, například v případě neschopnosti pacienta jíst samostatně mimo postel. Povrch stolu může být také používán pacientem k odkládání věcí.

Kontraindikace:

Demence; zlomeniny horních končetin nebo silné svalové slabosti vedoucí k neschopnosti pacienta zvednout horní končetiny.

Montáž:

Při montáži postupujte podle níže uvedených kroků, které odpovídají obrázkům uvedeným na konci uživatelského manuálu.

Krok 1: Zkontrolujte poškození. Pokud nějaké vidíte nebo máte podezření na závadu, výrobek nesestavujte. Zkontrolujte obsah, jak je znázorněno na obrázku.

Krok 2: Zasuňte díl (2) do dílu (1), umístěte podložku (4) a volně přišroubujte pomocí pojistné matice (3). Získaná nová část je očíslovaná (6).

Krok 3: Vezměte desku (7), položte ji na zem. Zasuňte díl (6) do desky a utáhněte pojistnou matici (3). Získaná nová část je očíslovaná (8).

Krok 4: Zajistěte trubku kolečky (10) na rámu (11) pomocí šroubů (5); našroubujte pojistnou matici (9) na rám.

Krok 5: Vložte horní část (11) do základního rámu.

POZOR: Před použitím se ujistěte, že je stůl sestaven podle popisu, a že jsou všechny součásti bezpečně připevněny. Před použitím zkontrolujte stabilitu.

Provozní pokyny:

Tento přílůžkový stolek lze použít k jídlu, pití atd., zatímco sedíte v posteli nebo na židli. Je nastavitelný jak na výšku, tak na šířku a je vybaven 4 kolečky (2 z nich jsou uzamykatelná).

POZOR: Neopírejte se o zavěšený konec desky stolu; může to způsobit převrnutí stolu. Stůl udrží až 10kg rozložené hmotnosti. Nepřekračujte tento limit.

3. Čištění

Výrobek pravidelně čistěte suchým a čistým hadříkem.

4. Materiály


Trubka z epoxydované lakované oceli, PP kolečka a dřevěná deska stolu.

5. Likvidace

Zlikvidujte tento produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

6. Technické specifikace

Jsou uvedené pod obrázkem v tabulce na konci uživatelského manuálu. Doba použitelnosti: 2 roky. Tento výrobek má 24měsíční záruční dobu od data zakoupení na jakoukoli výrobní vadu.

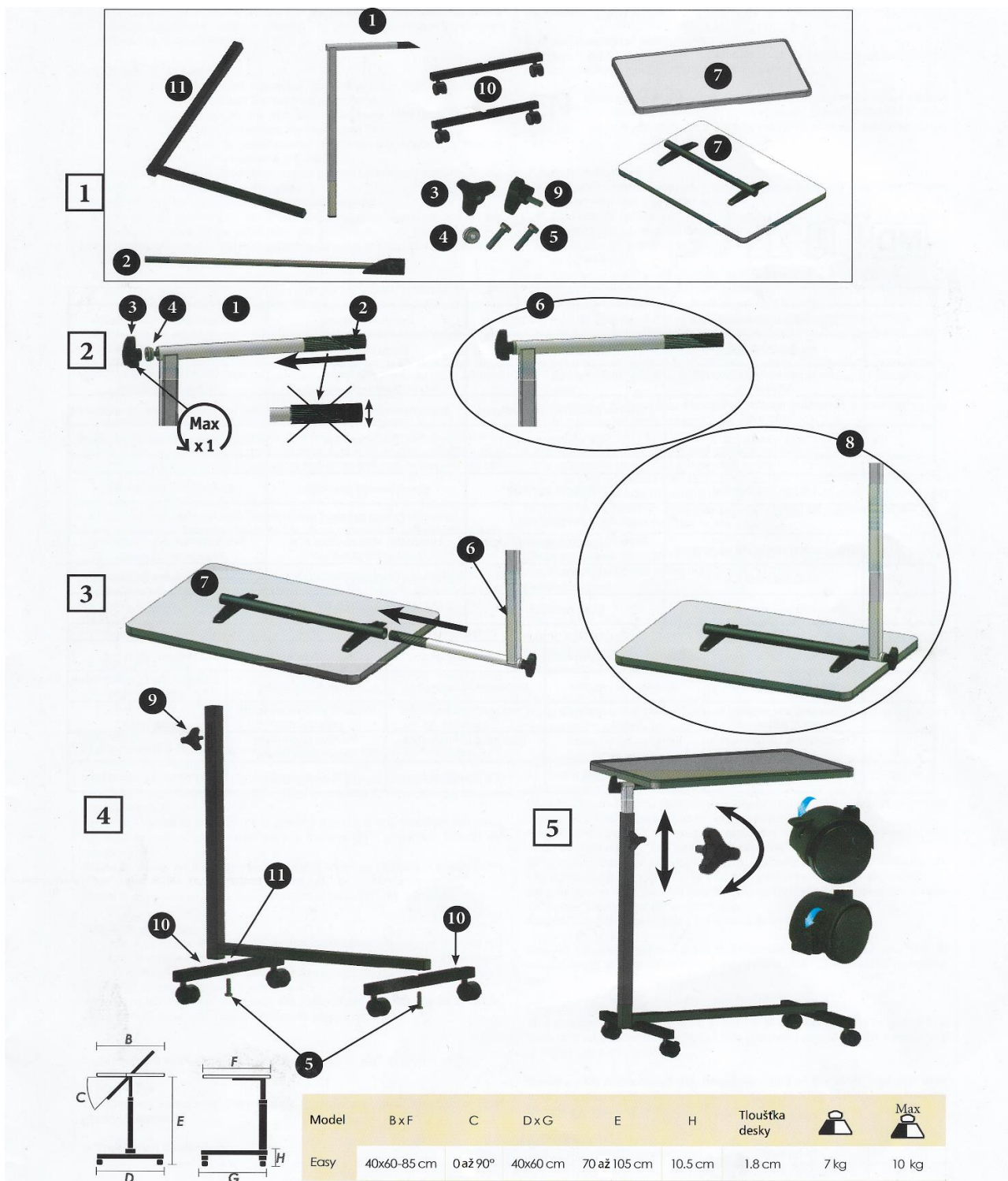

CZ	
	Vysvětlení symbolů
1	Zdravotnický prostředek
2	Před použitím si přečtěte návod k obsluze
3	Dodržujte bezpečnostní pokyny
4	Certifikát CE