

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Anatomický krční polštář 49 x 31 cm


SYMBOL: 27745; EAN/GTIN: 5907451382752

CZ

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtete níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

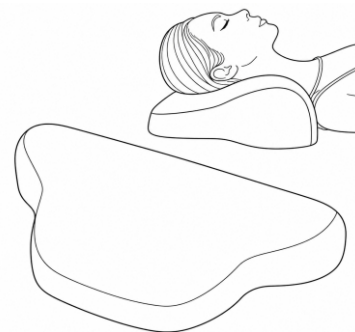

Použití a popis zařízení

Tento ortopedický polštář je navržen tak, aby poskytoval správnou oporu hlavy, krku a krční páteře během spánku. Jeho tvar se dokonale přizpůsobuje přirozeným křivkám těla, pomáhá snižovat svalové napětí a zlepšuje pohodlí při klidu.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití a není určen pro lékařské ani komerční účely a není určen k nahrazení lékařské terapie. Výrobek je určen pro vnitřní použití v suchých místnostech. Není určen pro lékařské, terapeutické ani komerční účely.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí nesprávného použití!

Používání výrobku jiným způsobem, než ke kterému je určen, a/nebo používání výrobku jakýmkoli jiným způsobem může být spojeno s různými riziky.

Výrobek by měl být používán pouze k určenému účelu.

Dodržujte prosím postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

TIP

Výrobek je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.

V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení či přepravy kontaktujte prosím servisní linku.

Bezpečnostní tipy a pravidla

Výrobek je určen výhradně k použití jako polštář pro odpočinek a spaní.

Polštář neohýbejte ani nadměrně nedeformujte, mohlo by dojít k trvalému poškození paměťové pěny.

Polštář by měl být skladován na suchém a vzdušném místě, mimo dosah vlhkosti a zdrojů tepla.

Nevystavujte výrobek dlouhodobému slunečnímu záření, abyste zabránili deformaci a ztrátě materiálových vlastností.

Pokud se znečistí, doporučuje se jej vyčistit dle pokynů pro daný potahový materiál.

K čištění polštáře ani povlaku nepoužívejte agresivní chemikálie ani bělidlo.

Polštář by neměl přijít do kontaktu s otevřeným ohněm ani vysokými teplotami, mohlo by dojít k poškození materiálu.

Výrobek není hračka a měl by být uchováván mimo dosah malých dětí.

Pokud během používání pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, změňte polohu nebo přestaňte výrobek používat.

Lidé s problémy s páteří by se měli o používání polštáře poradit se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.

Neskákejte ani nesedejte na polštář, mohlo by dojít k trvalé deformaci pěny.

Pravidelné větrání polštáře pomáhá udržovat jeho svěžest a pohodlí při používání.

Polštář by se neměl prát v pračce, pokud to výrobce potahu nebo materiálu neumožňuje.

Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pro udržení hygieny se doporučuje používat polštář s ochranným potahem nebo návleky na polštář.

Výrobek by měl být chráněn před ostrými předměty, které by mohly pořezat nebo poškodit povrch polštáře.

Dlouhodobé skladování pod těžkými předměty může způsobit deformaci materiálu a ztrátu jeho ergonomických vlastností.

Při prvním použití může polštář po vybalení potřebovat krátkou dobu, aby se plně vrátil do svého tvaru.


Pro zachování nejlepších vlastností paměťového polštáře se doporučuje jej pravidelně používat dle určení a vyhnout se nadměrnému tlaku.

Produkt by měl být vždy používán dle určení.

Technické údaje výrobku

| | |
|----------|--------------------------|
| Symbol | 27745 |
| EAN | 5907451382752 |
| Materiál | Polyester, pěna |
| Formulář | Profilovaný nepravidelný |
| Rozměry | 49 cm x 31 cm x 8 cm |

Výstražné a informační symboly

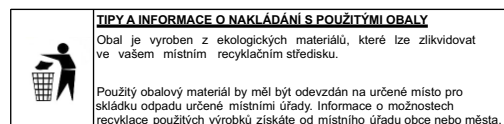

Vyhrazujeme si právo provádnout změny textu, designu a údajů o produktech bez předchozího upozornění.

Dovozce / Dovožce

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl