


NÁVOD K POUŽITÍ MD-A900

MASÁŽNÍ KŘESLO S DVĚMA MASÁŽNÍMI MECHANISMY

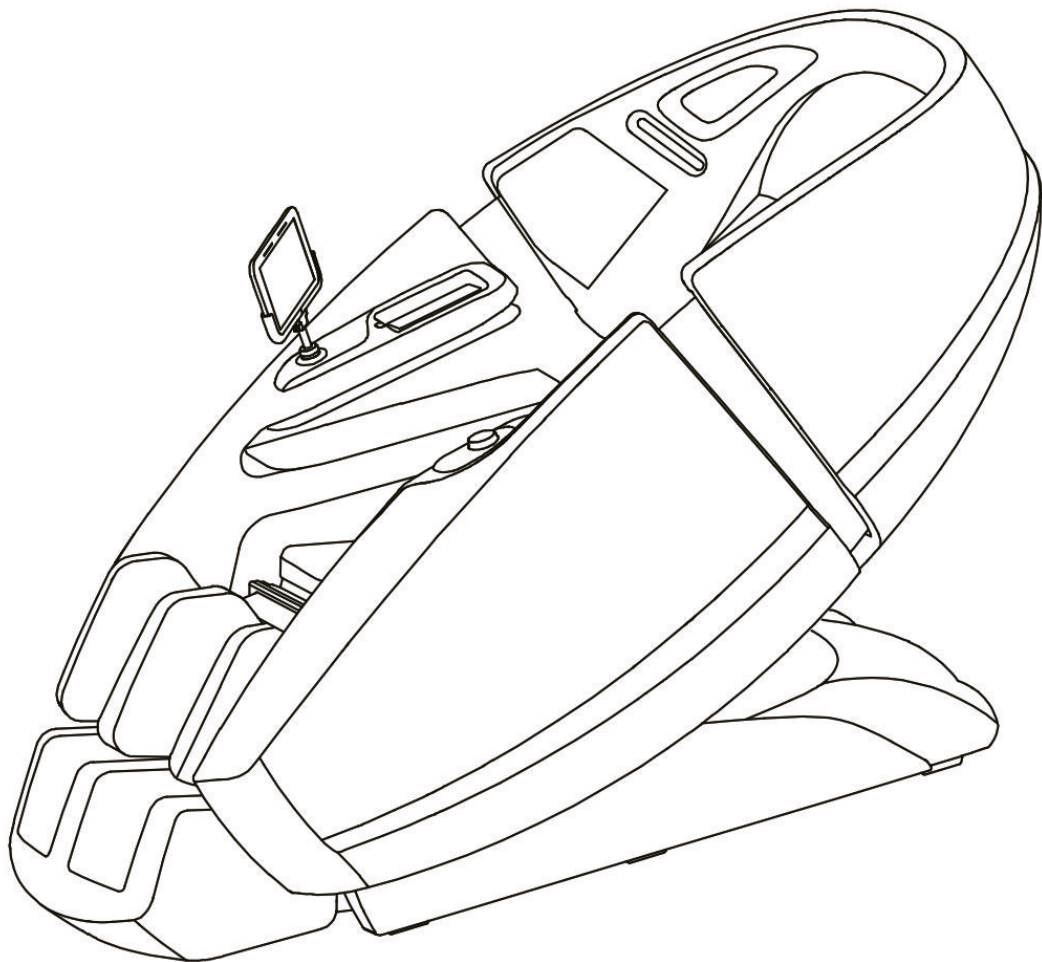

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

OBSAH

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím masážního křesla si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití, který obsahuje instrukce pro správné používání masážního křesla. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny. Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění.

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

Důležitá bezpečnostní upozornění	4
Popis křesla	9
Instalace křesla.....	10
Nastavení křesla před masáží.....	14
Prostředí a okolí kolem křesla	14
Manipulace s křeslem	15
Ovládání	18
Integrované ovládání na boční opěrce.....	18
Dálkový ovladač (s dotykovou obrazovkou).....	19
Spuštění masáže	33
Zapnutí křesla.....	33
Skenování postavy	33
Spuštění masáže	33
Vypnutí křesla.....	35
Vystupování a nastupování	35
Funkce masážního křesla.....	36
Údržba.....	39
Údržba a skladování	40
Péče a údržba	41
Řešení problémů a potíží.....	42
Technická specifikace	43

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nedovolte dětem, aby se dotýkaly pohyblivých částí přístroje, mohlo by dojít k jejich zranění.
- Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také před jeho čištěním.
- Pro napájení tohoto přístroje používejte pouze správně zemněné elektrické zásuvky se jmenovitým napětím odpovídajícím specifikacím přístroje.
- Při používání masážního křesla vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou schválené výrobcem.
- Přístroj nikdy neprovozujte venku.
- Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud je zapnuté.
- Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami.
- Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů.
- Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty.
- Tyto otvory je třeba pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo obdobných nečistot.
- Nikdy do vnitřních prostor přístroje nekládejte jiné předměty.
- Maximální souvislá doba masáže je 30 minut.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen kožený potah.
- Vyvarujte se usnutí během masáže, mohlo by dojít ke zranění.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jste požili alkohol.
- Přístroj používejte nejdříve jednu hodinu po jídle.
- Nikdy nenastavujte intenzitu masáže příliš silnou, mohlo by dojít ke zranění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE MÍSTA POUŽÍVÁNÍ

- Nepoužívejte přístroj ve vysoce prašných prostorách.
- Přístroj neprovozujte v místech s vysokou teplotou a stejně tak v místech s vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.
- Pokud se okolní teplota masážního křesla náhle změnila, křeslo ihned nezapínejte, ale vyčkejte se zapnutím, dokud se teploty přístroje a okolí nevyrovnejí.
- Kolem křesla musí být během jeho používání dostatek volného prostoru a stejně tak musí být zajištěno dostatečné větrání.

- Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.

NEVYHOVUJÍCÍ UŽIVATELÉ

Dále uvedení uživatelé by masážní křeslo neměli používat, nebo musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami nebo používající kardiostimulátor.
- Osoby trpící osteoporózou.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařizenu léčbu klidem.
- Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku nebo mají zvýšenou citlivost na teplo.
- Osoby s kožními problémy.
- Děti mladší 12 let.
- Osoby, jejichž tělo je mokré, nesmí používat toto masážní křeslo.

INSTRUKCE PRO SPRÁVNÉ ZEMNĚNÍ

Tento přístroj musí být uzemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje zemnění cestu s nejmenším odporem, proud tak odeče touto cestou, což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Toto zařízení je dodáváno s elektrickou zástrčkou, která má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Proto musí být zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a zemněná podle místních norem a standardů. Nesprávné připojení přístroje a zemnicího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jistí, je doporučeno nechat správné připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat správnou zásuvku. Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba žádný adaptér.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto masážního křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním použitím pečlivě přečetl tento návod k použití.
- Před připojením křesla do elektrické zásuvky se přesvědčte, že napájecí napětí elektrické zásuvky je stejné jako napájecí napětí uvedené ve specifikacích přístroje.
- Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými terapeutickými zařízeními, elektrickými příkrývkami, a podobnými přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce zranění uživatele.
- Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, zejména pak za zádivou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by mohlo dojít k jejich zranění nebo k poškození křesla.
- Nepokládejte na zádivou opěrkou, opěrkou rukou nebo podnožku žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke zranění uživatelů, pokud by tento předmět upadl.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré.
- Křeslo neovládejte s mokrýma rukama.
- Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní. Maximální doba pro bodovou masáž je 5 min.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty včetně rukou do vnitřních částí přístroje. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození masážního křesla.
- Zamezte namočení nebo vniknutí vody do jakékoli části masážního křesla.
- Nikdy nepoužívejte k čištění elektrických částí přístroje vodu nebo navlhčenou látku.
- Nikdy nezasahujte nebo neměňte vnitřní elektrické obvody přístroje.
- Přestaňte používat masážní křeslo okamžitě, jakmile se přístroj začne chovat abnormálně.
- Přestaňte používat přístroj, pokud začnete pociťovat nějaké zdravotní problémy. Problémy konzultujte se svým lékařem.

DŮLEŽITÉ!

Během používání křesla vždy sedíte ve vzpřímené poloze. Nehrbte se!

Pokud požadujete jemnější masáž, můžete změnou sklonu zádivé opěrky ovlivnit intenzitu masáže. Dále můžete přes zádivou opěrkou položit ručník nebo deku.

Použití masážního křesla k dlouhodobému sezení nebo ležení není doporučeno.

Masážní hlavice neumísťujte přímo na hlavu, ramenní klouby, břicho nebo jiné citlivé části těla.

Doporučené doba masáže je 15 – 30 minut. Není doporučeno provádět masáž na jednom místě déle než 5 minut.

KDY BY NEMĚLO BÝT KŘESLO POUŽÍVÁNO

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě hlavní vypínač do polohy OFF („0“) a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte servisní centrum:

- Pokud dojde náhodou k polití křesla vodou. Pokračování v používání křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální chování přístroje.
- Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by mohlo způsobit zranění.
- Pokud se objeví náhlý záblesk.

Poznámka: Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že zvednete zádovou opěrku a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny. Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrháný. Okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

ROZEBÍRÁNÍ A OPRAVY KŘESLA

- Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Křeslo může být opravováno pouze ve specializovaném servisním centru a uživatel křeslo nesmí sám rozebírat nebo opravovat.

POZNÁMKY K NAPÁJECÍMU KABELU A ELEKTRICKÉ ZÁSTRČCE



Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla.

- Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za koncovou zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel.
- Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem.
- Neumísťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho poškození a následně k úrazu elektrickým proudem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním střediskem.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná.

UPOZORNĚNÍ PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Na dálkový ovladač a držák ovladače nesedejte, nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty.
- Vyvarujte se pádu ovladače na zem. Je doporučeno ukládat dálkový ovladač do jeho držáku, pokud není delší dobu používán.
- Při práci s dálkovým ovladačem nebo držákem ovladače nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Dálkový ovladač neovládejte s mokřýma rukama.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte žádné ostré nebo těžké předměty, mohlo by dojít ke zničení ovladače.
- Pokud ovladač nepoužíváte, umístěte jej do držáku.

POPIS KŘESLA

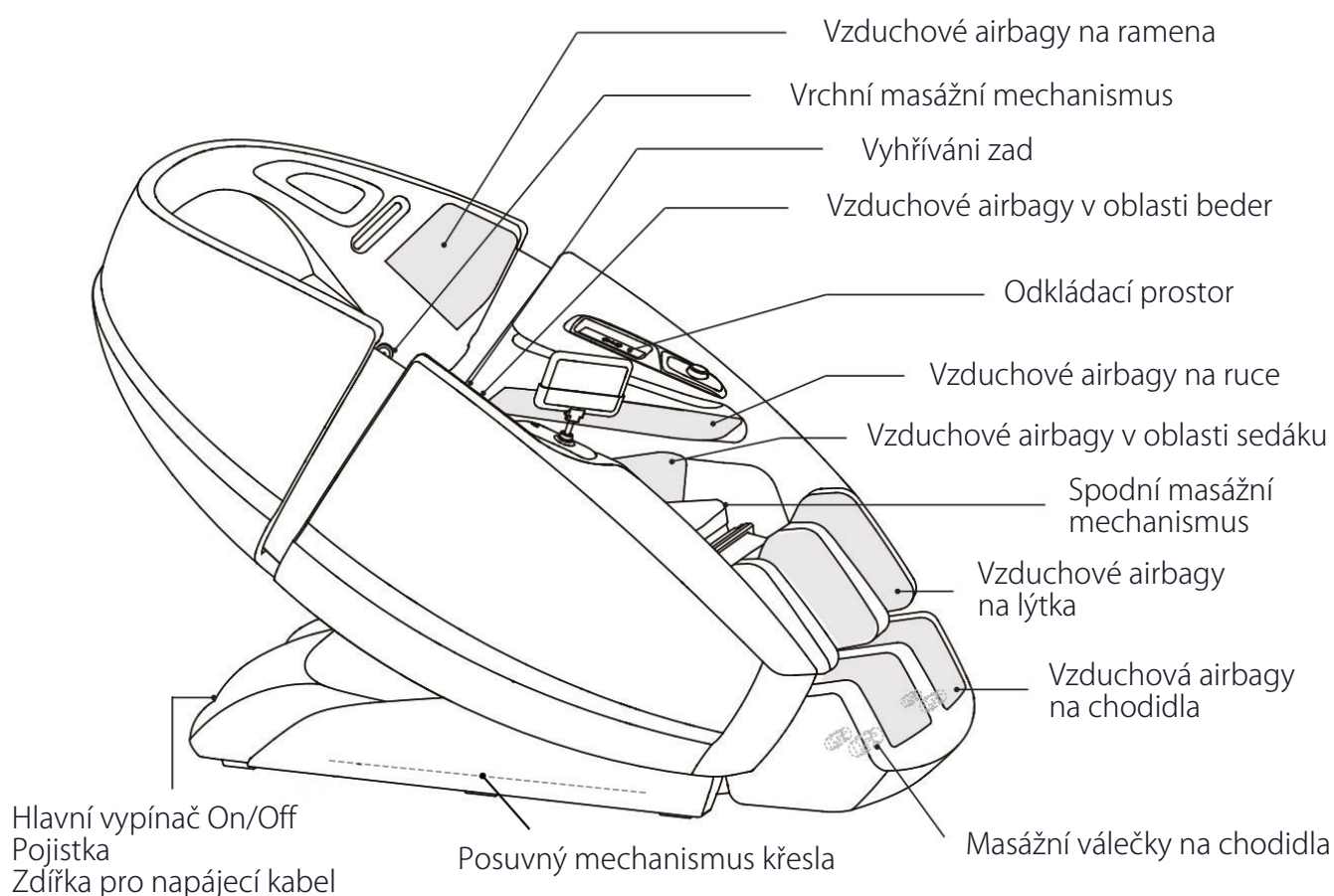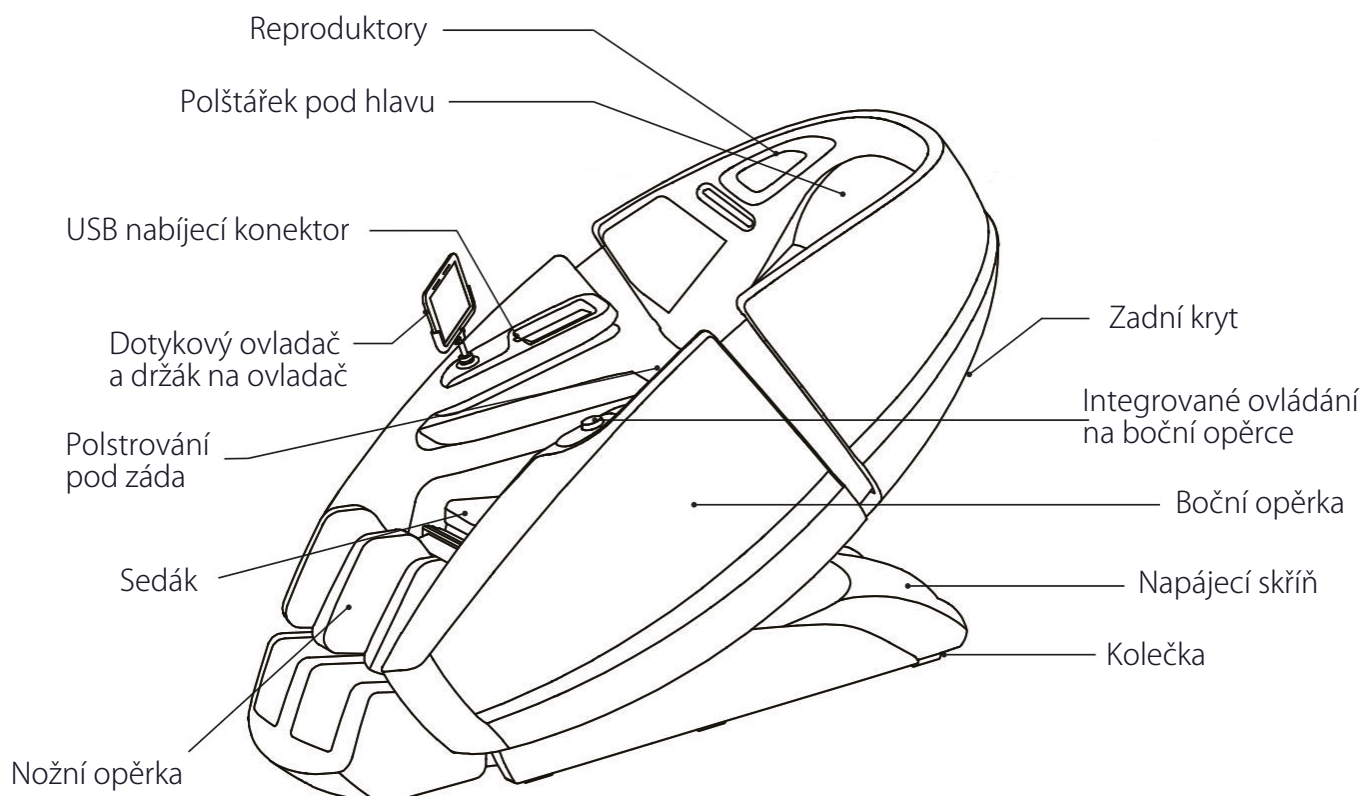


INSTALACE KŘESLA

VAROVÁNÍ

Křeslo je velice těžké a pro manipulaci s ním jsou potřeba minimálně dva lidé. Během montáže vždy dávejte dobrý pozor, aby nedošlo k ohnutí nebo přiskřípnutí kabelů.

ROZBALENÍ A MANIPULACE S KŘESEM


1. Po rozbalení krabice sundejte z křesla příbaly s příslušenstvím.
2. Při manipulaci s křeslem a jeho částmi zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození či poškrábání povrchu dané části.
3. Pro manipulaci se základní částí křesla je potřeba alespoň dvou, ideálně tří osob. Chyťte křeslo za přední stranu v oblasti nožní opěrky (která není nasazená) za železný rám (nebo za přední madla umístěné na vnější straně spodního rámu křesla viz. obr níže) a v zadní části v oblasti zádové opěrky, kde jsou k tomu určené úchyty.
4. Z další krabice vyndáte boční opěradla. Držte boční opěradlo pevně dvěma rukama po obou stranách. Položte boční opěradla na rovný a čistý povrch.
5. V další krabici je umístěna nožní opěrka, kterou opět dvěma rukama pevně uchopíte a vyndejte z krabice a položte na rovný a čistý povrch.

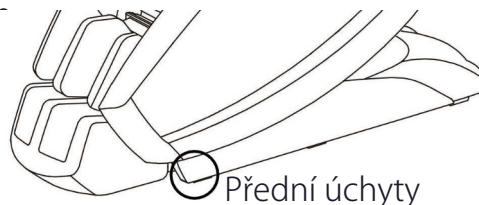


Přední úchyty

MONTÁŽ BOČNÍCH OPĚRADEL

1. Vyndejte boční opěrku z krabice a přiblížte ji ke křeslu, propojte všechny kabely na boční opěrce s kabelami na křesle viz obrázek níže.

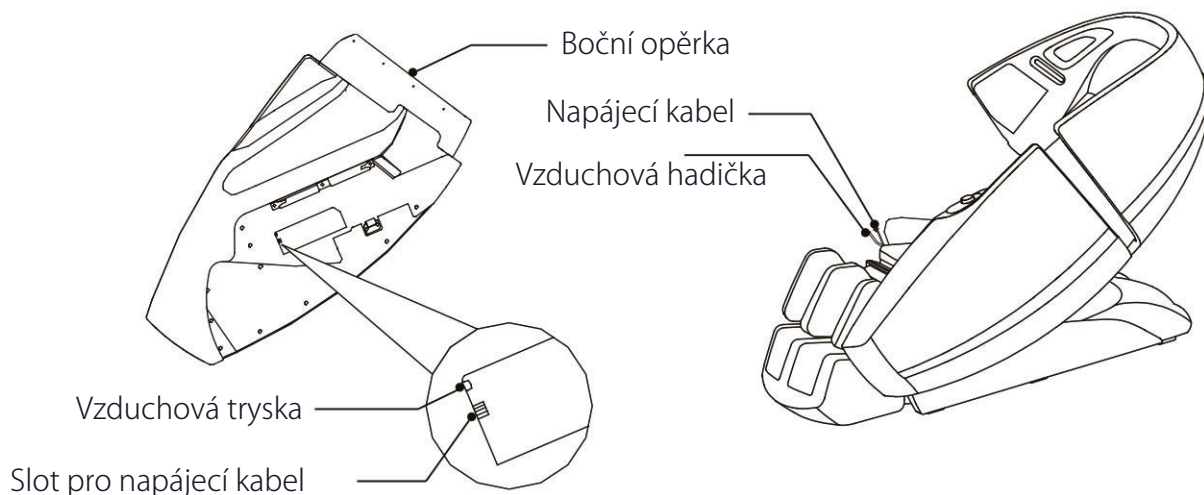



2. Boční opěrku opatrně nasuňte na rám křesla ramenem 2 viz obr. níže, dokud se nevyrovná s ramenem 4. Následně nasadte rameno 1 do ramena 3 a zajistěte boční opěrku pomocí šroubu.
3. Stejný postup platí i pro druhou stranu.

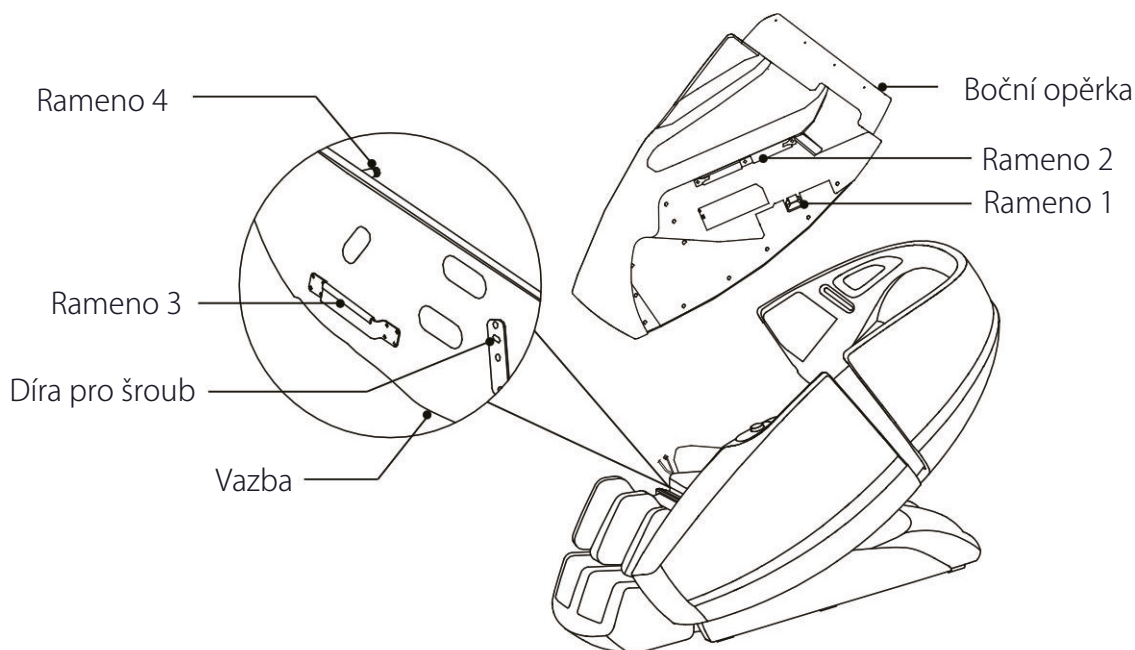

MONTÁŽ NOŽNÍ OPĚRKY


1. Nožní opěrka se připevní k základní části křesla. Nasadte objímku na rameno nožní opěrky viz obr. 1).
2. Nožní opěrku přisuňte ke křeslu a propojte kabely vedoucí z nožní opěrky s kabelami v přední straně křesla.
3. Nasadte ramena nožní opěrky na hřídele umístěné na přední straně křesla viz obr. 2).
4. Nasadte DK pojistku na konec hřídel pro zajištění nožní opěrky viz obr. 3).
5. Spojte polstrování na sedáku s nožní opěrkou pomocí zipu.

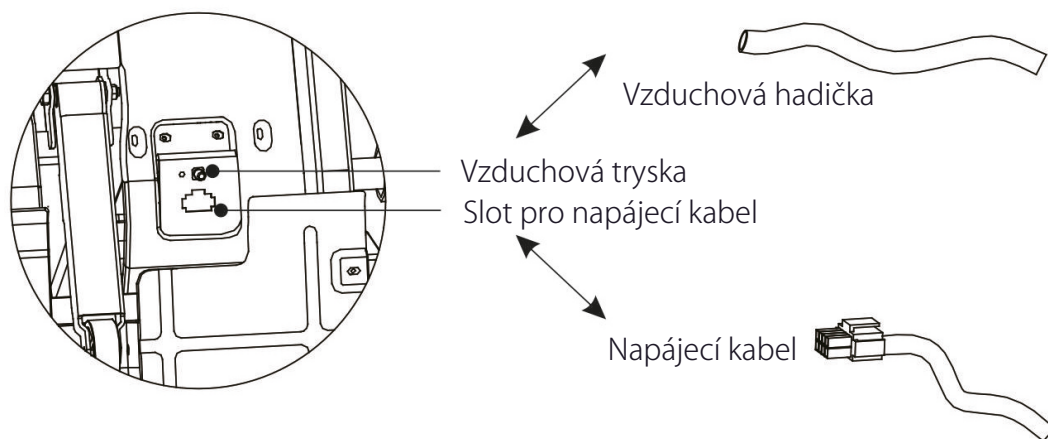

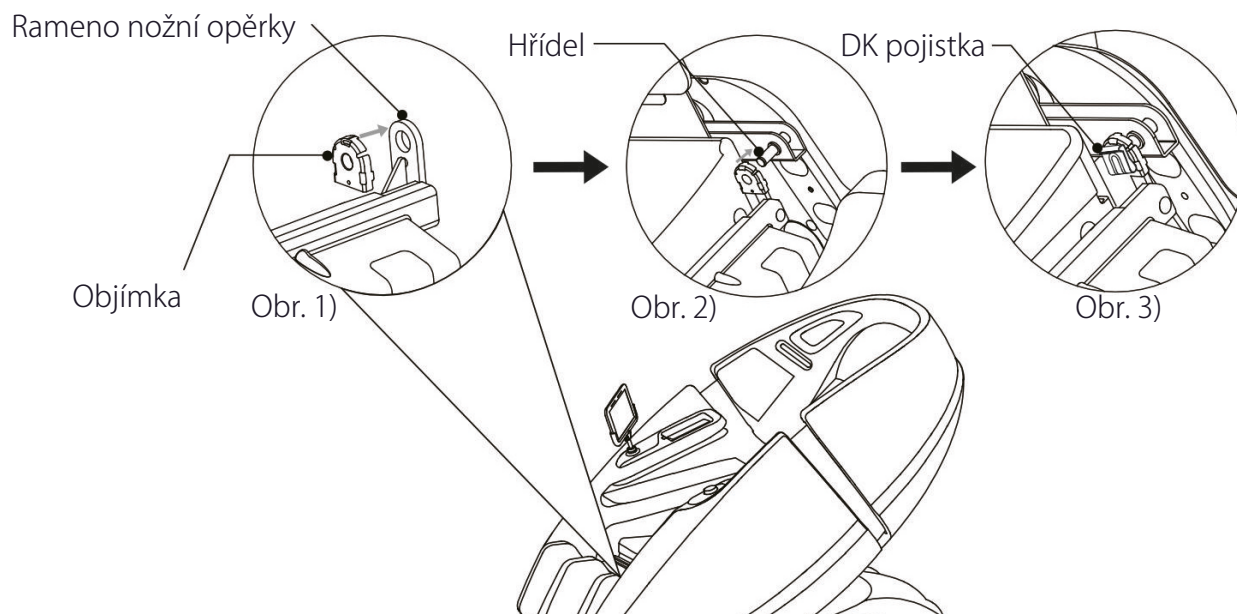

INSTALACE DRŽÁKU PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. Umístěte spodní část držáku ovladače do otvoru k tomu určenému, který je umístěn na pravé boční opěrce.
2. Zašroubujte na držáku matici k řádnému upevnění držáku.
3. V držáku je konektor, který udržuje ovladač stále nabitý. Vždy po skončení masáže zkontrolujte zda je ovladač do tohoto konektoru řádně zapojen. V opačném případě může dojít k vybití ovladače.

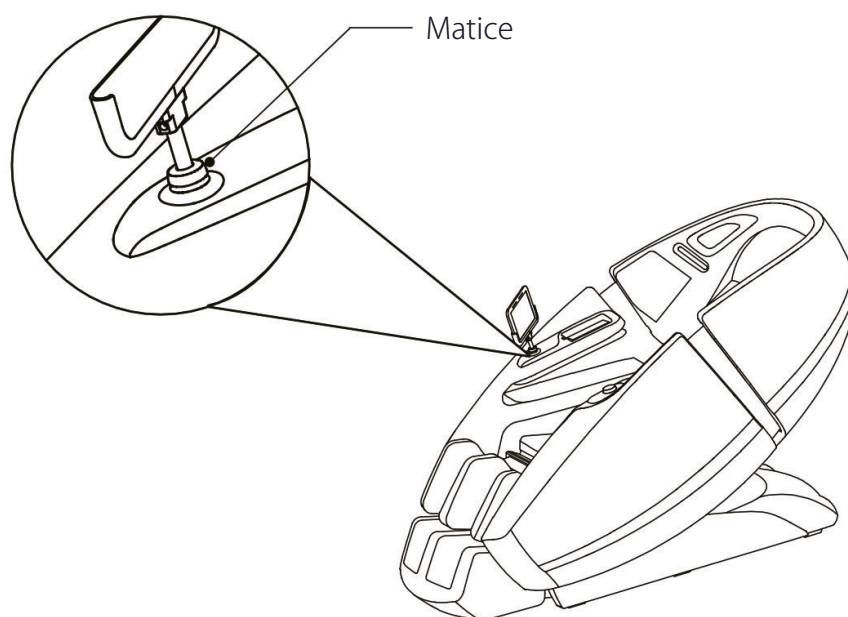

VAROVÁNÍ



Neumísťujte masážní křeslo do vlhkých prostorů jako například poblíž bazénu, koupelny, protože by mohlo dojít k elektrickému šoku.



Nepoužívejte na přímém slunečním světle, poblíž sporáků, radiátorů protože může dojít ke zhoršení kvality čalounění a jejímu následnému poškození. Dále vlivem tepla může dojít ke zhoršení vlastností maziva u namazaných částí.

Prosím používejte masážní křeslo na rovném povrchu, vyhněte se pádu křesla a nepříjemným zvukům, které mohou v důsledku špatného umístění vzniknout.

NEBEZPEČÍ






Tento produkt musí být uzemněný. V případě zkratu v elektrické síti uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že zajišťuje únikový vodič pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven kabelem se zemním vodičem a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena ke správně instalované a uzemněné zásuvce.

PO SESTAVENÍ KŘESLA

Jakmile je křeslo sestavené je potřeba ho vrátit do základní polohy (poloha v sedě).

1. Zkontrolujte zda je hlavní vypínač na zadní straně křesla v poloze 0 (OFF) - značí vypnutí křesla.
2. Zapojte napájecí kabel do křesla a následně do zásuvky.
3. Hlavní vypínač zapněte do polohy 1 (ON) - značí zapnutí křesla.
4. Na integrovaném ovládacím na boční opěrci stiskněte tlačítko ON pro zapnutí a křeslo se začne polohovat. Dalším dlouhým stiskem tlačítka se křeslo vypne a křeslo se samo začne polohovat do své základní polohy.

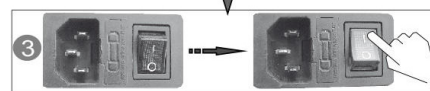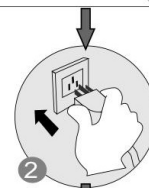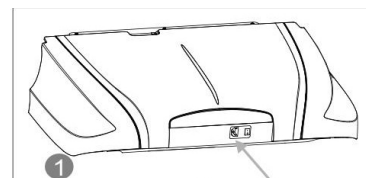

Tlačítko ON/Off na integrovaném ovladači.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se že je hlavní vypínač v poloze 0 (OFF), dříve než zapojíte napájecí kabel.


NASTAVENÍ KŘESLA PŘED MASÁŽÍ

PROSTŘEDÍ A OKOLÍ KOLEM KŘESLA


Kontrola prostoru pro polohování

Zkontrolujte oblast před nožní opěrkou zda tam není nějaká překážka (např. stůl, křeslo jiná osoba nebo domácí mazlíček), která by bránila v napolohování nožní opěrky směrem nahoru a vysunutí směrem dopředu.

Při prvním polohování křesla zkontrolujte zda by během polohování nedocházelo ke kontaktu s okolními předměty či zdi. Vyzkoušejte maximální rozsah polohování co křeslo nabízí. Vyzkoušejte i maximální výjezd nožní opěrky směrem dopředu.

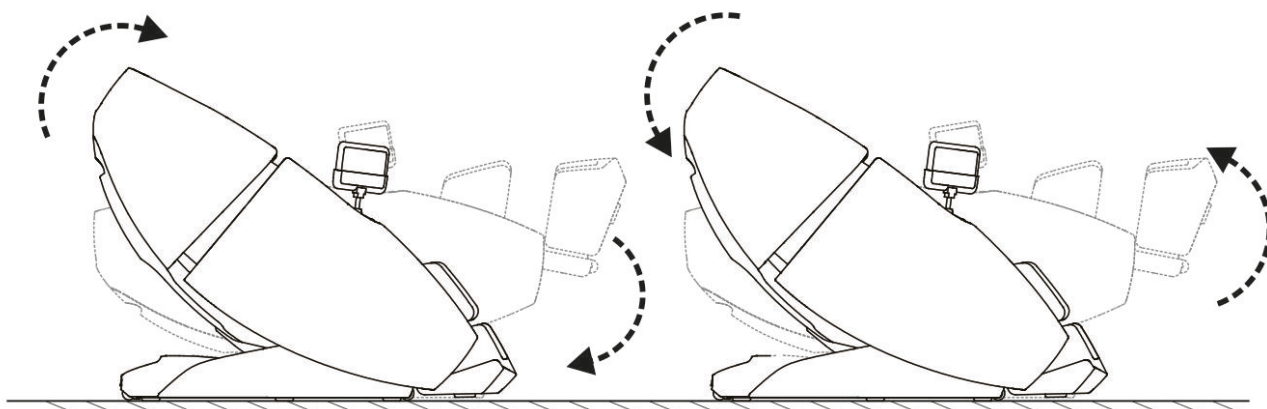

Křeslo musí být umístěné nejméně 10cm od zdi a velikost prostoru před nožní opěrkou musí být nejméně 60cm. Umístěte křeslo aspoň 1m od TV, rádia a ostatních audio a video zařízení, aby nedocházelo k rušení signálu.

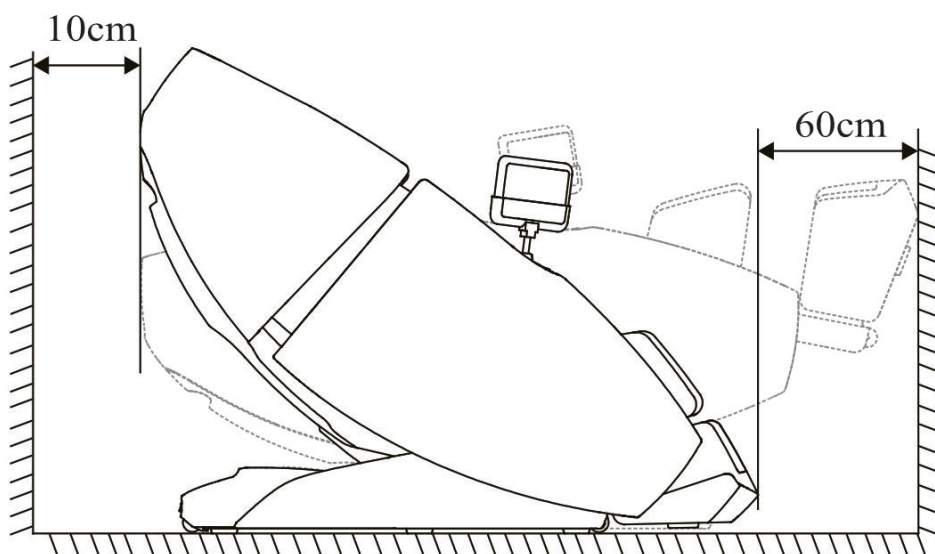

Kontrola napájecího kabelu

- Vyčistěte od prachu oblast kolem zapojení napájecího kabelu do křesla a zásuvky.
- Zkontrolujte zda není kabel poškozený jako např. přiskřípnutý, zlomený, natržený apod...
- Ujistěte se, že je kabel správně zasunutý do křesla i zásuvky.
- Zkontrolujte zda se kabel nezahřívá. V takovém případě je potřeba ho vyměnit za nový.

MANIPULACE S KŘESEM


VAROVÁNÍ

Nemanipulujte s křeslem během masáže nebo když je křeslo zapnuté, jinak může dojít k poškození křesla.

Při manipulaci pomocí koleček může dojít k poškození Vaší podlahy. V případě, že máte měkkou podlahu s křeslem nemanipulujte pomocí koleček, ale nadzvednutím celého křesla do výšky a následným přemístěním.

Jak přemístit křeslo bez využití koleček

- Křeslo musí být napolohované v poloze vleže. Na tvrdo vypněte křeslo hlavním vypínačem na zadní straně křesla a odpojte napájecí kabel. Křeslo tak zůstane napolohované a je možné ho nadzvednout do výšky.
- Nepoužívejte kolečka k manipulaci pokud je podlaha měkká a náchylná k poškození jako je otlačení koleček nebo poškrábání. V tomto případě křeslo přemístěte nadzvednutím nad podlahu a přesunutím. Bude zapotřebí alespoň dvou zdatných osob.
- Je nutná demontáž nožní opěrky, aby bylo možno křeslo uchopit za pevný rám křesla nebo za úchyty, které jsou umístěné na vnějších stranách v oblasti nožní opěrky (viz obrázek). Druhá osoba uchopí křeslo za zádovou opěrku, kde je k tomu určený uchop v oblasti zádového krytu.
- Ujistěte se že Vám při pokládání křesla nic nepřekáží na zemi. Křeslo opatrně a pomalu položte na vodorovnou zem.
- Křeslo by mělo být umístěno na rovném povrchu.

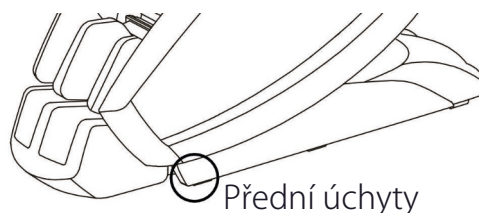


Jak manipulovat s křeslem pomocí koleček

- Pro manipulaci je potřeba alespoň dvou lidí.
- Vypněte křeslo hlavním vypínačem a vypojte napájecí kabel ze zásuvky a následně z křesla.
- Držením křesla viz. obr. nakloňte křeslo do polohy, aby se váha křesla přesunula na zadní


kolečka, ale zároveň dáváte pozor, aby nedošlo k převážení křesla a křeslo nespadlo na zadovou opěrku.

- Nyní můžete s křeslem manipulovat jednoduše pomocí transportních koleček.
- Po celou dobu manipulace s křeslem je potřeba držet křeslo z obou stran a udržovat rovnováhu.

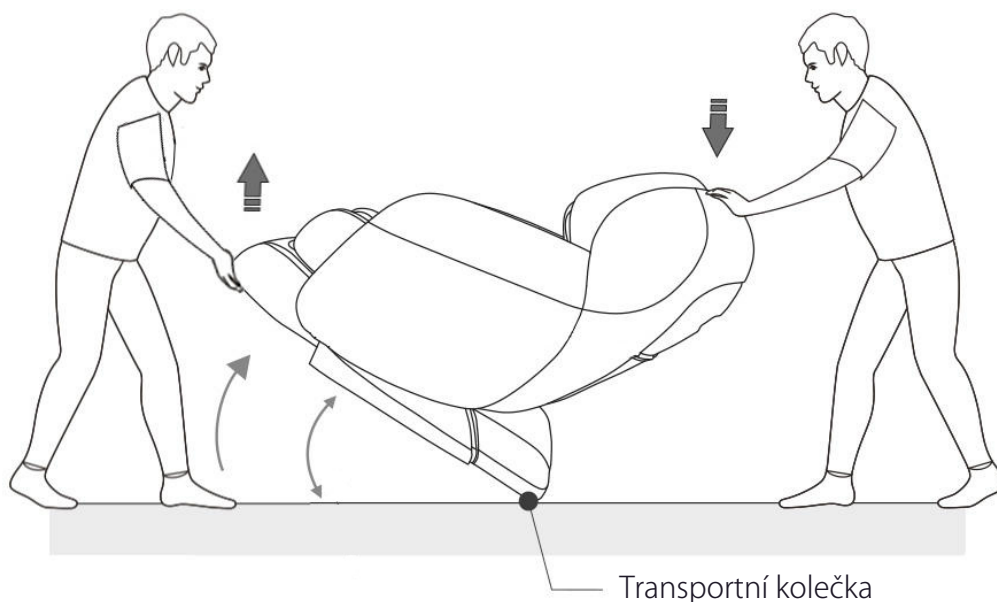

Umístění křesla a ochrana podlahy

- Protože je křeslo těžké a bude pravděpodobně dlouhou dobu stát na jednom místě, doporučujeme pod křeslo umístit nějakou podložku např. koberec, která by chránila podlahu před poškrábáním a otlačením.

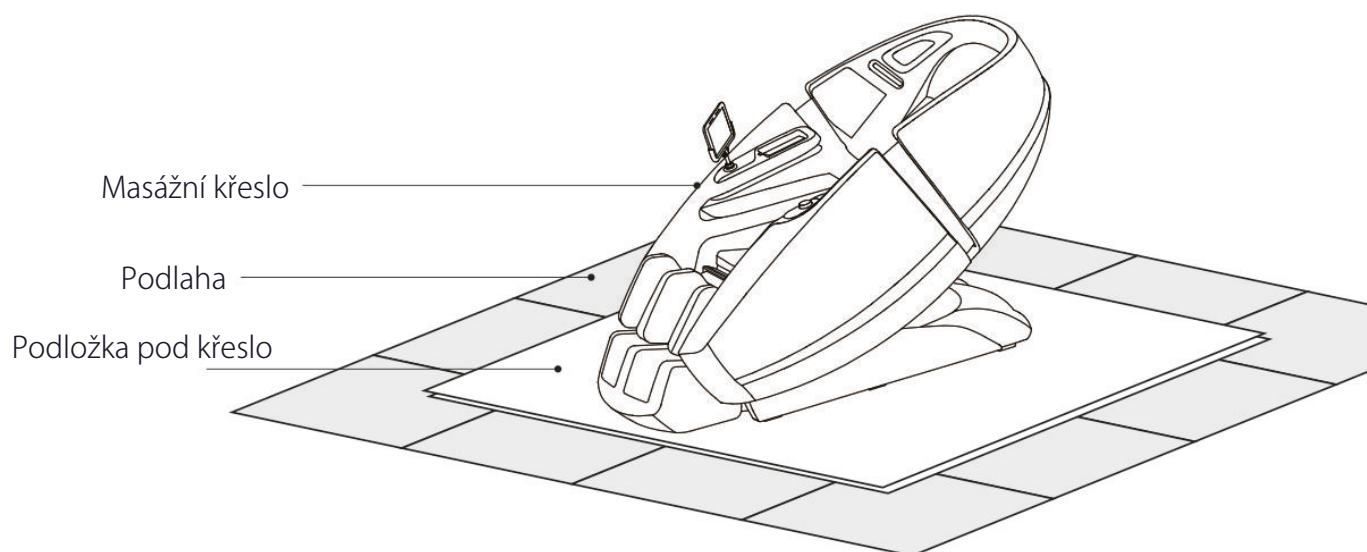


První usednutí do křesla

- Masážní křeslo má dva masážní mechanismy. **Spodní masážní mechanismus se nachází ve výchozí poloze v oblasti beder. Je potřeba při nasedání do křesla opatrně dosednout, aby nedošlo k poškození masážního mechanismu.**
- Masážní křeslo při spuštění masáže skenuje a detekuje Vaší postavu, pokud postavu nenalezne, automaticky nastaví výchozí polohu masážních hlavic jako nejvyšší možnou polohu pro výjezd masážních hlavic.
- **Správná pozice pro skenování vaší postavy je taková, při které ležíte opření zády i hlavou na zádové opěrce po celou dobu skenování.**
- Ovladač dá signál "pípání" po skončení skenování postavy. Vy si můžete dodatečně dle potřeb lehce nastavit polohu masážních hlavic pomocí šipek nahoru a dolů.
- Pokud křeslo neprovede dobře skenování postavy, tak výsledná masáž nemusí být příjemná.

Návrhy

Intenzitu masáže lze regulovat i sklonem zádové opěrky nebo množstvím polstrování pod zády a hlavou. Pokud chcete intenzivněji cítit masážní hlavice, tak odeberte polstrování.

Polštářek pod hlavou ve větší část tlumí masáž v krční oblasti. Pokud chcete tuto oblast pořádně rozmasírovat, doporučuje polštářek pod hlavou úplně odebrat. Nedoporučujeme polštářek odebírat při prvním použití masážního křesla nebo pokud je pro Vás masáž bolestivá a intenzivní.

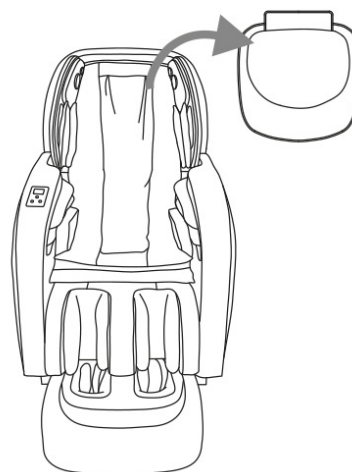

OVLÁDÁNÍ

INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ NA BOČNÍ OPĚRCE

Poloho Zero Gravity

Stiskem se křeslo napolohuje do polohy Zero Gravity a druhým stiskem se napolohuje zpět do základní polohy.

Vyhřívání

Stiskem se zapne vyhřívání a opětovným stiskem se vyhřívání vypne.

On/Off Intenzita masáže

Delším stiskem tlačítka (kolečka) se zapne křeslo a dlouhým podržením se zase vypne.

Krátkým stiskem se přepínají automatické programy.

Při otáčení se mění intenzita masáže během automatických programů.

Prodloužení nožní opěrky

Držením tlačítka se vysouvá nožní opěrka.

Polohování nožní opěrky směrem nahoru

Držením tlačítka se zvedá nožní opěrka.

Zkrácení nožní opěrky

Držením tlačítka se zasouvá nožní opěrka.

Pauza

Stiskem tlačítka se pozastaví masáž a opětovným stiskem se masáž opět pustí.

Polohování zádové opěrky směrem nahoru

Držením tlačítka se zvedá zádová opěrka.

Polohování zádové opěrky směrem dolů


Držením tlačítka se sklápí zádová opěrka.

Polohování nožní opěrky směrem dolů

Držením tlačítka se sklápí nožní opěrka.



DÁLKOVÝ OVLADAČ (S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU)

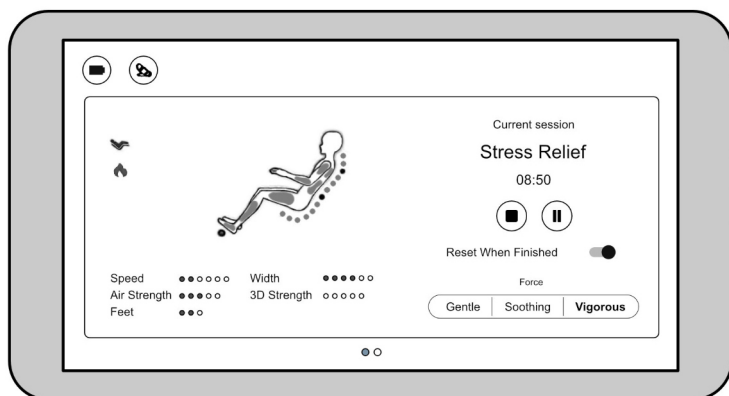

Tlačítko pro ovládání hlasitosti s označením + a -

Tlačítko On/Off

Na pravé straně ovladače se nacházejí dvě tlačítka

Zapnutí ovladače

Dlouhým přidržením tlačítka On/Off se zapne dálkový ovladač.

Nabíjení ovladače

Pokud se nedaří ovladač zapnout a nebo je slabá baterie, prosím nejdříve nabijte ovladač pomocí přibaleného USB kabelu nebo zasunutím ovladače do držáku.


Propojení pomocí USB kabelu - jeden konec kabelu se zapojí do ovladače a druhý do USB zdířky umístěné v pravé boční opěrce v oblasti rukou poblíž držáku na ovladač.

Reset ovladače

Pokud se ovládací systém zastaví a nereaguje, prosím podržte tlačítko On/Off na boku ovladače dokud nedojde k vypnutí ovladače. Ovladač nemá poměť, takže při každém vypnutí se vrátí do svého výchozího nastavení.

Vypnutí ovladače

Krátkým (3 vteřinovým) přidržením tlačítka On/Off se zobrazí na obrazovce volba Reboot (restartuje ovladač) a Power Off (vypne ovladač).

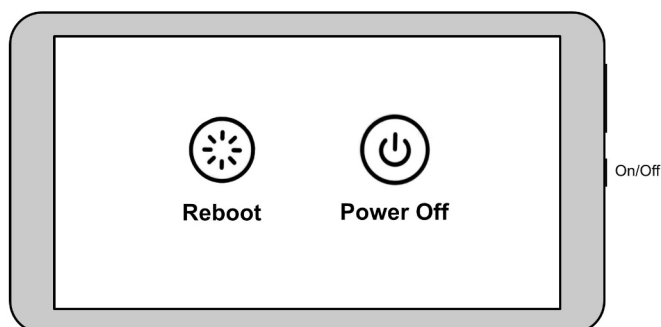

Upozornění

Po každém ukončení masáže prosím vypněte ovladač, aby se zbytečně nevybíjel a zasuňte zpět do držáku, kde se dobíjí. Ovladač nemá automatické vypínání.


Propojení ovladače s křeslem

Pokud není ovladač spárovaný s křeslem, tak se po zapnutí ovladače zobrazí obrazovka viz. obrázek níže. Kliknutím na tlačítko **„Pair Chair“** se přesunete do sekce pro vyhledávání zařízení.



Signalizuje propojení ovladače s křeslem


Pokud je na ikoně červené přeškrtnuté kolečko , tak není ovladač s křeslem spárovaný.

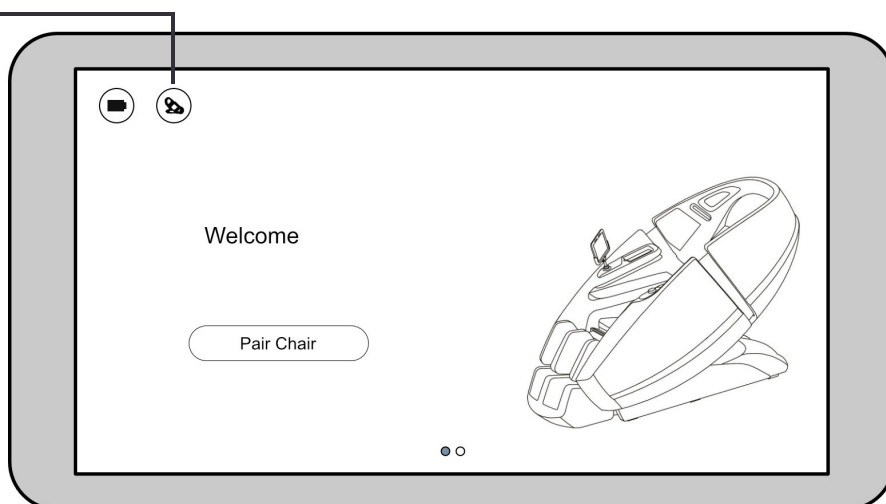

Pokud se nezobrazí na obrazovce křeslo, tak tlačítkem **„Refresh“** se znova začnou vyhledávat okolní zařízení. Jakmile se Vám na ovladači zobrazí masážní křeslo, tak tlačítkem **„Pair“** dojde ke spárování ovladače s křeslem. Po úspěšném spárování se změní nápis **„Pair“** na **„Connected“** a zmizí červené přeškrtnuté kolečko na ikoně s křeslem. Při dalším spuštění křesla se ovladač automaticky spáruje s křeslem.




Dalším způsobem jak se dostat do sekce „Connect Massage chair“ je přes hlavní menu. Do hlavního menu se dostanete z úvodní obrazovky přiložením prstu na obrazovku a tažením prstu z pravé strany obrazovky na levou stranu.

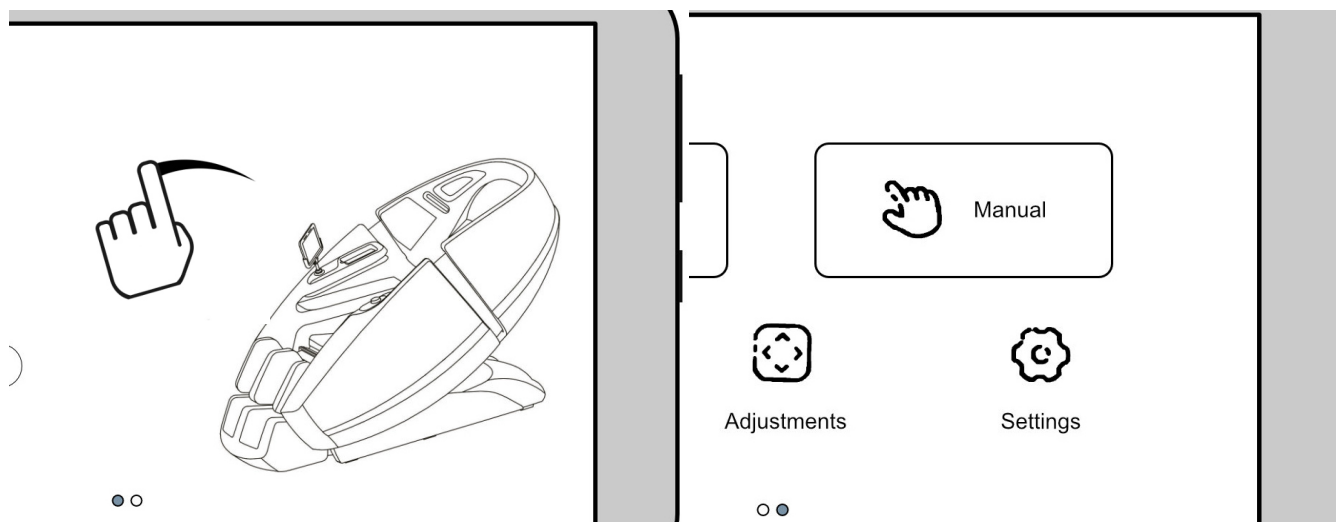


Dále pokračujete do sekce „**Settings**“ a zde vyberete první položku „**Connection**“.


Úvodní obrazovka

Pokud je ovladač spárovaný, tak se zobrazí úvodní obrazovka viz. obrázek níže. Zde si lze hned vybrat jeden ze tří automatických programů (stačí na ně kliknout a program se spustí) nebo lze přejít na druhou obrazovku (hlavní menu) tažením prstu z pravé strany obrazovky na levou stranu.

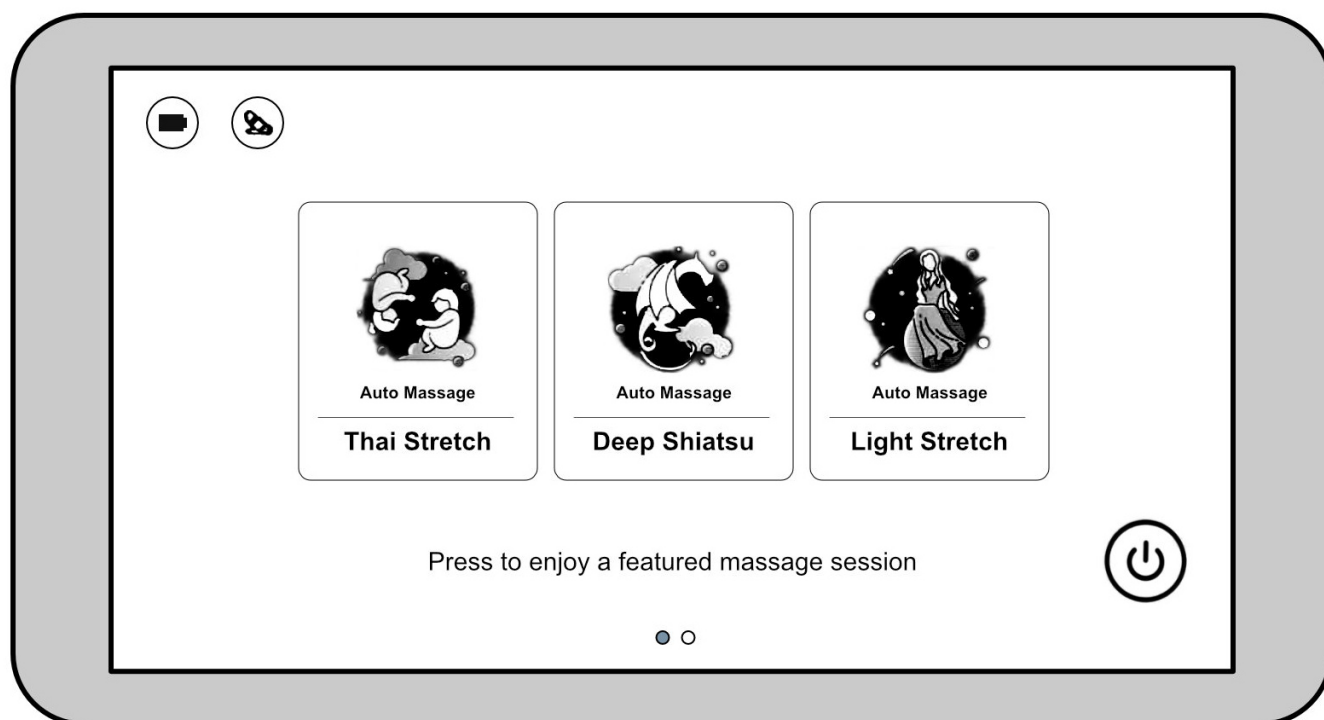

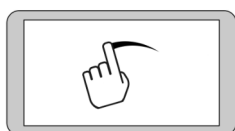

Tažením prstu na úvodní obrazovce se dostaneme do hlavního menu viz. obrázek níže.

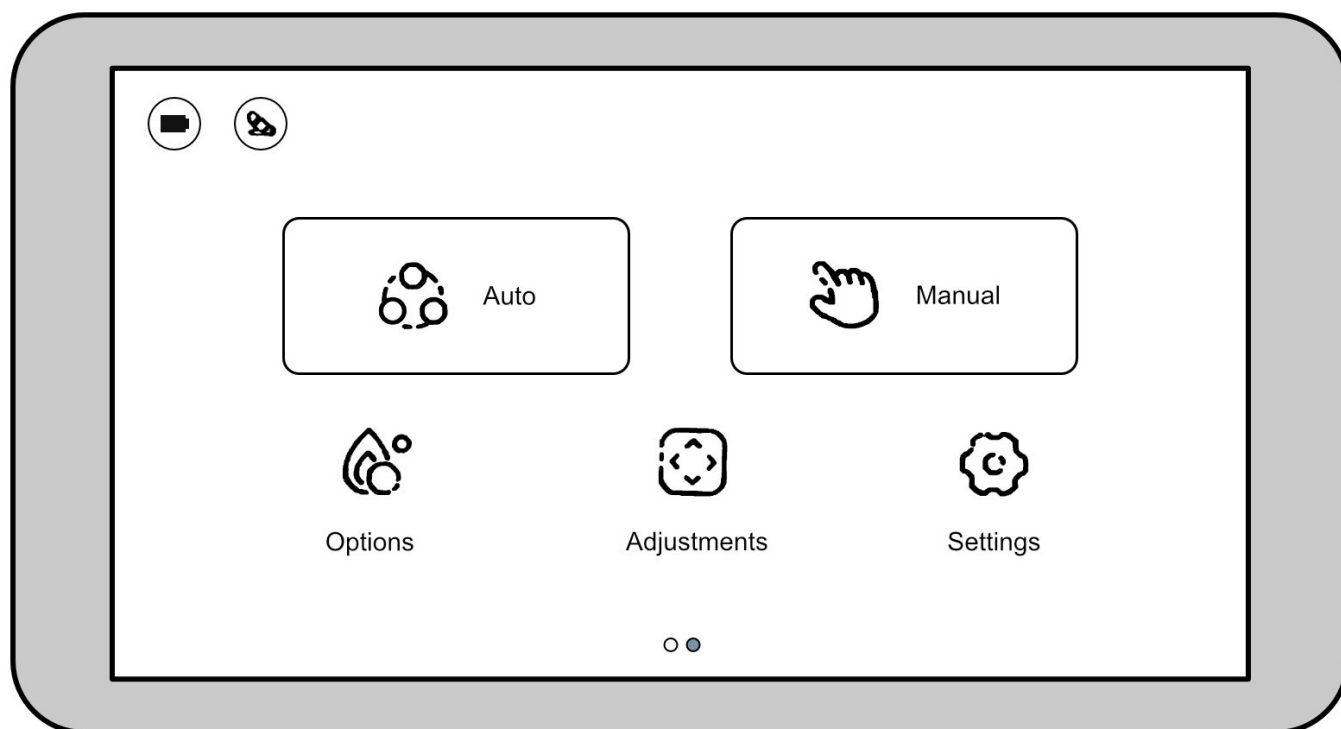

AUTO

Seznam automatických programů, celkem je na výběr 12 programů. Mezi seznam se opět pohybuje posouváním obrazovky pomocí tažením prstu.

MANUAL

Nastavení manuální masáže, lze si vybrat konkrétní masážní techniku, oblast masáže, šířku masážních hlavic, intenzitu masáže a rychlost masážních hlavic.

OPTIONS

Dodatečné nastavení u automatických programů nebo manuální masáže. Zde si lze nastavit oblast vzduchové masáže, síla vzduchové masáže, masážní válečky na chodidla, vyhřívání na záda a na nohy.

ADJUSTMENTS

Nastavení polohy křesla od zapnutí polohy Zero Gravity přes polohování celého křesla, zadové opěrky, opěrky pro kolena nebo nožní opěrky. Dále se zde nastaví doba masáže, výchozí čas masáže je 20 min.

SETTINGS

Zde si lze nastavit párování křesla, hlasitost zvukových signálů, světlost obrazovky, zvolit jazyk (vybrat lze pouze angličtinu nebo čínštinu) a dále zjistit aktuální verzi ovladačů.


AUTO - AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Stiskem tlačítka **"Auto"** se přepnete z menu do seznamu 12-ti automatických programů, které jsou zaměřené na různé části těla.



Tažením prstu po obrazovce listujete v seznamu automatických programů, celkem 3 stránky viz. obrázky níže.

Pro výběr programu stačí prstem kliknout na daný sloupeček (obrázek) a automatický program se spustí. Obrazovka se přepne a bude zobrazovat aktuální informace o probíhající masáži, kde uvidíte zbývající čas masáže, sílu masáže, kde se aktuálně nacházejí masážní hlavice a další... Zpět do menu se dostanete tažením prstu pravé strany obrazovky na levou stranu.

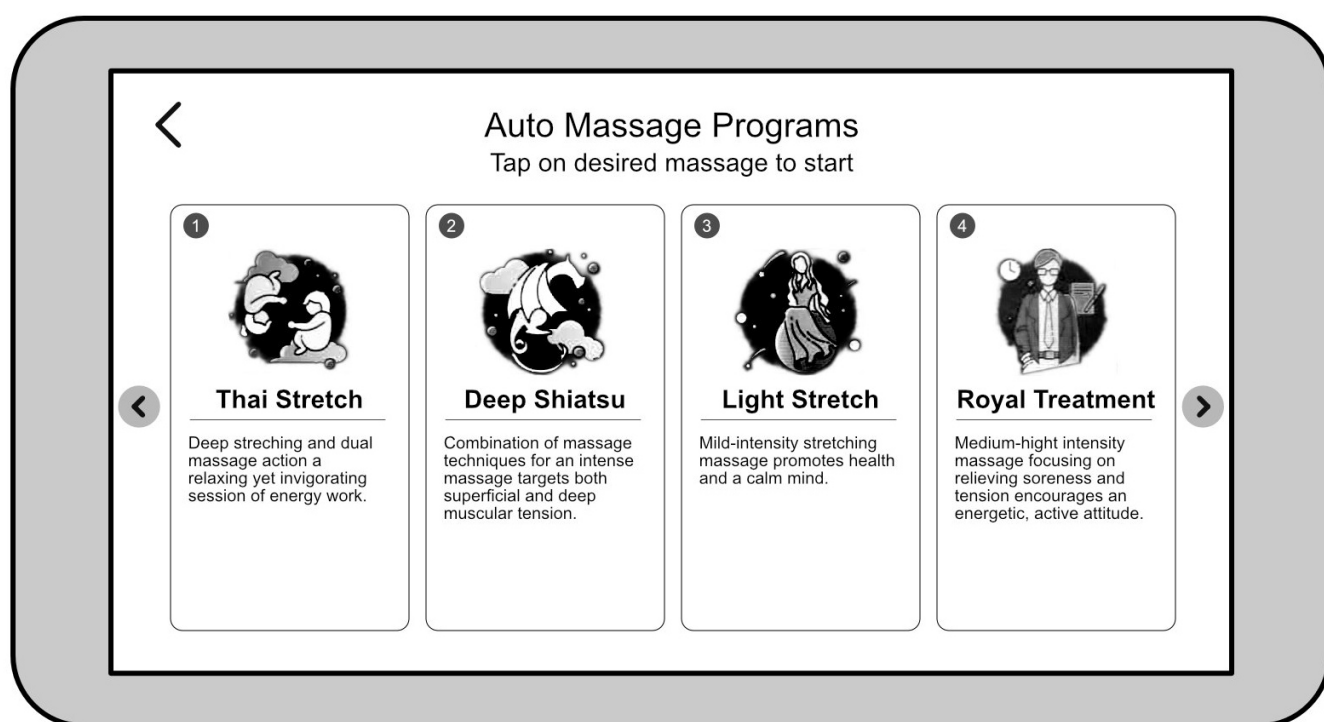

Thai stretch

Hluboké protahování pomocí dvou masážních mechanismů Vás zrelaxuje a nabije novou energií.

Deep Shiatsu


Kombinace masážních technik pro intenzivní masáž zaměřenou na povrchové a hluboké svalové napětí.

Light Stretch

Mírná protahovací masáž, která podporuje zdraví a klid.

Royal Treatment

Masáž střední až vysoké intenzity zaměřená na zmírnění bolesti a napětí, podporuje energický, aktivní přístup.

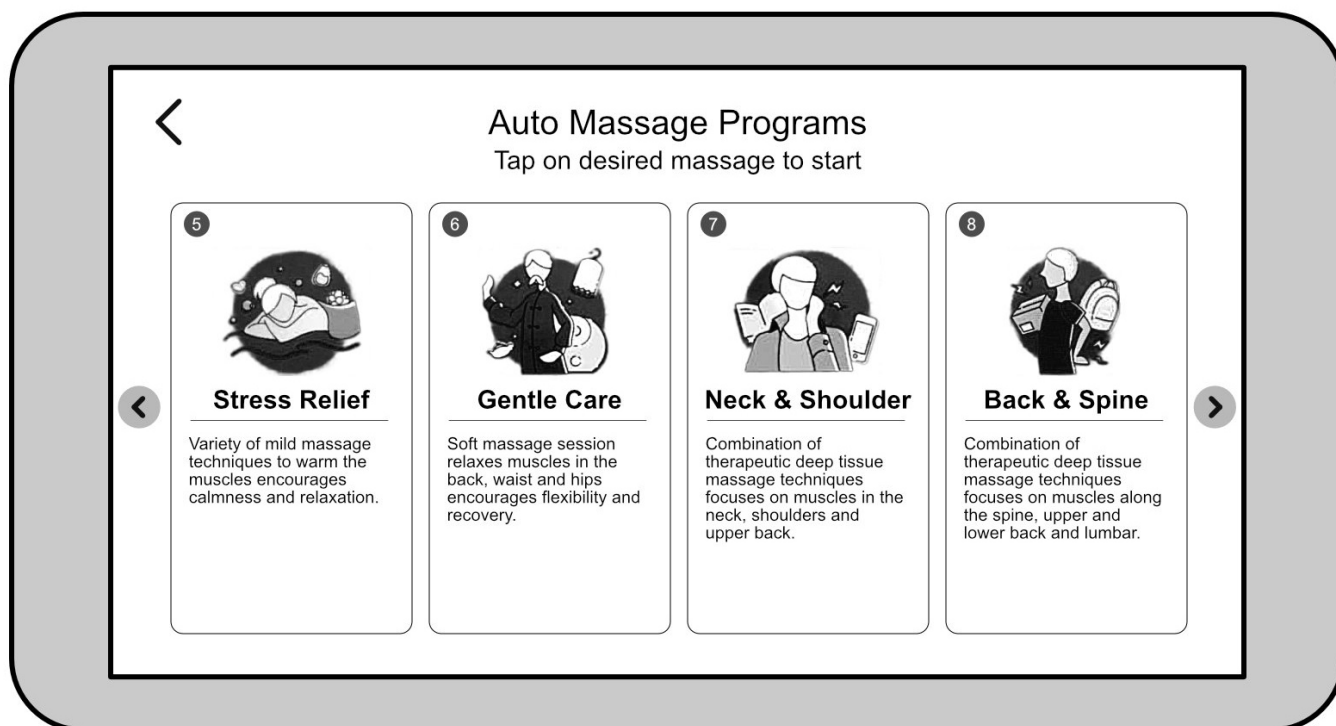

Stress Relief

Řada jemných masážních technik k zahřátí svalů, podporuje klid a relaxaci.

Gentle Care

Jemná masáž uvolňující svaly zad, pasu a boků a podporuje pružnost a zotavení.

Neck & Shoulder

Kombinace terapeutických technik hluboké tkáňové masáže se zaměřením na svaly na krku, ramenou a horní části zad.

Back & Spin

Kombinace terapeutických technik hluboké tkáňové masáže se zaměřením na svaly podél páteře, horní a dolní části zad a bederní oblasti.

Waist & Hip

Kombinace terapeutických technik hluboké tkáňové masáže se zaměřením na svaly na bedrech, pase, stehnech a kolem kyčelních kloubů.

Morning Buzz


Stimulační masáž pro obnovu energie a pro podporu soustředění.

Refreshing Nap

Uklidňující masáž celého těla pro zmírnění napětí a osvěžení těla.


Sweet Dreams

Masáž celého těla, která je jemná a uklidňující. Vhodná volba před spánkem.

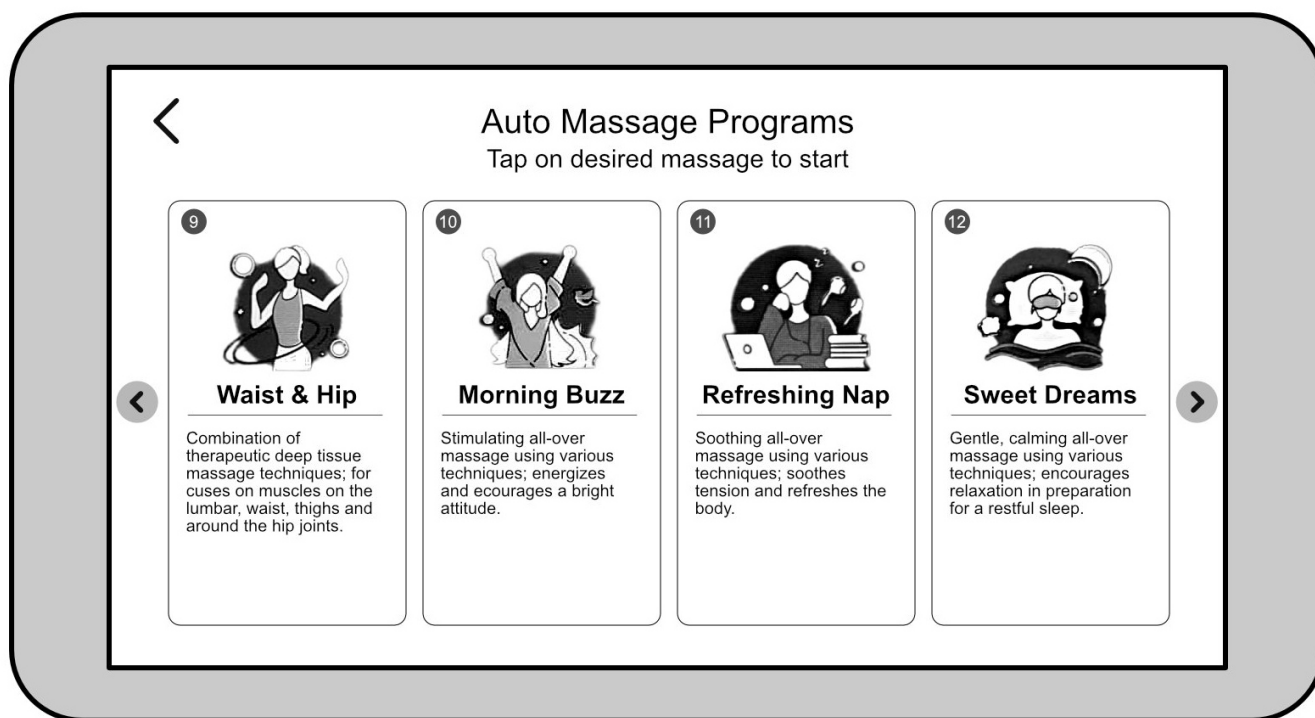

MANUAL - MANUÁLNÍ NASTAVENÍ MASÁŽE

V tomto nastavení si vyberete konkrétní masážní techniku a volíte její konkrétní nastavení.

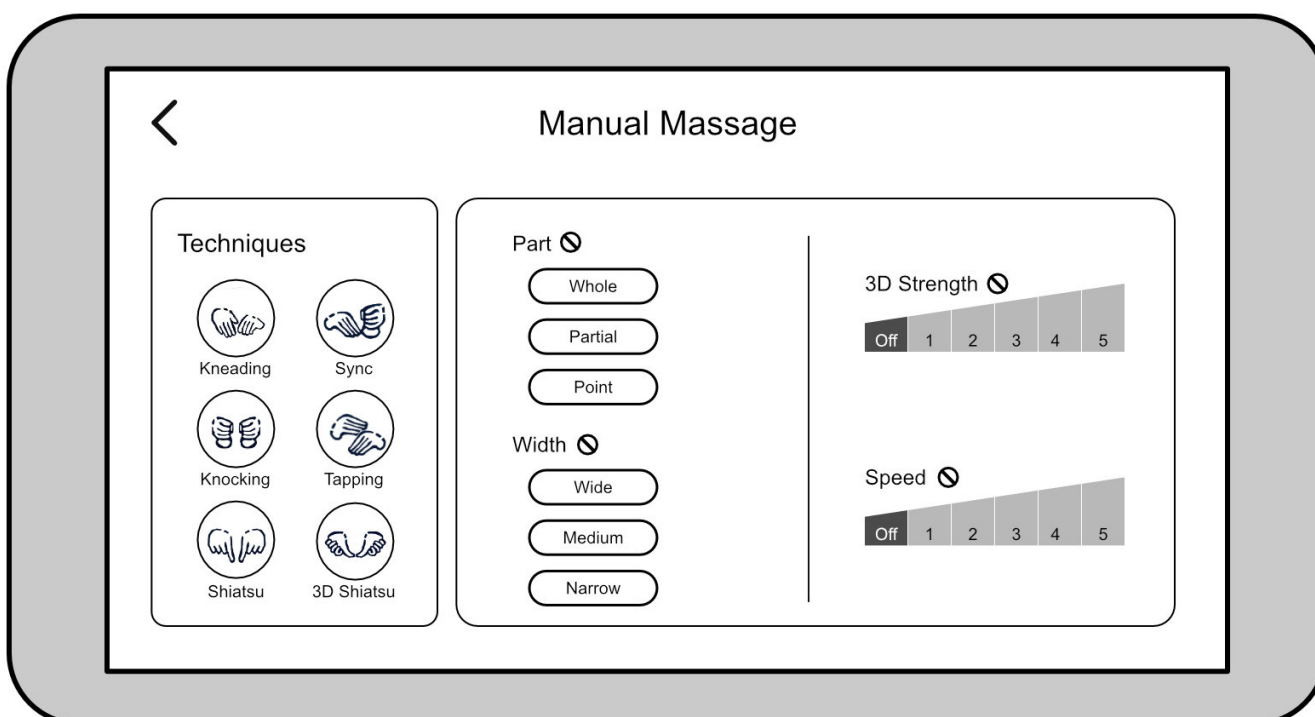

3D Strength (síla) - síla jakou budou masážní hlavice masírovat záda, lze si nastavit v pěti stupních, kdy 5 znamená nejsilnější masáž.

Speed (rychlost) - rychlost jakou se budou masážní hlavice pohybovat, lze si nastavit v pěti stupních, kdy 5 znamená nejvyšší rychlost.

Techniques (masážní techniky) - zde si volíte jednu z 6 masážních technik.


- Sync (synchronizace) - znamená synchronizovaná masáž v rytmu aktuálně přehrávané hudby.
- Kneading (hnětení)
- Knocking (klepaní)
- Tapping (pleskání)
- Shiatsu (tlaková masáž)
- 3D Shiatsu (intenzivní tlaková masážní technika)

Každá masážní technika má různé možnosti nastavení a ne u každé lze nastavit oblast, rychlost, šířku a sílu. Po výběru masážní techniky se u každé možnosti nastavení buď zobrazí a nebo nezobrazí přeškrtnuté kolečko  signalizující, že pro danou masážní techniku tuto volbu nelze nastavit.

Part - oblast masáže, nabízí 3 možnosti nastavení

- **Whole (celé záda)** - masáž bude probíhat přes celá záda.
- **Partial (oblastní)** - masáž bude probíhat pouze v určité oblasti. Zvolíte si bod a masážní hlavice se budou pohybovat (nahoru a dolů) kolem zvoleného bodu.
- **Point (bodová)** - masáž bude probíhat pouze v jednom bodě.

Pokud se zvolí oblastní masáž (**Partial**) nebo bodová (**Point**), zobrazí se dodatečná možnost nastavení „**Adjust**“, která umožní polohování vrchního masážního mechanismu pro masáž zad. Držením šipky nahoru budou masážní hlavice vyjíždět nahoru ke krku a držením šipky dolů pojedou hlavice směrem k bederní oblasti. Tímto si nastavíte přesně místo, kde chcete aby Vás masážní hlavice masírovaly.

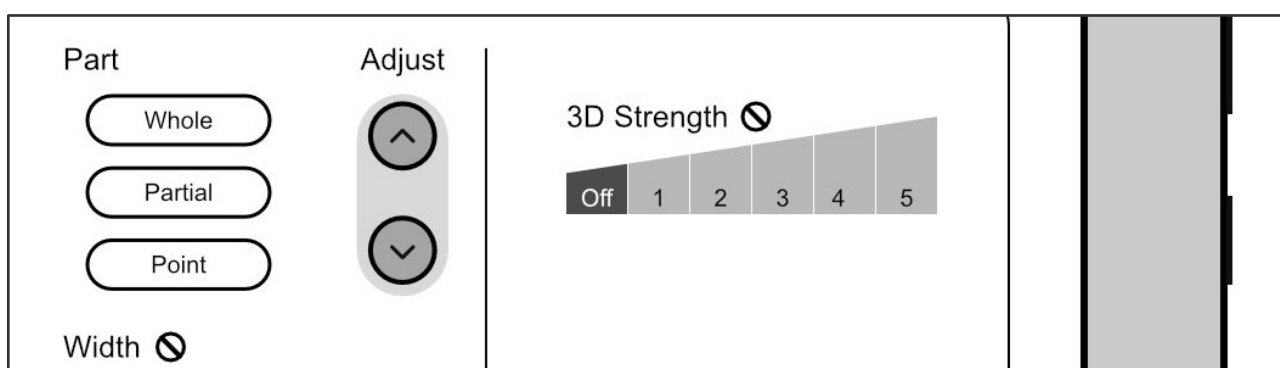


Width (šířka) - šířka masážních hlavic znamená, jak daleko se nacházejí od sebe

- **Wide (široká vzdálenost)** - masážní hlavice budou masírovat vnější stranu zad
- **Medium (střední vzdálenost)** - masážní hlavice budou jezdit na středu zad
- **Narrow (nejmenší vzdálenost)** - masážní hlavice budou jezdit u sebe a tak budou masírovat záda kolem páteře

OPTIONS - DODATEČNÉ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO NEBO MANUÁLNÍHO PROGRAMU

V tomto nastavení si nastavíte vzduchovou masáž, vyhřívání a masážní válečky na chodidla.

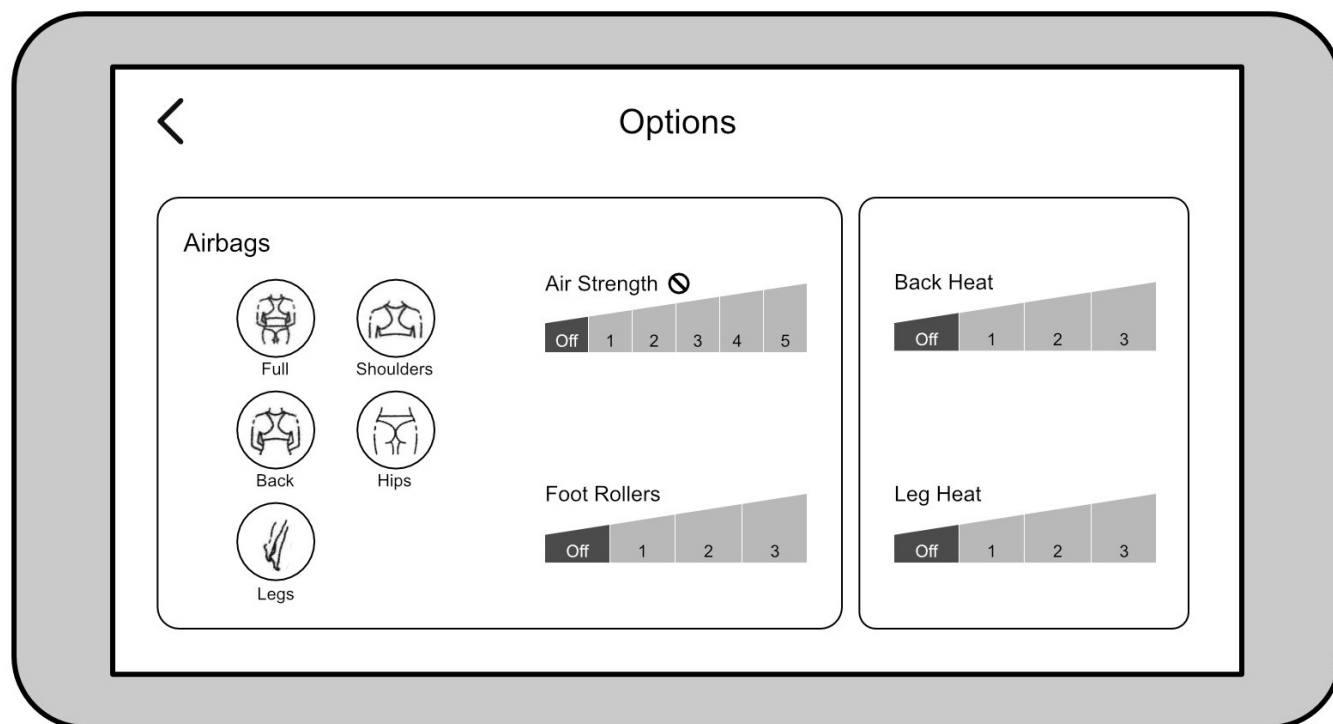

Airbags (vzduchová masáž) - na výběr máte 5 oblastí pro které chcete mít zapnutou vzduchovou masáž.

- **Full (celé tělo)** - vzduchová masáž bude aktivní ve všech oblastech.
- **Shoulders (ramena)** - vzduchová masáž bude aktivní pouze v oblasti ramen.
- **Back (záda)** - vzduchová masáž bude aktivní pouze v oblasti zad.
- **Hips (boky)** - vzduchová masáž bude aktivní pouze v oblasti sedacích partií.
- **Legs (nohy)** - vzduchová masáž bude aktivní pouze v oblasti nohou.

Air Strength (síla) - síla jakou se budou vzduchové airbasy nafukovat, lze si nastavit v pěti stupních, kdy 5 znamená největší sílu.


Foot Rollers (masáž chodidel) - zapnutí a vypnutí rotujících válečků na chodidla. Pokud jsou válečky zapnuté, je zvolený stupeň 1 až 3, tak 3 znamená nejrychlejší pohyb rotujících válečků a 1 nejpomalejší pohyb válečků.

Back Heat (vyhřívání zad) - zapnutí a vypnutí vyhřívání v oblasti zad. Pokud je vyhřívání zapnuté, je zvolený stupeň 1 až 3, tak 3 znamená nejvyšší stupeň vyhřívání.

Leg Heat (vyhřívání nohou) - zapnutí a vypnutí vyhřívání v oblasti nohou. Pokud je vyhřívání zapnuté, je zvolený stupeň 1 až 3, tak 3 znamená nejvyšší stupeň vyhřívání.

ADJUSTMENTS

Nastavení polohy křesla od zapnutí polohy Zero Gravity přes polohování celého křesla, zádové opěrky, opěrky pro kolena nebo nožní opěrky. Zde se nastaví i doba masáže, výchozí čas masáže je nastaven vždy na 20 min.

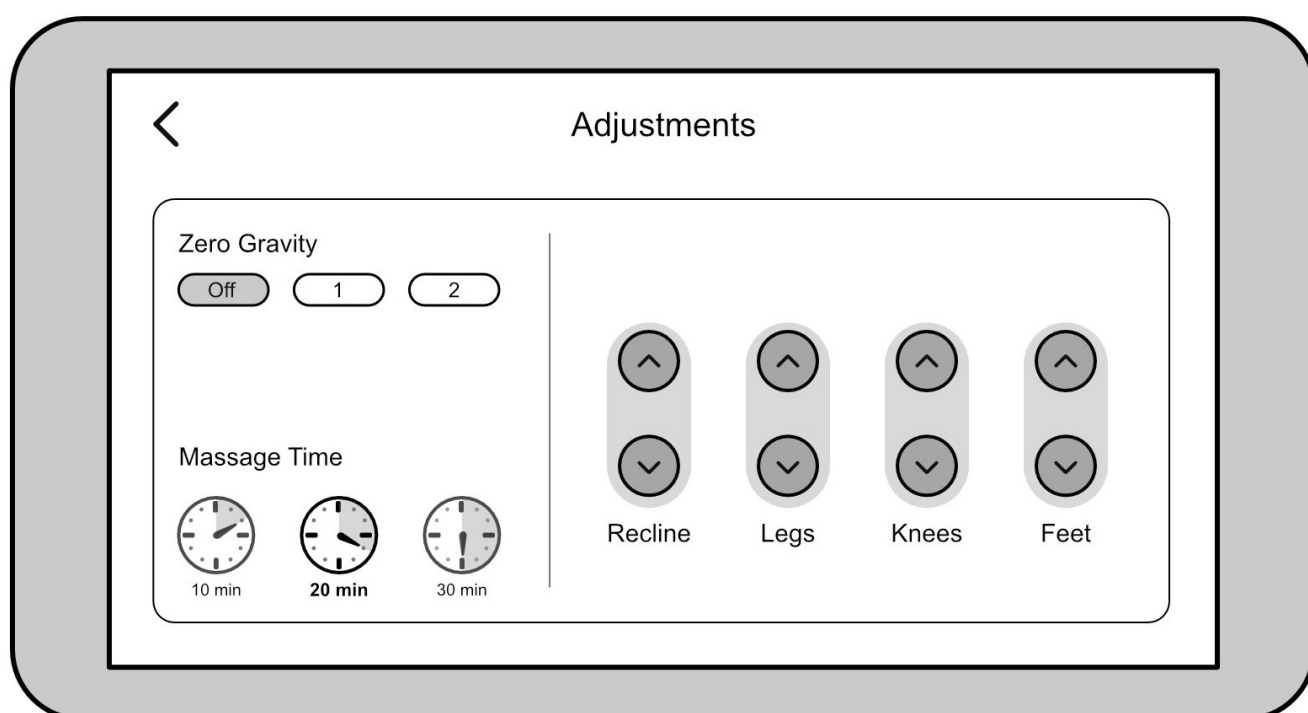

Zero Gravity - jedná se o speciální polohu určenou pro maximální uvolnění těla. Poloha Zero Gravity nabízí dva stupně 1 a 2.

Massage Time - doba trvání masáže, přednastavená doba je vždy 20min a lze si čas zkrátit na 10min nebo naopak prodloužit na 30min.

UPOZORNĚNÍ

Křeslo nabízí masáž celého těla a proto je doporučený maximální čas strávený v křesle omezen na 30min. Po této době je potřeba nechat tělo odpočinout.

Ze začátku doporučujeme se masírovat pouze 20min v jeden den a druhý den si odpočinout. Až si tělo na masáž zvykne postupně můžete intenzitu masáže zvyšovat.

Recline - slouží pro polohování celého křesla. Šipkou nahoru se polohuje křeslo do základní polohy a šipkou dolů se polohuje křeslo do polohy v leže.

Legs - slouží pro polohování nožní opěrky. Šipkou nahoru se polohuje nožní opěrka směrem nahoru a šipkou dolů se polohuje nožní opěrka do základní polohy.


Při každé změně nožní opěrky dochází k automatickému prodloužení nožní opěrky a následnému zkrácení než senzory zjistí délku nohou, tehdy se nožní opěrka zastaví.

Knees - slouží pro polohování opěrky v oblasti kolen. Pro rozdílné délky nohou se dokáže opěrka v oblasti kolen nastavit a tak přizpůsobit dle vlastních potřeb.


Feet - slouží k prodloužení nebo zkrácení nožní opěrky. Šipkou nahoru se nožní opěrka prodlužuje a šipkou dolů se nožní opěrka zkracuje.

SETTINGS

Nastavení propojení ovladače s křeslem a další dodatečné nastavení.

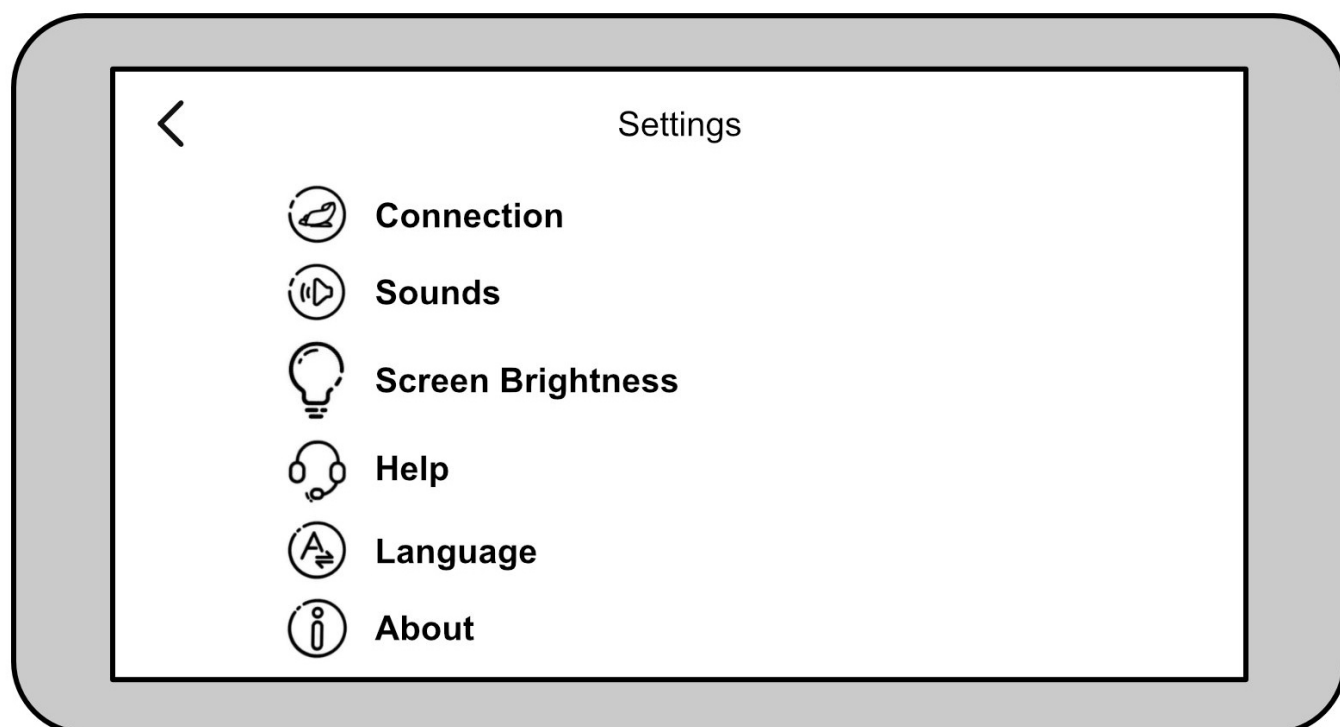


Connection - slouží pro párování ovladače s křeslem. Zde lze vyhledat pomocí tlačítka „**Refresh**“ nejbližší Bluetooth zařízení v okolí, jako je masážní křeslo a následně toto zařízení s ovladačem spárovat.

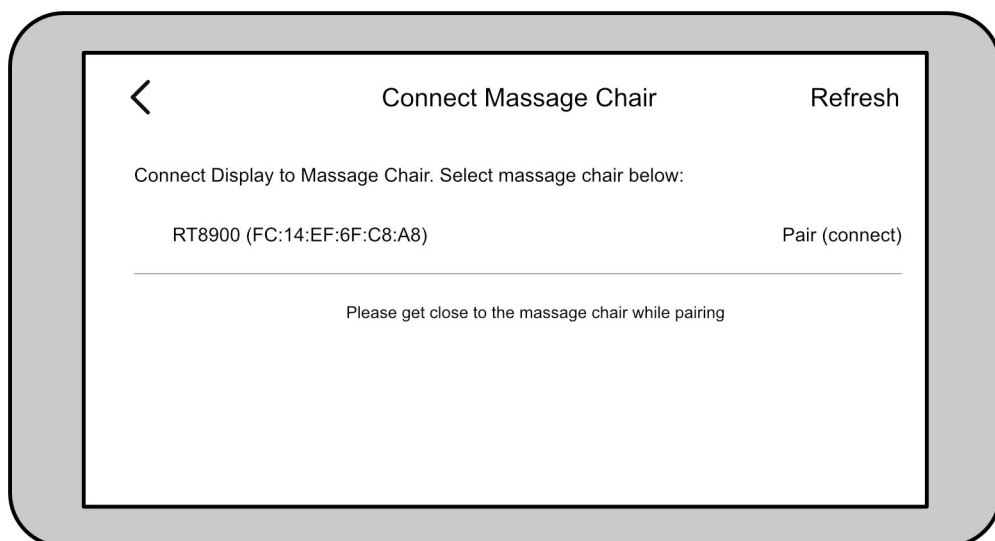


Pokud se nedaří vyhledat masážní křeslo, pokuste se mít ovladač co nejbližší u křesla a znovu zkuste vyhledávat zařízení pomocí tlačítka „**Refresh**“. Jakmile Vám ovladač najde masážní křeslo, tak se u názvu na konci řádku zobrazí nápis „**Pair**“. Když na něj kliknete, křeslo se s ovladačem spáruje a po úspěšném spárování se místo nápisu „Pair“ zobrazí „**Connected**“, který indikuje propojení ovladače s křeslem.

Sounds - slouží pro ovládání hlasitosti zvukových signálů. Doporučujeme nastavit „**Chair**“ a zvuk úplně ztlumit.

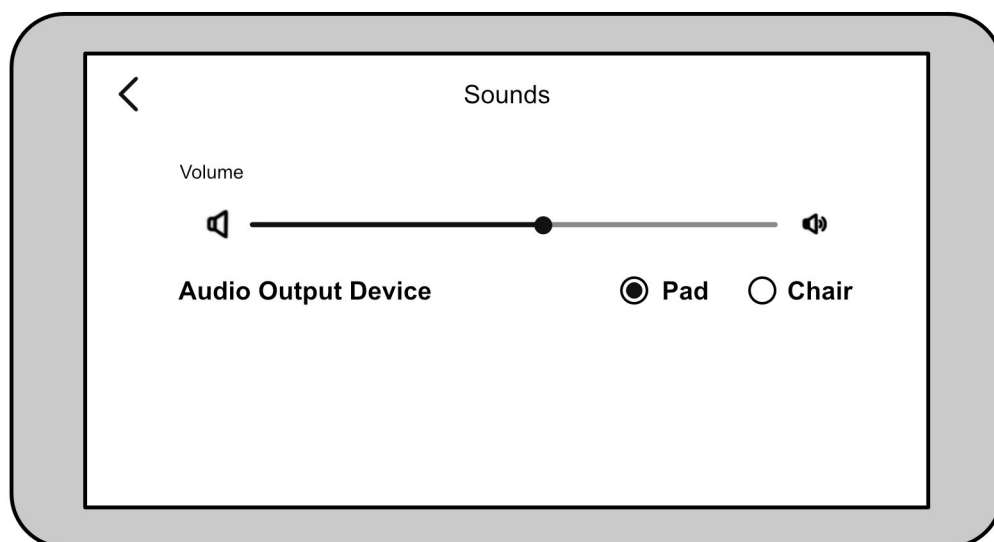

Screen Brightness - slouží pro nastavení světlosti displeje a automatického ztmavení obrazovky „**Screen Timeout**“ za určitý časový úsek.

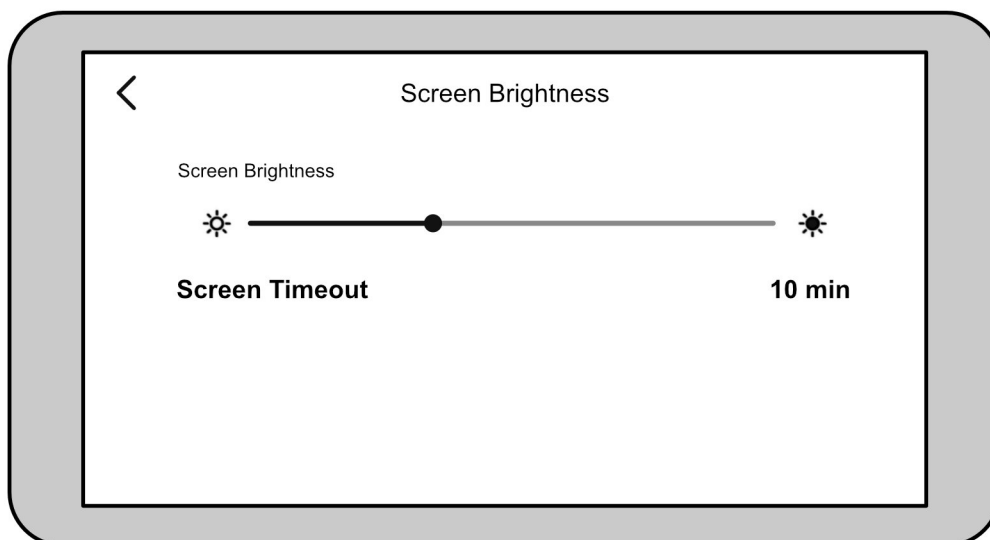



Language - slouží pro nastavení jazyka, zde lze vybrat pouze angličtinu nebo čínštinu.

About - informace o verzi ovladače.

OBRAZOVKA BĚHEM MASÁŽE

Jakmile se spustí automatický program, tak se zobrazí následující obrazovka s kompletním přehledem aktivních prvků masážního křesla. Na další stránce bude detailní popis této obrazovky.

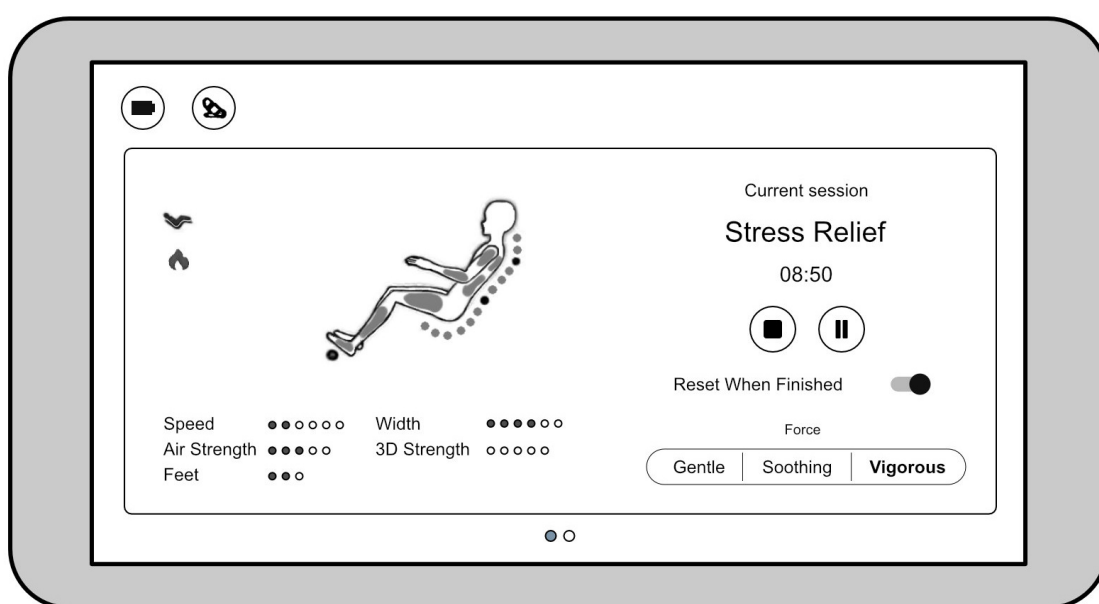

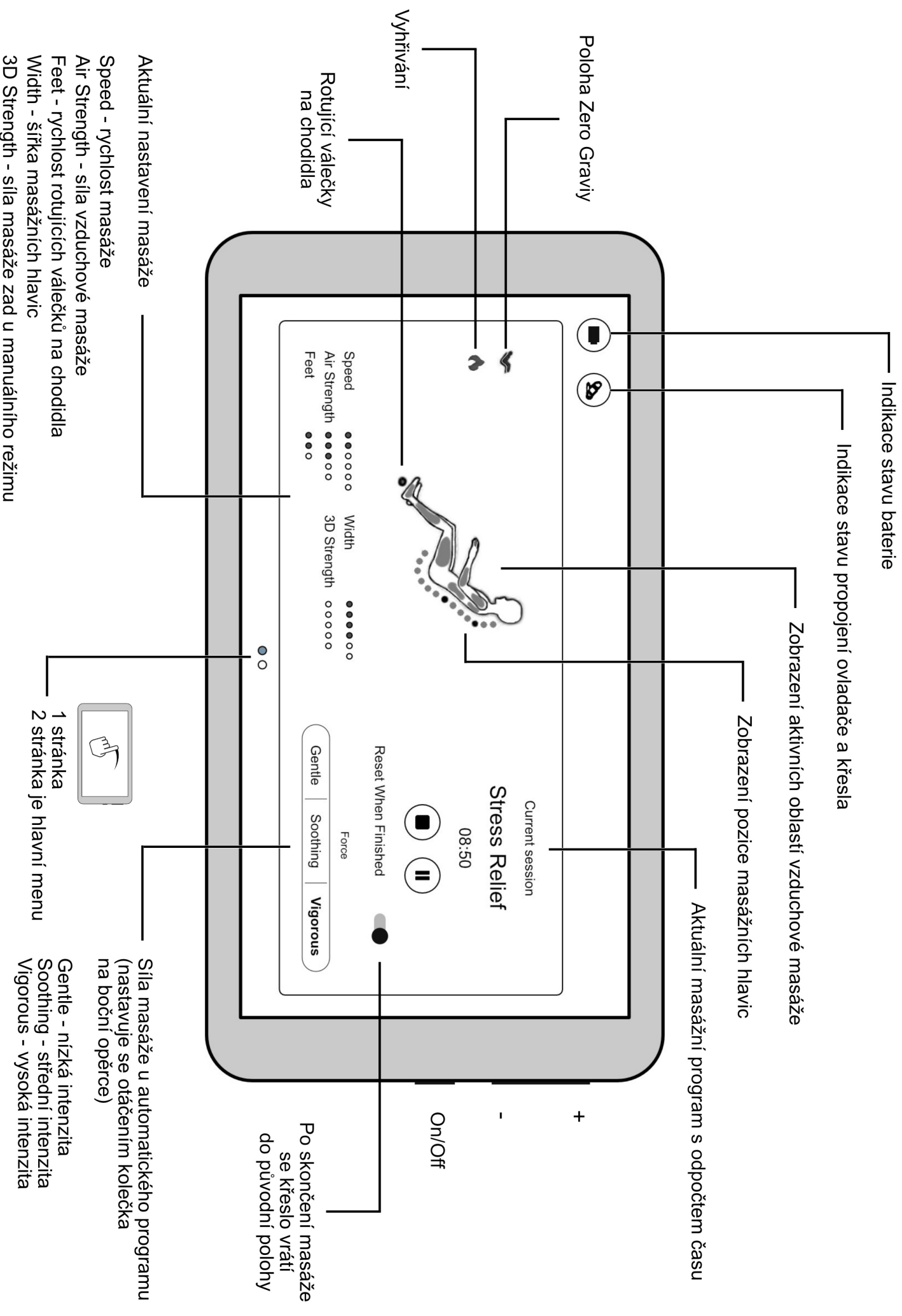

SPUŠTĚNÍ MASÁŽE

ZAPNUTÍ KŘESLA



Ujistěte se že je poloha vypínače v pozici „0“ (OFF).


- 1) Zapojte napájecí kabel do zástrčky v křesle.
- 2) Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
- 3) Zapněte křeslo pomocí hlavního vypínače do polohy „I“ (ON).

SPUŠTĚNÍ MASÁŽE


1. Křeslo lze spustit pomocí dálkového ovladače nebo integrovaného ovládání. Více informací naleznete v předcházející kapitole „Ovládání“.
2. Při spuštění pomocí integrovaného ovladače je zapotřebí delšího podržení tlačítka On/Off.
3. Při spuštění pomocí dálkového ovladače, zapněte ovladač delším podržením tlačítka On/Off. Po načtení se zobrazí obrazovka s výběrem 3 automatických programů nebo si můžete v sekci „**Auto**“ vybrat jeden z 12 automatických programů.
4. Po spuštění automatického programu proběhne skenování postavy a následně se spustí vybraný automatický program.
5. V průběhu masáže lze mezi automatickými programy a manuálním režimem libovolně přepínat.

SKENOVÁNÍ POSTAVY

Po zapnutí křesla do pohotovostního režimu a při prvním spuštění automatického programu proběhne skenování pro změření Vaší postavy.

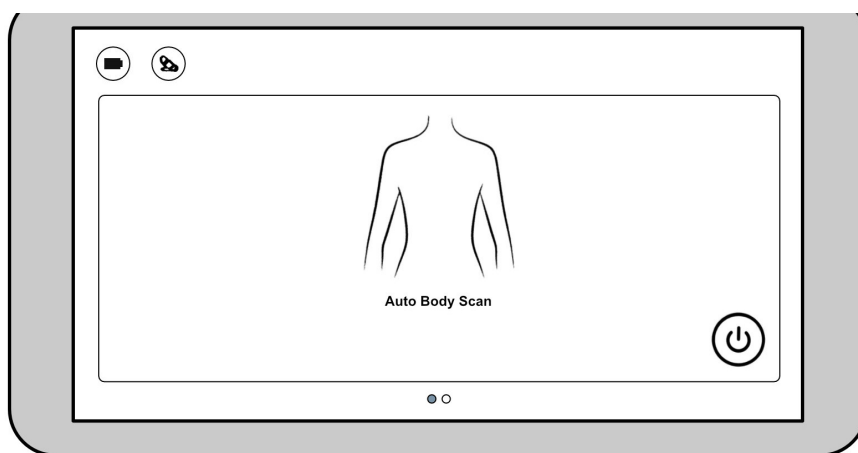

Jakmile je skenování dokončeno, je po krátkou dobu ještě možné dodatečně nastavit maximální výjezd masážních hlavic. To se nastaví na obrazovce, kde je zobrazena postava s nápisem „Auto Body Scan“ a pomocí šipek lze nastavit maximální výjezd masážních hlavic. Pokud nic nezměníte, tak se automaticky spustí odpočet a po skončení odpočtu se spustí masáž.

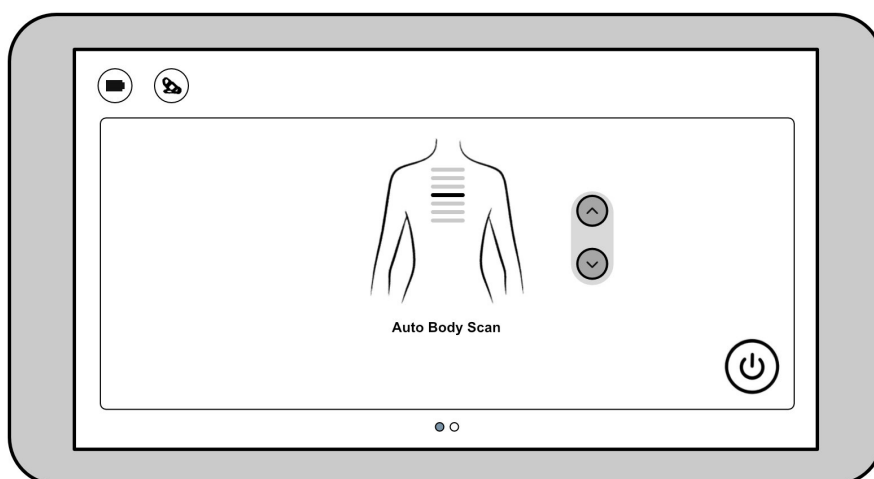

Křeslo se automaticky spustí po dokončení skenování. Výchozí čas masáže je 20min a po uplynutí této doby se automaticky křeslo vrátí do výchozí polohy a vypne.

Během skenování postavy sedněte vždy v křesle opření hlavou o polštářek, aby řádně proběhlo skenování a nedošlo tak ke zkreslení.

VAROVÁNÍ

Dávejte pozor, aby během polohování zádové a nožní opěrky křesla nedošlo k nárazu do zdi, předmětů, lidí či domácích mazlíčků.


Vystupujte z křesla vždy, až když se křeslo vrátí do původní polohy, nožní operka bude v kontaktu se zemí a masážní hlavice se přestanou pohybovat.

Během polohování nožní opěrky nijak nožní opěrku nezatěžujte, například snahou z křesla vystoupit či opřením se o ni.

Prosíme o pečlivé prostudování návodu.

VYPNUTÍ KŘESLA

1. Křeslo se vypne automaticky po skončení masáže nebo ho můžete předčasně vypnout pomocí tlačítka „On/Off“ na dálkovém ovladači nebo integrovaném ovládání (delším podržením tlačítka). Po skončení masáže se křeslo vrátí do své výchozí polohy, která je učená pro nasedání a vysedání z křesla. Během vypínání se zobrazí obrazovka Reseting... po celou dobu, kdy se křeslo vrací do své výchozí polohy. Jakmile tato obrazovka zmizí lze z křesla vystoupit.
2. Pokud neplánujete delší dobu křeslo používat vypněte i dálkový ovladač.
3. Přepněte hlavní vypínač na zadní straně křesle do polohy „0“ (OFF).
4. Vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

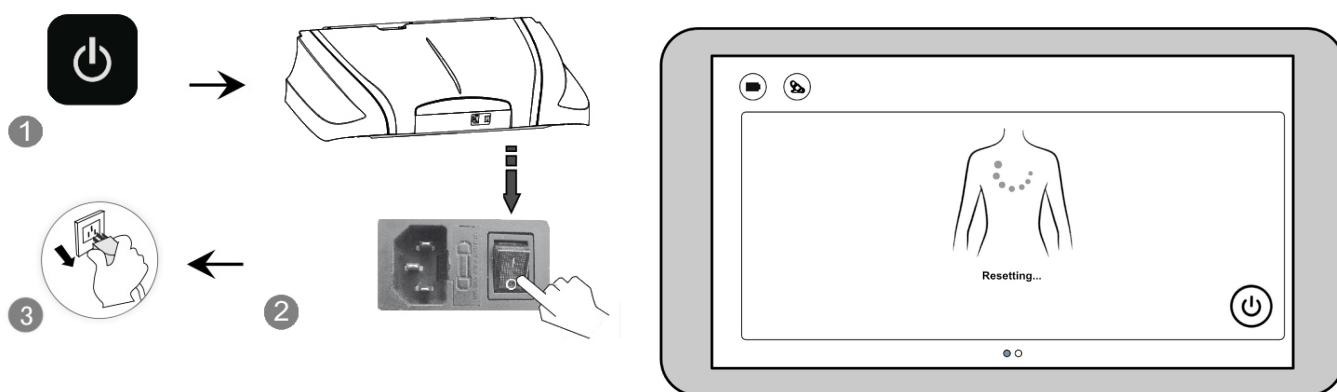

VYSTUPOVÁNÍ A NASTUPOVÁNÍ

Pro vystupování a nastupování musí být křeslo ve své výchozí poloze a až pak je možné z křesla vystoupit nebo do něj nastoupit aniž by došlo k jakémukoliv poškození.

Po skončení masáže nebo když křeslo vypnete vypínačem On/Off, vždy počkejte až se křeslo vrátí do své výchozí polohy a přestanou jezdit masážní hlavice, až potom z křesla vystupte.



Jakmile se křeslo vrátí do původní polohy, lze z křesla vystoupit. Při vystupování se opírejte oběma rukama o boky křesla, vystupujte pomalu a nohy po jedné vyndejte z nožní opěrky na podlahu.



✓ Správně





✗ Špatně

FUNKCE MASÁŽNÍHO KŘESLA

Polohování nohou směrem nahoru

Stiskem a držením tlačítka se polohují nohy směrem nahoru. Jakmile tlačítko pustíte, polohování se zastaví.

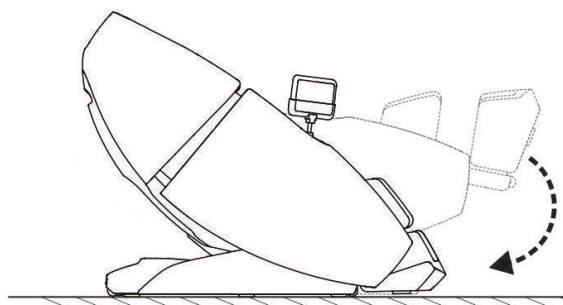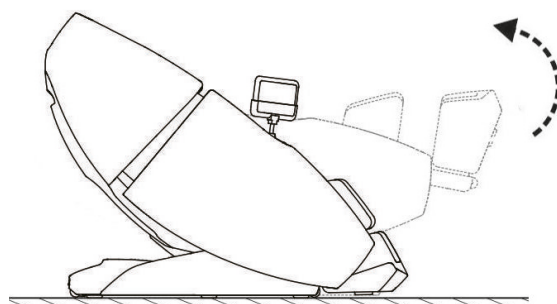


Polohování nohou směrem dolů

Stiskem a držením tlačítka se polohují nohy směrem dolů. Jakmile tlačítko pustíte, polohování se zastaví.


Polohování zad směrem dolů a nohou směrem nahoru

Stiskem a držením tlačítka se polohují zároveň nohy směrem nahoru a záda směrem dolů. Jakmile tlačítko pustíte, polohování se zastaví.

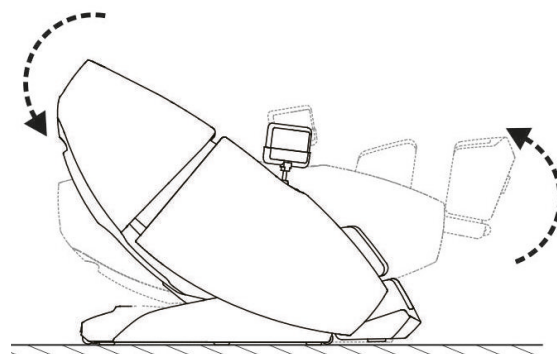

Polohování zad směrem nahoru a nohou směrem dolů

Stiskem a držením tlačítka se polohují nohy směrem nahoru. Jakmile tlačítko pustíte, polohování se zastaví.

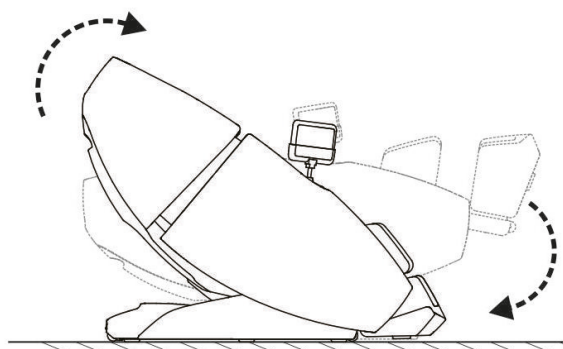


Nožní opěrka

Nožní opěrka se automaticky přizpůsobí delším osobám. Při změně polohy nožní opěrky se automaticky vysune na maximální vzdálenost a následně se začne vracet zpět. V nožní opěrce jsou senzory, které ji zastaví jakmile dosáhne Vašich nohou.


Vysunutí nožní opěrky

Stiskem a držením tlačítka se vysunuje nožní opěrka. Jakmile tlačítko pustíte, polohování se zastaví.

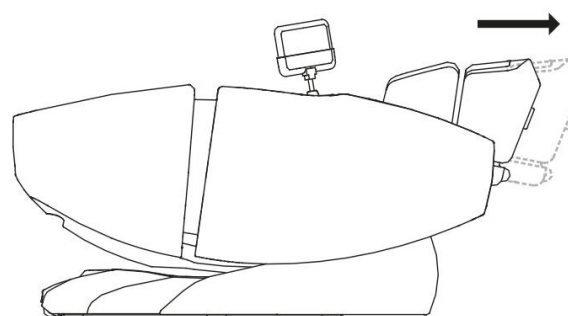

Zasunutí nožní opěrky

Stiskem a držením tlačítka se zasunuje nožní opěrka. Jakmile tlačítko pustíte, polohování se zastaví.

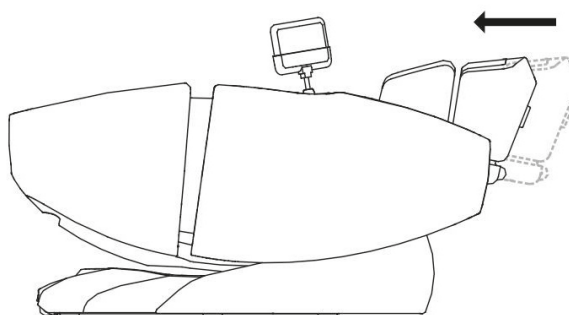


Poloha Zero Gravity

Prvním (1) stiskem tlačítka se křeslo automaticky napolohuje do polohy zvané Zero Gravity úroveň 1. Dalším (2) stiskem se křeslo napolohuje do úrovně číslo 2. Třetím (3) stiskem se napolohuje do výchozí polohy. Kdykoliv si lze upravit polohu dle svých potřeb.

Poznámka: Jedná se o polohu, kdy je váha těla rozložena nejrovnoměrněji a nejméně zatěžujete páteř. Principem je rozložit váhu těla spíše na povrch zad a na zadové svaly, než na samotnou páteř. Není-li páteř nikde zatížena příliš, má nejlepší podmínky k odpočinku, regeneraci a revitalizaci.

Zvýšení nohou nad úroveň srdce pomáhá odtoku žilní krve z této části těla (jinak ji musí srdce a svaly na nohou pumpovat proti zemské přitažlivosti), čímž ulevuje od otoků a pocitu těžkých nohou.

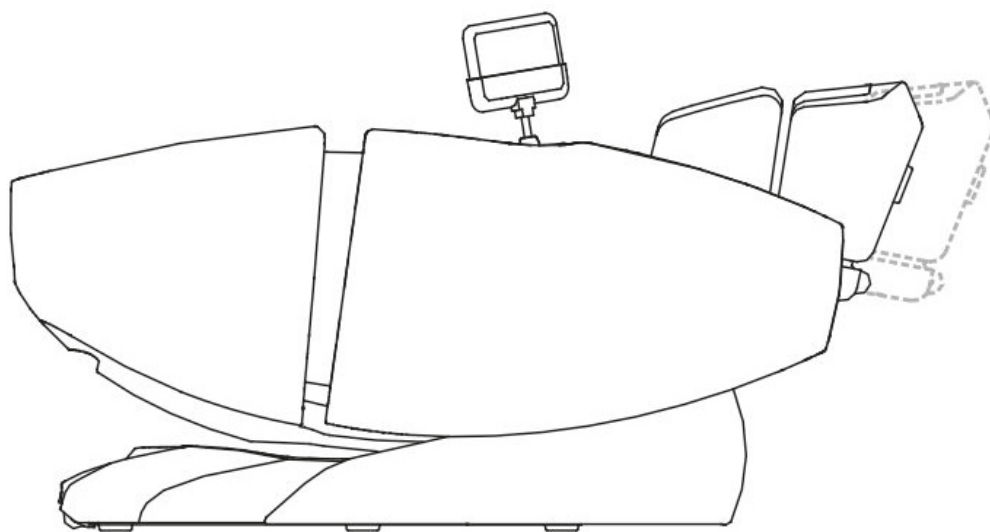

„J“ trajektorie masážního mechanismu

Masážní křeslo má prodloužený pojez masážních hlavic až na hýždě.


Masážní křeslo využívá technologii zakřivení kolejnice, kterou kombinuje s masážním mechanismem a realizuje masáž pro záda a hýždě. Dochází ke změně tradičních tvarových lišt, které se nedají srovnávat s novou trajektorií pro dosažení nejlepšího masážního efektu.

Dvojitý masážní mechanismus

Křeslo nabízí dva masážní mechanismy, které masírují zároveň. Jeden masíruje vrchní část těla a druhý masíruje spodní část těla.

Funkce Save Place

Funkce křesla, která šetří místo. Během polohování se křeslo posouvá mírně směrem dopředu a tak není potřeba mít za křeslem přes 1m volného prostoru a stačí pouhých 10cm.

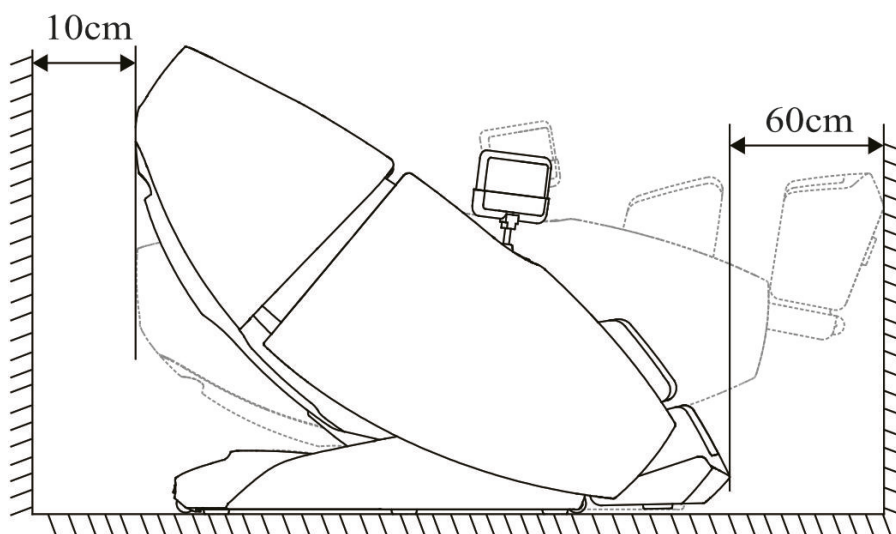

Poslech hudby

Křeslo má zabudované reproduktory pro poslech vaší oblíbené hudby. Pomocí Bluetooth lze křeslo propojit s vaším chytrým telefonem a nastavit si hudbu dle vlastního přání.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před údržbou nebo čistěním nejprve vypněte křeslo a následně vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Metody a kroky při údržbě křesla

Metody: Používejte rozdílné metody údržby v závislosti na různých materiálech potahů daného zařízení.

Používejte vlhké materiály (látka, jemné ubrousky) k čištění potahů křesla. Nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol atp. jinak může dojít k deformaci a zhoršení kvality povrchových materiálů. Nepoužívejte příliš mokré materiály k čištění.

Trošku namočte kousek jemného hadříku v teplé vodě s mýdlem. Opatrně a jemně přetřete povrch křesla a následně jej do sucha utřete suchým hadříkem, aby nezůstal povrch dlouho mokrý.

Krok: Při čištění dodržujte následující postup.

1. Polštářek
2. Polstrování
3. Zádová opěrka
4. Sedák
5. Opěrka nohou
6. Podpěrky rukou
7. Boční strany křesla

Čištění potahu na ruce a záda

1. Namočte jemný hadřík ve zředěném neutrálním čistícím prostředku a poté hadřík vyždímejte.
2. Použijte vyždímaný hadřík k očištění špinavých míst a následně použijte suchý hadřík k usušení očištěných míst. Utřete mokré místa tak, aby byli zcela suchá.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Běžná údržba

1. Je-li na zařízení nečistota, použijte namočený hadřík v neutrálním čističi v dané oblasti. Poté dalším hadříkem namočeným pouze ve vodě místo otřete a následně pomocí suchého hadříku utřete do sucha.
2. K prodloužení životnosti zařízení dodržujte 15-ti minutové pauzy po 60-ti minutovém nepřetržitém používání.
3. Do křesla usedejte opatrně a pomalu.
4. Vraťte křeslo do základní polohy po použití.
5. Opatrně používejte podpěrku rukou a podnožku. Netlačte na ně silou. Do křesla nasedejte pouze, je-li podpěrka nohou plně na zemi!

Umístění křesla

Prosíme udržujte křeslo v následujících podmínkách:

- v teplotách od 0 - 40° C
- vlhkost 30-85% RH

Křeslo neumísťujte na místo s vysokými teplotami, u zdrojů tepla jako je radiátor, sauna, kamna apod..., vysokou vlhkostí a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření nebo jiným vlivům.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Servis a veškeré opravy masážního křesla smějí provádět výhradně jen výrobcem schválené a proškolené osoby. Uživatelé nesmějí žádným způsobem zasahovat do vnitřních částí masážního křesla.
- Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a málo prašných místech. Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých skvrn.
- Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou například radiátory. Mohlo by dojít ke změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho kvality nebo k zhoršení kvality namazaných ploch.
- Při přenášení vždy křeslo uchopte za pevný rám a přitom přidržujte část sedáku. Nedržte jej za boční opěrky, mohlo by dojít k jejich poškození.
- Pokud dojde k zašpinění potahu křesla od sprchového gelu, vlasového šampónu nebo kondicionéru, vždy jej co nejrychleji utřete pomocí suchého hadříku. Jinak by mohlo dojít k poškození potahu (například ke změně barvy nebo vytvoření skvrn).
- Během horkých letních dnů nepoužívejte masážní křeslo po dlouhou dobu. Jinak by mohlo dojít k přehřátí křesla. Časté přehřívání zkracuje životnost přístroje.
- Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je odpojen z elektrické zásuvky.
- Při manipulaci s masážním křeslem nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo křeslo nesaňte po nerovné podlaze, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Dálkové ovládání čistěte pouze suchou látkou. Jakákoli vlhkost by mohla dálkové ovládání poškodit.
- Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo bělidla. Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho úplnému zničení.
- Pravidelné čištění a údržba křesla prodlouží jeho životnost.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A POTÍŽÍ

Pokud se objeví nějaké problémy při používání křesla, zkuste nejprve najít řešení vašeho problému v následující kapitole. Pokud se vám i tak nepodaří vyřešit problém, pak masážní křeslo vypněte, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte svého prodejce.

- Slyšitelný zvuk během pohybu masážního mechanismu je zcela normální a není známkou žádného problému nebo poruchy.
- Pokud dálkový ovladač nepracuje správně:
 - Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač nabitý. Nabít lze pomocí přibaleného USB kabelu.
 - Zkontrolujte, zda je masážní křeslo řádně připojeno do elektrické zásuvky.
 - Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač napájení přepnut do polohy „On“.
- Jakmile vyprší doba masáže, masážní křeslo se automaticky vypne.
- Pokud je masážní křeslo provozováno souvisle po dlouhou dobu, zvýší se teplota řídicích mechanismů masážního systému a tepelná ochrana automaticky vypne masážní křeslo. Zamezí se tak poškození masážního křesla vlivem přehřátí. Před dalším zapnutím křesla vyčkejte alespoň půl hodiny a zkontrolujte tepelnou pojistku.
- Po zapnutí hlavního vypínače do polohy „ON“ se nerozsvítí displej, ovladač nefunguje. Zkontrolujte zda není pojistka poškozená. Pojistku najdete v zadní části křesla u hlavního vypínače „ON/OFF“ ve zdířce, kterou je potřeba otevřít (nejlépe za použití malého plochého šroubováku).

UPOZORNĚNÍ

Nikdy se sami nepokoušejte rozebírat nebo opravovat masážní křeslo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název produktu	Masážní křeslo MD-A900
Typ produktu	Masážní křeslo
Model	MD-A900
Napětí	220-240V - 50/60Hz
Hlučnost	< 50db
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 1W
Spotřeba	180W
Rozměry balení - základna křesla	160 x 85 x 88,5 cm (D x Š x V)
Rozměry balení - boční opěrky	120 x 37 x 70 cm (D x Š x V)
Rozměry balení - nohy	56 x 54 x 61 cm (D x Š x V)
Celková hmotnost	170Kg
Hmotnost křesla	146Kg
Časovač pro automatické vypnutí	10, 20 a 30 min