


## **DYNAWALK** **Chodítko speciální**

### **Návod k použití**

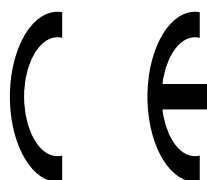

**Mobilex Sp. z o.o.**  
ul. Duńska 3/5  
91-204 Łódź  
Poland  
[www.mobilex.pl](http://www.mobilex.pl)

## 1. Vážení zákazníci,

děkujeme za vaši přízeň a zakoupení chodítka DynaWalk.

Pokud si nebudete jisti v zacházení s výrobkem, obraťte se s důvěrou na prodejce.


## 2. Bezpečnostní upozornění

- **UPOZORNĚNÍ!** Při nastavování výrobku držte prsty mimo pohybující se části mechanismu!
- **UPOZORNĚNÍ!** Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou zapojená
- **POZOR!** Před použitím si pozorně přečtete návod k použití a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.  
Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu
  
- Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu
- Výrobek může být používán jen na doporučení lékaře
- Při nasedání a vystupování musí být výrobek vždy zabrzděn.
- Vždy se ujistěte, že jsou všechny fixační doplňky a ostatní příslušenství správně připevněny a zajištěny
- Výrobek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu
- Doprovodná osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění nouzového východu a o evakuačním plánu budovy
- Při manipulaci s výrobkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě
- Neužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem
- V případě zjevné závady bránící bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá část či jiné opticky viditelné vady, praskliny apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a kontaktovat prodejce.

## 3. SCHEMA – popis produktu

Nabízí skvělou ovladatelnost a stabilitu. Je výškově a šířkově nastavitelný, je také možné nastavit délku a úhel rukojeti. Je vybaven komfortními výškově nastavitelnými bezpečnostními madly a nastavitelným závěsným pásem, který umožňuje uživateli v případě potřeby si odpočinout.

- 1. Podpůrná deska s madly pro uchycení bočnic
- 2. Oválný otvor pro nastavení výšky sedačky
- 3. Rám
- 4. Kříž zvedání sedačky
- 5. Parkovací brzdy
- 6. Bezpečnostní opěry
- 7. Výklopná bezpečnostní madla
- 8. Závěsné pásy zadní
- 9. Závěsné pásy přední
- 10. Červená pojistka pro nastavení šířky
- 11. Otvory pro nastavení šířky

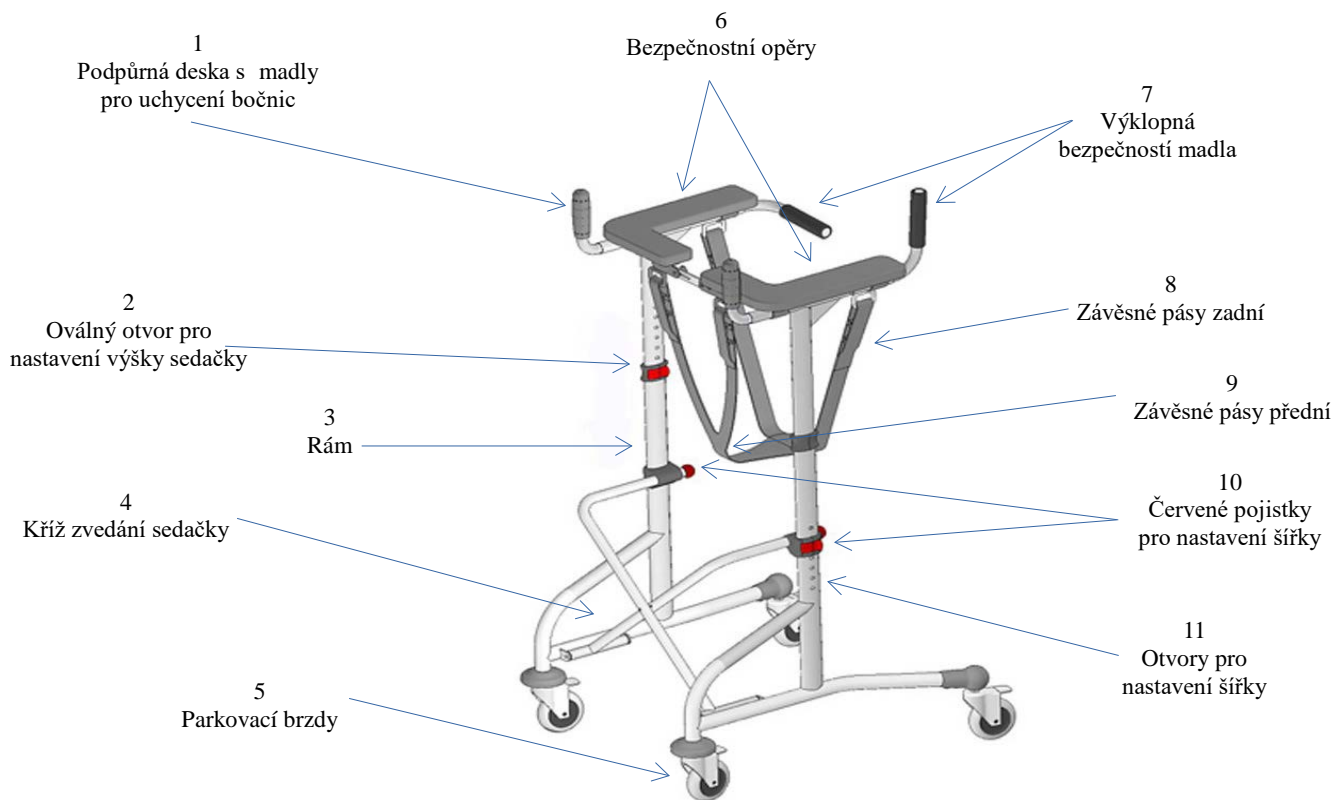

## Popis funkcí

### • Skládání, rozkládání a nastavení šířky rámu

Vložte kříž (4) do plastových otvorů červené pojistky, dokud nezacvakne pojistný kolík. Na spodní části zajistěte kříž pomocí šroubu, který vložte do otvoru na konstrukci u předních koleček a zajistěte matkou. Pro nastavení šířky odklopte červené pojistky na stranách středového kříže a roztahujte/stahujte rám do té chvíle, dokud nedosáhnete otvorů pro nastavení požadované šířky. Nadále zajistěte rám po obou stranách červenými pojistkami (10). Při posunu k otvorům dolů dosáhnete větší šíře (11). Pokud chcete naopak šířku zmenšit, po uvolnění obou červených pojistek se posouvejte k otvorům nahoru.



### • Uchycení bočnice s loketní opěrou pro nastavení výšky

Zasuňte bočnici s loketní opěrou do příslušných oválných otvorů z vrchu rámu. Zvolte si požadovanou výšku opěry a automaticky se zacvakne pojistný kolík (2). Pokud chcete změnit výšku bočnice s opěrou, jednoduše uvolněte pojistné kolíky, bočnici posuňte do požadované výšky a opět uvolněte pojistné kolíky (6).

### ○ **UPOZORNĚNÍ:** Obě bočnice s opěrou musí být vždy nastaveny do stejné výšky.

Zacvakněte loketní opěru do rámu, upravte šířku stabilizační tyče a nastavte šířku rámu. Za tímto účelem uvolněte červenou ružici a zatáhněte za vysouvací lištu. Potom dotáhněte.

- **Uzamčení bočnice s loketní opěrou**

Povytahněte pojistný kolík. Vložte trubku bočnice s opěrou o menším průměru do trubky o větším průměru dané bočnice. Srovnejte otvory na obou trubkách tak, aby se do nich dal umístit nazpět pojistný kolík a obě trubky s ním zajistěte.


- **POZOR:** Pokud chcete změnit šířku rámu nebo jej složit, musíte jako první odjistit zámek rámu.

## Nastavení polohy rukojeti.

- **Nastavení polohy madla**


Pro nastavení úhlu madla, uvolněte červenou ružici zespoda loketní opěry. Nadále nastavte požadovaný úhel a opět upevněte červenou ružici. Opakujte stejně kroky pro nastavení i druhého madla.

- Pro nastavení vzdálenosti madla stiskněte pojistný kolík umístěný pod loketní opěrou a posuňte madlo do požadované polohy. Nechte pojistku opět zapadnout do nejbližší díry k vaší požadované pozici. Následně vám zapadne pojistka madla na své místo.
  - Pro nastavení šířky madla upravte šířku stabilizační tyče a nastavte šířku rámu. Za tímto účelem uvolněte červenou ružici a zatáhněte za vysouvací lištu. Potom dotáhněte.
- **POZNÁMKA:** Doporučujeme, aby obě madla byla nastavena do stejné vzdálenosti a úhlu, pokud terapeutické důvody nevyžadují jinak.

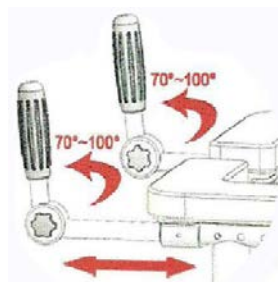

- **Použití bezpečnostní opory zad**

Zadní bezpečnostní opory (8) jsou navrženy tak, aby vás chránily před přílišným záklonem vzad a následným pádem nebo sklouznutím ze zařízení. Když se uživatel chce zavěsit do zařízení, je dobré, aby byly zadní bezpečnostní opěry (7) zdviženy vytažením pojistky zámku, která je pod loketní opěrou a následně se vytáhne. Jakmile je uživatel umístěn do zařízení, zadní bezpečnostní opěry musí být zajištěny do horizontální polohy.

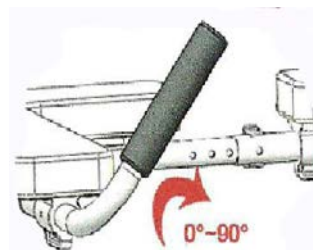

- **VAROVÁNÍ:** Pro bezpečnost uživatele je důležité, aby zadní bezpečnostní opěry byly vždy umístěny v horizontální poloze, když se uživatel nachází v zařízení. Bezpečnostní zadní opěry by měli být uvolněny pouze v situacích, kdy uživatel vstupuje dovnitř nebo ven ze zařízení.

- **Použití závěsných bezpečnostních pásů**

Závěsné bezpečnostní pásy je možno nastavit do odlišných délek a připojit je k rámu čtyřmi rychloupínacími přezkami (8,9). Když chce uživatel využít bezpečnostních pásů, uvolní dvě zadní přezky (8), takže se bezpečnostní pás svěsí na dvě přední přezky (9). Provlékněte dva volné konce mezi nohama uživatele a opět zacvakněte dvě rychloupínací přezky, jakmile je uživatel v zařízení. Je vhodné, aby v době upevnění uživatele do zařízení, byla zadní bezpečnostní madla uzamčena ve svislé poloze (7). Pokud je to nutné, je možné upravit délku závěsných bezpečnostních pásů zkrácením nebo prodloužením všech čtyř konců pásu.

- **POZNÁMKA:** Všechny čtyři konce pásů by měly být nastaveny do přibližně stejné délky.

- **POZNÁMKA:** Všechny popruhy závěsného bezpečnostního pásu by měly být upraveny tak, aby prostřední sedací část pásu byla přímo mezi nohama uživatele, přibližně 3-4cm pod rozkrokem. Uživatel by neměl sedět v závěsném bezpečnostním pásu při chůzi. Pásky by se měly využívat k sezení pouze tehdy, je-li uživatel vyčerpaný.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy neodstraňujte závěsné bezpečnostní pásy, když je uživatel v zařízení. Zařízení musí být vždy vybaveno závěsnými bezpečnostními pásy, když je používáno, v opačném případě může dojít k pádu a zranění uživatele.
- **Parkovací brzda**
  - Zabrzdění: po úplném zastavení chodítka zabrzďte stlačením páček (5) . Že je chodítka správně zabrzden se vždy přesvědčíme mírným pohybem chodítka vpřed či vzad.
  - Odbrzdění: nadzvedněte páčky brzd. Chodítka je odbrzděno (5).
  - Příbrzdění: Pro příbrzdění chodítka utáhněte červené ručice na zadních kolečkách (5).

#### **VAROVÁNÍ! & POZNÁMKY! může mít za následek zranění osob nebo škody na majetku.**

- **Doporučení pro přepravu**

Chodítka je skládací, vhodný pro přepravu. Pokud je nutné jej přepravit, doporučujeme jej složit tak, jak je uvedeno v popisu výše. Chodítka by mělo být řádně zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu.
- **Příslušenství**

Pro toto zařízení není k dispozici žádná příslušenství

#### **4. Technické údaje**

| <b>DynaWalk</b>                  | <b>Verze Standard</b>  | <b>Provedení s brzdami</b>  | <b>Verze pro děti</b>   |
|----------------------------------|--|---|---|
| Maximální nosnost                | 135 kg   | 135 kg  | 65 kg   |
| Celková hmotnost                 | 12,5 kg  | 12,5 kg   | 8,92 kg   |
| Délka                            | 82 cm  | 82 cm   | 75,5 cm   |
| Šířka (nastavitelná)             | 67,5 - 75 cm   | 67,5 - 75 cm  | 61 – 71 cm  |
| Rozsah nastavení výšky předloktí | 100 - 123 cm   | 100 - 123 cm  | 78 – 105 cm   |
| Brzda přední                     | 2 pedálové brzdy integrované s koly                                | 2 pedálové brzdy integrované s koly                               | 2 pedálové brzdy integrované s zadními koly                     |
| Brzda zadní                      | 2 pedálové brzdy integrované s koly, nastavitelnou rychlostí chůze | 2 uzamykatelné brzdy s brzdovými úchyty namontovaných na rukojeti | 2 pedálové brzdy integrované s koly, regulátory rychlosti chůze |

## 5. Údržba a čištění

Váš výrobek Vám při dodržování níže uvedených instrukcí bude sloužit dlouho, aniž byste museli využít služeb Vašeho servisního střediska.

- Pravidelně kontrolujte úchyty na výrobku, spoje, pojistky, aby byly stále v dobrém a funkčním stavu. Brzdy, kola a potah podvozku jsou opotřebitelné části výrobku, proto by měly být vyměněny vždy, když to bude nutné.
- Výrobek by měl být každých 12 měsíců zkontrolován odborníkem.
- Výrobek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek výrobce nebo odborníky touto firmou pověřenými.
- K opravám mohou být použity jen originální náhradní díly dodávané výrobcem.
- Rotační a posuvné části výrobku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji (např. WD 40), minimálně každých šest měsíců. Nikdy nepoužívejte olej nebo vazelinu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš velké množství mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se částí). Přebytečné mazadlo otřete.
- Skládání a rozkládání výrobku by vždy mělo být velmi lehké. Pokud tomu tak není, přečtěte si znovu příslušné odstavce v návodu k použití.
- Výrobek je možné omývat teplou vodou s přidavkem běžného saponátu.
- Nikdy výrobek nečistěte abrazivními čistícími prostředky, prostředky na bázi amoniaku, bělidly a lihovými čistidly.
- V případě, že byl výrobek vystaven vlhkému prostředí, utřete ho savým materiálem a nechte v teple uschnout.
- Výrobek ukládejte na suchém a bezprašném místě při doporučené teplotě 5-20°C.
- Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje.
- Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby seřídte a promažte.

## 6. Nejběžnější problémy a řešení

| <i>Příznaky</i>   | <i>možná příčina</i>                    | <i>co dělat?</i>   |
|---|---|--|
| Kola se neotáčejí hladce a snadno                                   | Mezi koly a vidlicemi je špína          | Vyčistěte prostor mezi koly a vidlicemi. Namažte nápravy kol                 |
| Brzdy nefungují správně nebo jedna brzda funguje silněji než druhá. | Brzdová patka je opotřebovaná / zničená | Vyžaduje se výměna brzdové patky nebo kola. Obrat' se na servisní středisko. |

## 7. Likvidace výrobku

Výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem, ale musí být uveden do místního recyklačního střediska.

## 8. Podmínky užití

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamační právo musí být uplatněno u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.
11. Doby uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.