

POLOHOVACÍ KŘESLA LADY WI, LADY BERGERE, LADY COMFORT SLIM, LADY LIFE



Polohovací křesla s jedním nebo dvěma motory v elegantním a moderním designu. Dokonale sladěný mechanismus umožňuje nastavení vzpřímené polohy, sedu nebo polohy se skloněnou opěrkou zad a zvednutými dolními končetinami.

Křeslo by měla používat a jeho polohování ovládat pouze dospělá osoba a to pouze k účelům, pro které je určeno.

UPOZORNĚNÍ: Při změně polohy křesla hrozí nebezpečí úrazu (uskřinutí částí těla mezi pohyblivé části křesla).

- Ovládací mechanismus umožňuje okamžité zastavení pohybu křesla (např. při nebezpečí vzniku úrazu).
- Před změnou polohy křesla zkontrolujte prostor kolem něj, aby nedošlo k poranění osob, zvířat nebo poškození předmětů v jeho okolí.
- Změnu polohy křesla provádějte tehdy, když v něm někdo sedí.
- Při posazování do křesla a vstávání z něj musí být podnožka ve spodní poloze. Doporučujeme proto nechávat křeslo v poloze pro sezení.
- Křeslo je možné připojit pouze k uzemněné zásuvce. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Na přívodní kabel nepokládejte žádné předměty ani na něj nešlapejte.
- Transport křesla (pokud možno v originálním obalu) by měli provádět dvě osoby.
- Křeslo musí být používáno pouze na vodorovném povrchu, nesmí se přesouvat ani přes nízké překážky.
- Křeslo je určeno k používání pouze v interiéru.



POZOR!

Nesedejte na opěrky nohou! Hrozí nebezpečí převrácení křesla.


Nepřibližujte se ke křeslu, když se jeho části pohybují.

Křeslo postavte minimálně 60 cm ode zdi, aby bylo možné opěrku zad plně sklopit.

Návod k použití

Montáž křesla:

Opěrku zad nasadte ve vertikální poloze na tyčky v zadní části sedáku. Zatlačte ji směrem dolů, dokud neuslyšíte zacvaknutí v konečné poloze. Při demontáži opěrky zad postupujte v opačném pořadí.

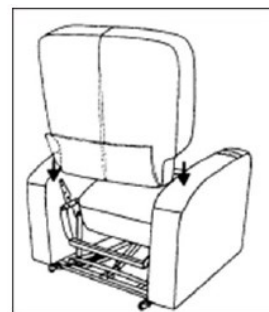

Mezi křeslem a zdí za ním musí být vzdálenost minimálně 60 cm.

Křeslo může být používáno pouze na vodorovném povrchu a nesmí být přesouváno na jiné místo, pokud v něm někdo sedí.

Před přesunem křesla je třeba odpojit přívodní kabel ze zásuvky.

Ovládání:

Model s jedním motorem

Ovládací mechanismus umožňuje okamžité zastavení pohybu křesla. Když mačkáte tlačítko, části křesla se pohybují. V okamžiku, kdy tlačítko uvolníte, se pohyb křesla zastaví.

Zmačkněte tlačítko a držte ho, dokud nedosáhnete požadované polohy.

Obě tlačítka mají dvě funkce.



LEVÉ TLAČÍTKO	PRAVÉ TLAČÍTKO
<ul style="list-style-type: none">• Zvedá křeslo z polohy vsedě do polohy ve stoji.• Zvedá opěrku zad z relaxační polohy a zároveň zasouvá opěrku nohou. Pokračuje do polohy ve stoji.	<ul style="list-style-type: none">• Zvedá opěrku nohou a zároveň zaklání opěrku zad do relaxační polohy.• Přesouvá křeslo z polohy ve stoji do polohy vsedě.

Pro zajištění dostatečné pomoci při vstávání doporučujeme nastavit křeslo až do nejvyšší polohy ve stoji.



Sed



Komfort



Relaxace



Vstávání

Model se dvěma motory

Díky dvěma motorům můžete nastavit zvlášť polohu opěrky nohou a polohu opěrky zad.

Ovládací mechanismus umožňuje okamžité zastavení pohybu křesla. Když mačkáte tlačítko, části křesla se pohybují. V okamžiku, kdy tlačítko uvolníte, se pohyb křesla zastaví.

Zmačkněte tlačítko a držte ho, dokud nedosáhnete požadované polohy.

Všechna tlačítka mají dvě funkce.



HORNÍ LEVÉ TLAČÍTKO	HORNÍ PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO	HORNÍ PRAVÉ TLAČÍTKO
Zvedá opěrku zad z relaxační polohy.	Zvedá opěrku zad z relaxační polohy a zároveň zasouvá opěrku nohou.	Zvedá křeslo z polohy vsedě do polohy ve stoji.
DOLNÍ LEVÉ TLAČÍTKO	DOLNÍ PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO	DOLNÍ PRAVÉ TLAČÍTKO
Sklápí opěrku zad z polohy vsedě.	Zvedá opěrku nohou a zároveň zaklání opěrku zad.	Přesouvá křeslo z polohy ve stoji dolů a zvedá opěrku nohou.

Pro zajištění dostatečné pomoci při vstávání doporučujeme nastavit křeslo až do nejvyšší polohy ve stoji.

Údržba: Potah není možné z křesla sundat. Pravidelně odstraňujte nečistoty z potahu vysavačem. V případě většího znečištění použijte jemné čisticí prostředky vhodné pro čalounění. Skvrny vytírejte vždy směrem od okraje křesla doprostřed.

Odstraňování skvrn:

Káva, čaj, mléko: odsajte tekutinu pomocí savého papíru a skvrnu odstraňte pomocí hadru a mýdlové vody. Jestliže skvrna nezmizí, třete ji pomocí houbičky namočené v denaturovaném lihu.

Skvrny od inkoustu nebo kuličkového pera: odsajte tekutinu pomocí savého papíru a skvrnu třete pomocí houbičky namočené v trichlorethylenu nebo perchloridu.

Víno, lihoviny: odsajte tekutinu pomocí savého papíru a skvrnu třete pomocí houbičky namočené v denaturovaném lihu.

Před čištěním odpojte křeslo z elektrické zásuvky.

Používá-li křeslo více osob, čistěte je denně.

Materiál: potah 45% polyester, 55% mikrovlnákn

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Datum poslední revize: 11. 07. 2017

Vyrábí:

Movi SpA - Divisione Wimed, Itálie

Dodává:

ORLANDINO s.r.o.

Elišky Přemyslovny 433, Praha 5, Tel/Fax: 257 923 005

orlandinosro@seznam.cz