



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 2204, 2204EL, 2204C & 2204ELC
Výrobek: chodítka bez koleček / s kolečky
a teleskopickými nohama



Zobrazený model: 2204ELC

SPECIFIKACE

Hloubka: 56 cm
Šířka: 51 cm
Výška: 81-97 cm

Max. hmotnost uživatele:
160 kg

POPIS

Chromované ocelové posuvné chodítka, které je volitelně výškově nastavitelné. Výrobek má volitelně 4 kolečka a dvě zadní brzděná kolečka. Ta dovolují uživateli posouvat chodítka, aniž by jej musel zvedat, a pokud jsou zajištěna brzdou, poskytují mu stabilní platformu.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se po poranění či nemoci.

Chodítka je určeno jako pomůcka pro uživatele, kterým poskytuje oporu při chůzi, nejsou-li schopni používat tradiční chodítka. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici.

NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit chodítka na správnou výšku a ukázat jeho správné použití.

Při používání by se měl uživatel držet rukojetí, která mají poskytovat podporu při chůzi.

Uživatel musí stát v mezích půdorysu rámu a posouvat jím dopředu vlastním tempem, aniž by jej tlačil. Je možné, že bude potřebná pomoc pečovatele, a to podle úrovně schopností pacienta.

Při přesunu na chodítka a z chodítka MUSÍ být aktivovány brzdy.

NASTAVENÍ

V dolní části každé nohy je pružinová pojistka, která umožňuje nastavit každou nohu na příslušnou výšku.

Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve stejné výšce a že jsou pružinové pojistky před použitím ve správné pozici a zajištěny.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.</p>	<p><u>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</u></p> <p>Uživatel musí být dostatečně silný, aby tlačil pomůcku dopředu a udržoval rovnováhu. Vhodné pouze pro použití v interiéru a na rovných plochách. Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené. Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech. Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence. Na rámu nepřenášejte tašky ani ostatní předměty. Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu. Otočná kolečka se musejí volně otáčet. Pokud se některý upevňovací prvek uvolní, přestaňte chodítko používat.</p> <p><u>ČIŠTĚNÍ</u></p> <p>K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></p> <p>Rám výrobku (kromě kol nebo úchytů na berle) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></p> <p>Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	---