



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 2243

Výrobek: Dětské chodítko



Zobrazený model: 2243

SPECIFIKACE

Hloubka: 47 cm

Šířka: 42 cm

Výška: 42–56 cm

Hmotnost výrobku: 6 kg

Max. hmotnost uživatele: 50 kg

POPIS

Dětské chodítko s pochromovaným ocelovým rámem a výškově nastavitelnými rukojetmi. Dvě přední kolečka umožňují tlačení rámu dopředu.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku dlouhodobé nemoci nebo zotavování se po poranění či nemoci.

Chodítko je určeno jako pomůcka pro uživatele, kterým poskytuje oporu při chůzi, nejsou-li schopni používat tradiční chodítko. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici.

Díky kolečkům lze pomůcku tlačit při použití dopředu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit rukojeti na správnou výšku a ukázat správné použití chodítka.

Uživatel musí stát v mezích půdorysu rámu a posouvat jím dopředu, dokud nebudou zadní nohy ve stejné rovině jako chodidla uživatele. Uživatel se pak může posunout dopředu a proces zopakovat. Je možné, že bude potřebná pomoc pečovatele, a to podle úrovně schopností pacienta.

NASTAVENÍ

Nastavte výšku uvolněním šroubových úchytů na obou rukojetích, přemístěním do správné výšky a opětovným utažením v požadované poloze. Před použitím zkontrolujte, zda jsou oba šrouby dotaženy a nastaveny na stejnou výšku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uživatel musí být dostatečně silný, aby tlačil pomůcku dopředu a udržoval rovnováhu.

Vhodné pouze pro použití v interiéru a na rovných plochách.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.</p>	<p>Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech. Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence. Na rámu nepřenášejte tašky ani ostatní předměty. Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu. Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené. Otočná kolečka se musejí volně otáčet. Pokud se některý upevňovací prvek uvolní, přestaňte chodítko používat.</p> <p><u>ČIŠTĚNÍ</u> K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u> Rám výrobku (kromě koleček nebo úchytů na berle) je dodáván se zárukou 24 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	--