

Úplná technická specifikace:

PARAMETR:	Model AR-101	Model AR-104
Rám (materiál):	ocelový	duralový
Šířka sedáku:	50cm	43cm
Hloubka sedáku:	37cm	42cm
Šířka toaletního sedátka:	35cm	-
Hloubka toaletního sedátka:	37cm	-
Výškové nastavení sedu:	40-55cm	42-52cm
Šířka po složení (bez nádoby)	15cm	15cm
Obsah sanitární nádoby:	7 litrů	5 litrů
Hmotnost produktu:	6kg	4kg
Maximální hmotnost uživatele:	136kg	120kg

ZÁRUKA A SERVIS

- 1) Záruku na tento produkt, zakoupený na území České republiky, zajišťuje firma Distrimed s.r.o. - distributor výrobků značky ARMEDICAL S.C. v ČR.
- 2) Pokud se zjistíte, že produkt nefunguje správně, okamžitě kontaktujte prodejce, kde byl nákup proveden, nebo firmu Distrimed s.r.o., tel.: 558 712 577, reklamace@distrimed.cz. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží: Distrimed – sklad, reklamace, Třinec Kinská, čp. 601, PSČ: 739 61
- 3) Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé mechanickým poškozením (oděrky rámu, poškrábání plastových dílů), poškození vlivem opotřebení způsobeného obvyklým užíváním, tj. například otěru pryžových násadců, plastových opěrek rukou.
- 4) Záruka zaniká při jakékoliv konstrukční úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem.
- 5) Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a skladování a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí, a také při překročení uživatelem maximální nosnosti stanovené výrobcem.

Datum vytvoření návodu: 30.12.2019, datum poslední revize: 4.8.2021

Výrobce:

ARMEDICAL S.C.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

Distributor pro ČR: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827, info@distrimed.cz,
www.distrimed.cz

ARmedical®
HomeCare Line

NÁVOD K POUŽITÍ

TOALETNÍ KŘESLO – SKLÁDACÍ

Model: AR-101

TOALETNÍ A SPRCHOVÉ KŘESLO DURALOVÉ - SKLÁDACÍ

Model: AR-104



Model AR-101



ARM AR-101

Model AR-104



ARM AR-104





NÁVOD K POUŽITÍ – TOALETNÍ KŘESLO (SPRCHOVÉ) - SKLÁDACÍ

Vážení zákazníci,

děkujeme za nákup našeho produktu, vážíme si Vaší důvěry, kterou jste do nás vložili. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom zajistili, že náš výrobek splní Vaše očekávání. Věříme, že bude významnou pomocí při každodenních toaletních činnostech. Před použitím si prosím přečtěte tento návod k použití, je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy. Uschovejte prosím tuto příručku.

Účel použití:

Toaletní křeslo je určeno pro osoby se zdravotním postižením a poruchami pohybového ústrojí, jakož i pro starší osoby a také ty, které mají problémy s používáním standardní toaletní mísy. Usnadňuje a pomáhá při každodenních toaletních činnostech, umožňuje uspokojit fyziologické potřeby bez nutnosti vstávat z křesla. Jako sprchové křeslo (týká se AR-104), je určeno osobám, pro které je problém používání standardní vany nebo sprchového koutu. Usnadňuje a pomáhá při každodenních toaletních aktivitách, např. u umyvadla, vany nebo ve sprchovém koutu. Toaletní křeslo AR-101 může být také použito jako madla pro usnadnění vstávání ze standardní toaletní mísy (po vyjmutí sanitární nádoby (4) a po sklopení sedátka (5) a poklopu (2)).

Technická specifikace:

Maximální hmotnost uživatele zajišťující bezpečné používání toaletního křesla – [AR-101 - 136 kg] [AR-104 - 120 kg]

Varování a doporučení:

Abyste se vyhnuli nehodě, prosíme o:

- 1) Kontrolu, zda jsou všechny trubky rovné, bez poškození (např. během přepravy).
- 2) Kontrolu, zda všechny plastové díly nemají žádné poškození, např. praskliny.
- 3) Kontrolu, zda jsou všechny nohy toaletní židle nastaveny na stejnou výšku.
- 4) Kontrolu, zda jsou na všech nohách gumové násadce a zda jsou všechny správně upevněné.
- 5) Nerozkládání toaletní židle na místech, kde může být kluzká podlaha (roztitá kapalina, led).

Abyste předešli zranění:

- 1) Toaletní křeslo (AR-101) by mělo být zcela rozloženo (zajišťovací západky v příčkách musí „zapadnout“ do příslušných otvorů). Pro AR-104 - bezpečnostní západky musí být zcela spuštěny, přitlačeny na zajišťovací objímky. Objímky musí dosedat celým povrchem na zářezy zajišťovacích západek.
- 2) Před použitím je nutné vždy zkontrolovat technický stav a stabilitu produktu (kontrola všech upevňovacích prvků, sedáku, trubek rámu, pryžových násadců).
- 3) Všechny nohy toaletního křesla musí být nastaveny na stejnou výšku.
- 4) Používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu, který zabraňuje pohybu židle při sezení.
- 5) Dbejte zvláštní opatření při použití na mokřem nebo kluzkém povrchu.
- 6) Je zakázáno razantního sedání na židli (např. naskakování).
- 7) Je zakázáno přenášet židli s uživatelem.
- 8) Je zakázáno stávání na loketní opěrky, sedadlo a jakoukoli část výrobku.
- 9) Toaletní křeslo nepřetěžujte, nepřekračujte maximální zatížení stanovené výrobcem.
- 10) Sedejte na křeslo (AR-101) pouze s toaletním sedátkem sklopeným dolů a otevřeným (zvednutým) poklopem. Sedejte na křeslo (AR-104), pouze když je sedadlo s otvorem sklopené dolů.

Pokyny k údržbě:

AR-104 - Po každém použití křesla by měl být produkt důkladně opláchnutý čistou vodou (nenechávejte na výrobku mýdlo, šampon, sprchový gel atd.). Poté důkladně vysušte měkým hadříkem.

AR-101 – Pravidelně čistěte hadříkem navlhčeným vodou s jemným čistícím prostředkem. Poté důkladně vysušte měkým hadříkem.

Pro oba modely – Sanitární nádobu vyčistěte po každém použití a dezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným pro plasty. K čištění je zakázáno používat silné a abrazivní čisticí prostředky, benzín a rozpouštědla. Je zakázáno používat silné čisticí prostředky, benzín a rozpouštědla. Skladování v místnostech s vysokou vlhkostí (např. sklep), v kombinaci s nedostatečnou pečlivou údržbou produktu (hygienou) povede ke ztrátě funkčních a estetických parametrů židle a tím ke ztrátě záruky. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky!

Mějte na paměti! Výrobek je toaletní křeslo, proto by se měla přísně dodržovat hygienická pravidla.

Odstaňování problémů:

Pokud narazíte na problémy, přečtěte si prosím tuto kapitolu. Pokud to nepomůže, obraťte se na prodejní místo nebo servis. Opravovat toaletní křeslo svépomocí **JE ZAKÁZÁNO!!!** Může to způsobit nehodu.

2

Toaletní křeslo je nestabilní.

- a) Jsou všechny nohy křesla ve stejné výšce? Pokud ne, nastavte je správně.
- b) Mají všechny nohy gumové násadce (8)? Pokud ne, nasadte je.
- c) Jsou všechny gumové násadce (8) správně nasazeny? Pokud ne, nasuňte / nasadte je správně.
- d) Je židle zcela rozložena? Pokud tomu tak není, připevňte příčnicku tak, aby zajišťovací západky „zaklikly“ do příslušných otvorů - pro AR-101. Křeslo musí být zcela rozloženo, bezpečnostní západky musí být zcela spuštěny, přitlačeny na zajišťovací objímky - AR-104.
- e) Je toaletní sedátko bezpečně připevněno (5)? Pokud ne, důkladně jej zatlačte do rámu – týká se AR-101.
- f) Jsou všechny prvky rámu vzájemně pevně spojeny? Pokud ne, kontaktujte prodejce. **TOALETNÍ KŘESLO NEPOUŽÍVEJTE !!!**

POPIS



Příprava k použití

- 1) Vyměňte toaletní křeslo z kartonu nebo z fóliového obalu.
- 2) Nejprve zkontrolujte technický stav produktu v souladu s odstavcem **Varování a doporučení**.
- 3) Týká se AR-101 - uchopte plastové loketní opěrky (3) oběma rukama a držadla zatlačte směrem ven, dokud se křeslo nerozloží. Namontujte přední příčku (6) do otvorů pro nohy. Zkontrolujte, zda blokovací západky „zaskočí“ do správných otvorů. Namontujte zadní příčku (1) podírající poklop (2) toaletního sedátka. Zkontrolujte, zda blokovací západky „zaskočí“ do správných otvorů. Vložte sanitární nádobu (4) a potom spusťte záchodové sedátko (podle obrázku výše). Pro AR-104 - uchopte oběma rukama přední a zadní nohy rámu (2), roztáhněte je co nejdále od sebe, zajistěte je bezpečnostními západkami (5) (zajišťovací objímky musí být v zářezech bezpečnostních západek). Vložte sanitární nádobu (4) a poté sklopte sedák (6) (podle obrázku výše).
- 4) Upravte výšku nohou toaletního křesla podle výšky uživatele. Za tímto účelem zatlačte na klip (7) pro nastavení výšky umístěný v noze, čímž se uvolní zámek. Nastavte požadovanou výšku zasunutím nebo vysunutím nohy. Západkový kolík **musí** zapadnout do otvoru v požadované výšce! Opakujte pro všechny nohy. **UPOZORNĚNÍ!** Všechny čtyři nohy musí být nastaveny na stejnou výšku.

Ohledně vhodnosti používání sedačky s ohledem na zdravotní stav uživatele, se případně poraďte se svým lékařem anebo fyzioterapeutem.

Ukončení používání:

1. Složte křeslo (AR-101) sundáním příček (1) a (6) stlačením aretačních západek, vyjměte sanitární nádobu a následně sklopte opěrky směrem k sobě do středu. Složte křeslo (AR-104) odblokováním bezpečnostních západek (5), a následně stáhněte zadní a přední nohy (2) k sobě. Křeslo může být složeno „s“ a „bez“ sanitární nádoby. Pro vyjmutí sanitární nádoby zvedněte sedák směrem k opěradlu.

Čištění a skladování:

Umístěte toaletní křeslo na místo, kde nebude vystaveno mechanickému poškození, vlhkosti, mrazu, slunečnímu záření anebo tepelným zdrojům. Skladujte při pokojové teplotě.

V případě znečištění postupujte podle odstavce „Pokyny k údržbě“ této příručky.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR A ZAKOUPENÍ NAŠEHO PRODUKTU

3

