

NÁVOD K POUŽITÍ

Čalouněná toaletní židle

Kód výrobku: BLUE-TIM



1. Charakteristika

Čalouněná toaletní židle je vyrobena z ocelového rámu s práškovým lakováním. Má výškově nastavitelné nohy zakončené protiskluzovými gumovými koncovkami. Nastavitelnost umožňuje přizpůsobit výrobek individuálním potřebám pacienta a boční opěrky poskytují stabilitu a bezpečnost při používání. Židle je vybavena toaletním sedákem a snadno vysouvatelnou plastovou sanitární nádobou. Měkký čalouněný sedák s opěrkou zad zvyšuje pohodlí.

Sada obsahuje: rám židle, opěrku zad, opěrky rukou (2 ks), nohy (4 ks), pojistné kolíky nohou (4 ks), aretační šrouby (6 ks), měkký sedák, sanitární nádobu.

Sada obsahuje:

- A. opěrka zad
- B. rám
- C. nohy
- D. protiskluzové koncovky
- E. sanitární nádoba
- F. opěrky rukou
- G. čalouněný sedák

- 1,3. aretační šrouby s plastovou kulatou hlavou (6ks)
- 2. pojistné kolíky (4ks)



2. Použití

Toaletní židle je kompenzační pomůckou, která pomáhá uživateli při hygienických úkonech. Židle je doporučena pro osoby s poruchami pohyblivosti a pro ty, kteří mají potíže s chůzí nebo ztratili schopnost samostatného usedání a vstávání. Židle funguje jako toaleta díky toaletní nádobě umístěné pod sedákem. Židle usnadňuje provádění fyziologických úkonů a péči o uživatele.

3. Montáž, nastavení a použití

Rozložení

Krok 1. Otočte rám židle a vložte čtyři nohy do montážních otvorů. Ručně dotáhněte 4 aretační šrouby s plastovou kulatou hlavou (1).

Krok 2. Nastavte výšku nohou a zajistěte je 4 pojistnými kolíky (2).

Krok 3. Otočte židli a postavte ji na zem.

Poznámka: všechny nohy musí být nastaveny na stejnou výšku a pevně stát na zemi.

Krok 4. Vložte opěrku zad do rámu židle a ručně ji utáhněte pomocí 2 aretačních šroubů s plastovou kulatou hlavou (3).

Krok 5. Umístěte opěrku rukou na rám opěrky tak, aby zapadla do výřezu a směřovala ven (neumísťujte ji opačně, protože by se tím zmenšila šířka sedáku mezi opěrkami rukou). Po usazení ji zespodu utáhněte 2 imbusovými šrouby (stejný postup pro obě opěrky rukou).

Krok 6. Zasuňte sanitární nádobu pomocí vodítek pod sedákem.

Krok 7. Umístěte čalouněný sedák na toaletní sedák.

Nastavení výšky

Pro nastavení výšky židle vytáhněte pojistný kolík, vyberte požadovanou výšku nohou a poté zajistěte nastavenou výšku pomocí pojistného kolíku.

Nohy jsou nastavitelné v krocích po 2,5 cm.

Poznámka: všechny nohy musí být nastaveny na stejnou výšku a pevně stát na zemi.

Použití

Zvedněte měkký sedák a sejměte víko sanitární nádoby. Po použití nádobu zakryjte víkem a měkký sedák položte zpět na toaletní sedák.

Poznámka! Pamatujte na vyprázdnění sanitární nádoby po každém použití.

4. Technická data

Celková šířka	59 cm
Celková hloubka	52 cm
Výška opěrky zad	41 cm
Výška sedáku od země	44–54 cm

Celková výška od země	83–93 cm
Rozměry sedáku	40 cm x 45 cm
Hmotnost židle	8,1 kg
Maximální nosnost	136 kg
Barva rámu	modrá

5. Poznámky

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání toaletní židle, nedodržování bezpečnostních předpisů a zneužití.

6. Údržba

Pravidelně kontrolujte technický stav židle:

- Toaletní židli pravidelně čistěte pouze vodou a jemnými čisticími prostředky. Důkladně osušte.
- Nepoužívejte k čištění: silné lešticí prostředky a detergenty, abrazivní prostředky, bělidla, benzín nebo rozpouštědla (mohou způsobit poškození rámu, viditelné vady a v důsledku toho ztrátu záruky).
- Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte sanitární nádobu a toaletní sedák.

7. Podmínky skladování a přepravy

Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Informace o záruce

Všechny produkty distribuované naší společností jsou kryty zárukou, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu dostupném na našich webových stránkách. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mějte prosím na paměti, že pro uplatnění záruky je nutné uchovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo série		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Poznámka		Seznamte se s pokyny
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celá nabídka je pro vás dostupná u našich distributorů. Více se můžete dozvědět na **www.timago.com**. Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2025(II)