


A	B	C	D	E	F	G	H	kg	kg
87 cm	53 cm	67 cm	73 cm	51 cm	36 cm	39,5 cm	56 cm	7 kg	< 130 kg

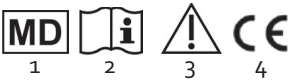

cs	
Význam symbolů	
1	Zdravotnický prostředek
2	Před použitím si přečtěte návod k použití.
3	Dodržujte bezpečnostní pokyny!
4	CE certifikát

CS- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Postupujte podle indikací. Pokyny si pečlivě uschovejte! Pokud tuto pomůcku používají i jiné osoby, měly by být před použitím dobře seznámeny s následujícími pokyny.

1. Bezpečnostní instrukce

- Instalaci této pomůcky a její správné používání vždy konzultujte s odborným prodejcem.
- Neskladujte venku, nenechávejte na slunci (Pozor, nenechávejte pomůcku uvnitř automobilu na přímém slunci!).
- Nepoužívejte při extrémních teplotách (vyšších než cca 38 °C/100 °F nebo nižších než 0 °C/32 °F).
- Pravidelně kontrolujte všechny části tvořící tuto pomůcku (šrouby, trubky, rám...).
- Pozor, abyste si nesedli bez předchozího umístění sedáku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje řádně utažené. Před usednutím zkontrolujte, zda je sedák řádně umístěn.
- Nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než ke kterému je tento výrobek určen: například na křeslo nestoupejte!
- VŽDY dodržujte hmotnostní limity uvedené na štítku nebo v návodu k použití.
- Nijak tento výrobek neupravujte. V případě potřeby použijte k opravě pouze originální díly. Opravy tohoto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Po rozbalení a sestavení výrobku se před použitím ujistěte, že je výrobek zajištěn v OTEVŘENÉ poloze a je stabilně umístěn na podlaze. Některé modely se dodávají smontované.
- Na křeslo s otvorem NIC nezavěšujte. Mohlo by vás to vyvést z rovnováhy a způsobit váš pád.
- V případě delšího nepoužívání nechte pomůcku zkontrolovat svým specializovaným prodejcem.
- Křeslo je určeno pro vnitřní použití a nesmí být skladováno venku.
- Nevkládejte ani neodnášejte kbelík, pokud pacient sedí na křesle: hrozí riziko významného zranění v oblasti pohlavních orgánů!
- Před použitím křeslo zkontrolujte, v případě pochybností ho nepoužívejte a poraďte se se svým specializovaným prodejcem.
- Používejte křeslo pouze na vodorovné a stabilní podlaze.
- Je zakázáno sedat na loketní opěrky křesla.
- Nenaklánějte se, abyste se nepřevrátili.
- Dojde-li v souvislosti s touto pomůckou k závažnému incidentu, je nutné o tom informovat výrobce a příslušné úřady členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

2. Místo použití, indikace a kontraindikace

Křeslo s otvorem je určeno osobám s omezenou schopností pohybu, které nemohou dojít na toaletu. Je určeno výlučně pro vnitřní použití.

Indikace:

Křeslo s otvorem je určeno osobám s omezenou schopností pohybu, které nemohou snadno dojít na toaletu.

Kontraindikace:

Tento výrobek nepoužívejte v případě:

- kognitivních poruch – významných poruch rovnováhy
- nemožnosti posadit se nebo zůstat sedět

3. Instalace

Uvedení tohoto produktu do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný personál. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

Instalace kbelíku

Kbelík lze umístit a vyjmout dvěma způsoby:

1. Z pravé nebo levé strany sedáku upevněním na odpovídající podpěru.
2. Zvednutím sedáku směrem k opěradlu a vyjmutím kbelíku vrchem. Před přenášením ho doporučujeme zakrýt víkem.

Instalace sedáku

Sedák lze snadno sejmout a vyčistit nebo vyměnit, protože je k rámu připevněn pouze dvěma upevňovacími klipsy, fotografie [A].

Pro sejmutí sedáku odepněte oba klipsy, fotografie [B]. Pro jeho umístění zpět upevněte oba klipsy na zadní trubku křesla, fotografie [C].

Po zakrytí otvoru polštářkem lze křeslo používat jako běžné křeslo.

Pronájem:

Tento výrobek lze pronajímat. Před dalším použitím je nutné provést kompletní údržbu, vyčištění a hloubkovou dezinfekci. Při údržbě je nutné provést tyto úkony:

1 – Vizuální kontrolu: zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje žádnou vadu nebo poškození.

2 – Kontrola funkcí: zkontrolujte, zda výrobek správně funguje a případně ho opravte.

3 – Čištění a dezinfekce: tento výrobek lze čistit a dezinfikovat běžnými prostředky pro domácnost, které neobsahují chlor, např. Surfanios (laboratoře Anios).

NIKDY nepoužívejte žíravé prostředky nebo vysokotlaké čističe, které by mohly výrobek poškodit.

Při montáži, demontáži, čištění a dezinfikování používejte pouze vhodná nářadí a vhodné prostředky.

Návod k použití je nedílnou součástí tohoto výrobku, a proto musí být každému novému uživateli předán.

4. Údržba

Pozor, moč je velmi korozivní a velmi rychle rozežírá ocelové trubky. Je proto důležité křeslo každý den vyčistit a vysušit.

5. Materiál

Výrobek je tvořen ocelovým rámem natřeným epoxidovým nátěrem, sedákem s polštářkem a kbelíkem s víkem. Obložení jsou ze dřeva potažené pěnou a PVC.

6. Nakládání s odpady

Zlikvidujte tento výrobek v souladu s platnými předpisy.

7. Technické vlastnosti

Viz výše uvedenou tabulku na straně 1.

Na tento výrobek se poskytuje záruka v délce 2 let od data zakoupení, a to na jakékoli výrobní vady. Tento výrobek je biokompatibilní. Doba užívání: 2 roky