

# NÁVOD K OBSLUZE

## Toaletní a sprchový vozík 3v1

Kód výrobku: MASTER-TIM



### 1. Provedení

Vozík tvoří hliníkový rám s práškovým lakováním. Vozík je vybaven odklopnými područkami, které usnadňují nastupování a vystupování osob s omezením pohybu. Vozík je vybaven sedákem s klínem z PU, čtyřmi otočnými 5" kolečky s brzdami, odklopnými stupačkami a toaletní nádobou. Konstrukce vozíku umožňuje najetí na mísu.

**Obsah sady:** rám vozíku, sedák, čtyři 5" kolečka s brzdou, čtyři montážní zarážky kol, opěrka s područkami, dva šrouby zajišťující opěrku, pravá a levá stupačka, toaletní nádoba s víkem.

### Součásti vozíku:



## 2. Použití


Toaletní a sprchový vozík je pomůcka pro osoby, které se obtížně pohybují, mají pohybové dysfunkce a omezení. Je určen pro používání ve vnitřních prostorech. Může být používán pouze s doprovodem.

Vozík plní sprchovací, přemísťovací a toaletní funkci, neboť je vybaven toaletní nádobou pod sedákem a čtyřmi otočnými koly. Jeho účelem je usnadnit hygienické fyziologické úkony uživatele. Zvláště je vhodný pro osoby, které se obtížně pohybují kvůli: ochrnutí, nadváze, degeneraci nebo deformaci končetin, degeneraci nebo poškození kloubů, poškození končetin nebo jejich amputaci, srdečním a cévním chorobám, poruchám krevního oběhu.

## 3. Montáž a používání



Obr. 1

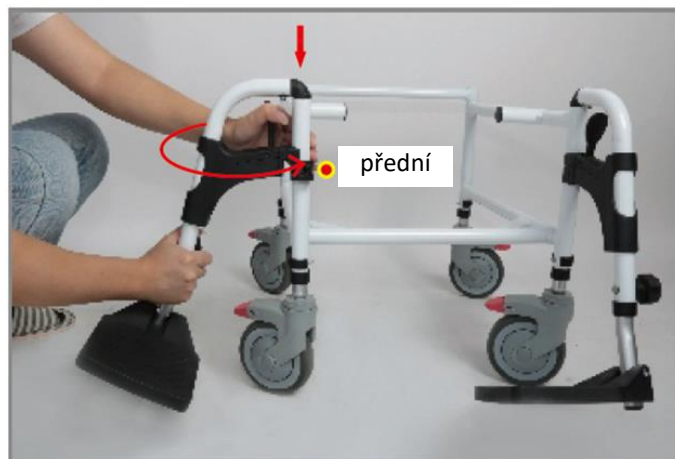

Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7

**Obr. 1** Nasaďte 4 kolečka na rám vozíku. Vyrovnajte otvory na potřebné výšce a zajistěte každé kolečko zarážkou (kroužek s trnem).  
Pozor! Všechna kolečka musí být ve stejné výšce.

**Obr. 2** Upevněte stupačky v otvorech v přední části rámu vozíku (předek označují plastové díly na rámu). Stupačky vkládejte z vnějšku a pak otočte dovnitř, až se zacvakne zarážka stupačky.

**Obr. 3** Upevněte sedák na rám vozíku zatlačením, až zacvakne (předek sedáku označuje klín).

**Obr. 4** Nasaďte opěradlo s područkami do otvorů vzadu na rám vozíku. Vyrovnajte otvory a zajistěte opěradlo dvěma fixačními šrouby.

**Obr. 5** Nasaďte toaletní nádobu na vodící lišty odzadu sedáku.

**Obr. 6** Vozík má 4 úrovně nastavení výšky.  
Pozor! Všechna kolečka musí být ve stejné výšce.

**Obr. 7** Stupačky mají 3 úrovně nastavení výšky – nastavování zajišťovacím šroubem.

Křeslo je připraveno k používání.

## **OBSLUHA KŘESLA**

- Před každým použitím křesla zkontrolujte funkčnost brzd, konstrukci a stav kol. Také zkontrolujte správné namontování součástí a jejich správné seřízení.
- Vozík není šířkově nastavitelný, před zahájením používání se ujistěte, že jeho šířka uživateli vyhovuje.
- Křeslo je určeno pro jízdu pouze na krátké vzdálenosti ve vnitřních prostorech. Křeslo není odpružené, proto není vhodné pro dlouhodobé používání.

**Pozor! Nepoužívejte** křeslo, pokud zjistíte jakékoliv závady nebo nedostatky.

## **ODKLOPENÍ PODRUČEK**

- Lehce zvedněte područku nahoru.
- **Nepoužívejte** područky jako pomůcku pro vstávání. Pokud to bude potřeba, přivolejte pomocníka.

## **BRZDY**

- Kolečko zabrzdíte stlačením červeného pedálu brzdy nohou. Pro uvolnění kolečka stlačte nohou černou páku uvnitř červeného pedálu.

## **STUPAČKY**

- Při nasedání na křeslo a sesedání z křesla musí být stupačky ve svislé poloze. **O stupačky se neopírejte při nasedání a sesedání, protože může dojít k převrácení křesla a nehodě.**

## **NASEDÁNÍ NA KŘESLO**

- Při nasedání, sesedání, změně polohy uživatele a stání je nutné bezpodmínečně zajistit brzdy.
- Vozík musí být umístěn co nejbliž místa přisedání tak, aby se dotýkal lůžka nebo jiného používaného sedátka. Pokud uživatel není schopen samostatně nasednout, je potřeba jej na křeslo přemístit.
- Na křesle je nutné se posadit co nejhluběji, uprostřed sedáku, aby

nedocházelo k nestabilitě.

#### 4. Technická specifikace

Celková šířka	57 cm
Vnitřní šířka	45 cm
Celková hloubka	86 cm
Výška sedátka nad podkladem	49–56,5 cm
Výška celkem	94-101,5 cm
Rozměry sedátka	44 x 43 cm
Hmotnost	11,4 kg
Maximální nosnost	150 kg
Barva rámu	bílá

#### 5. Poznámky a doporučení

**Společnost Timago International Group nenesse odpovědnost za nesprávné používání vozíku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.**

#### 6. Údržba

Provádějte systematickou údržbu všech součástí vozíku:

- Sedák myjte studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne však mokřým) hadříkem bez použití detergentů. Odolnější skvrny umyjte houbičkou.
- Plastové součásti čistěte navlhčeným hadříkem, případně s použitím prostředků na čištění plastů. Při této činnosti postupujte podle návodu výrobce čisticího prostředku a také v souladu s bezpečnostními pravidly pro používání detergentů.
- Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte toaletní nádobu a sedák. Prostředky na čištění toalet používejte v souladu s doporučením jejich výrobce.










## 7. Podmínky skladování a doprava

Nevystavujte výrobek přímému působení slunečních paprsků, vody a vlhka.

## 8. Údaje týkající se záruky

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou specifikovány v záručním listu, který jste dostali s výrobkem. Pro případnou reklamaci si uschovejte doklad o prodeji (fakturu nebo paragon).

## 9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů.

Zjistěte více na [www.timago.com](http://www.timago.com)

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



I. wydání, datum aktualizace 30.03.2022