

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Sprchová a toaleta židle

Kód produktu: Movano



1. Vlastnosti

Sprchová a toaletní židle je vyrobena z odolného PP (polypropylenu). Má výškově nastavitelné hliníkové nohy s protiskluzovými gumovými zakončeními. Nastavení umožňuje přizpůsobit židli individuálním potřebám pacienta. Opěradlo a sedák jsou vybaveny měkkým, odnímatelným polstrováním. Boční područky zvyšují stabilitu a bezpečnost. Židle je vybavena snadno vysouvatelnou plastovou sanitární nádobou s víkem.

Sada obsahuje: rám sedadla, opěradlo, područky (2 ks), nohy s koncovkami (4 ks), polstrování sedadla, polstrování opěradla, sanitární nádobu s víkem.

Prvky toaletní židle:

- A. opěradlo
- B. polstrování opěradla
- C. područka
- D. polstrování sedáku
- E. rám sedadla
- F. noha
- G. protiskluzová koncovka
- H. sanitární nádoba



2. Použití

Sprchová a toaletní židle je pomocné zařízení, které uživateli usnadňuje provádění hygienických úkonů. Je doporučena pro osoby s omezenou pohyblivostí, s dysfunkcemi nebo omezeními pohybu, která brání nebo znesnadňují samostatné vykonávání každodenních činností. Židle má toaletní

funkci díky umístění sanitární nádoby pod sedadlem. Usnadňuje každodenní fyziologické a pečovatelské úkony. Židle je vhodná také do sprch a koupelen, v domácím i nemocničním prostředí.

3. Sestavení, nastavení a používání

ROZLOŽENÍ

Krok 1: Otočte rám židle vzhůru nohama a vložte nohy do montážních otvorů. Nohy mají aretační kolíky – před zasunutím je stiskněte a poté nohu zajistěte.

Krok 2: Pomocí aretačních kolíků nastavte výšku nohou.

Krok 3: Otočte židli a postavte ji nohama na zem.

Poznámka: Všechny čtyři nohy musí být nastaveny do stejné výšky a pevně stát na zemi.

Krok 4: Vložte opěradlo do montážních otvorů v rámu sedadla (západka).

Krok 5: Vložte obě područky do montážních otvorů v rámu sedadla (západka).

Krok 6: Vložte sanitární nádobu s víkem do otvoru v rámu sedadla.

Krok 7: Vložte polstrování opěradla do montážních otvorů v opěradle (3 montážní úchyty).

Krok 8: Položte polstrování sedáku na sedadlo židle – jeho spodní tvarování umožňuje snadné a správné nasazení.

NASTAVENÍ VÝŠKY

Pro nastavení výšky židle stiskněte aretační kolíky na nohách, zvolte požadovanou výšku a zajistěte ji kolíkem. Nohy jsou nastavitelné po 2,5 cm.

Poznámka: všechny nohy musí být nastaveny na stejnou úroveň a pevně stát na zemi.

POUŽÍVÁNÍ

Zvedněte polstrování sedáku a sejměte víko sanitární nádoby. Po použití nádobu opět uzavřete a vraťte polstrování na místo.

Poznámka! Nezapomeňte po každém použití vyprázdnit sanitární nádobu.

4. Technické údaje

Celková šířka	56 cm
Celková hloubka	48 cm
Výška opěradla	35 cm
Výška sedadla od země	41-53 cm
Celková výška od země	76-88 cm
Rozměry sedadla	46 cm x 43 cm
Hmotnost	5,1 kg
Maximální nosnost	150 kg
Barva	šedá

5. Poznámky

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních předpisů či zneužití.

6. Údržba

Provádějte pravidelnou kontrolu technického stavu židle:

- Čistěte židli pravidelně pouze vodou a jemnými čisticími prostředky. Důkladně osušte.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky, leštidla, abraziva, bělidla, benzín ani rozpouštědla (mohou poškodit rám, způsobit viditelné vady a ztrátu záruky).
- Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte sanitární nádobu a toaletní sedátko.

7. Podmínky skladování a přepravy

Výrobek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Informace o záruce

Všechny produkty distribuované naší společností jsou kryty zárukou, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu dostupném na našich webových stránkách. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mějte prosím na paměti, že pro uplatnění záruky je nutné uchovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže (LOT)		Kód UDI
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Poznámka		Přečtěte si, prosím, návod k použití.
	Produkt splňuje aktuální zákonné požadavky na zdravotnické prostředky (MDR 2017/745)		

Naši kompletní nabídku produktů naleznete u našich distributorů. Více informací na **www.timago.com**. Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2025(I)