



**MOPEDIA®**

# **ZÁBRANA K LŮŽKU MP167**

---

**NÁVOD K POUŽITÍ**

## OBSAH

1.KÓD.....	3
2. ÚVOD .....	3
3.ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	3
5.OBECNÁ VAROVÁNÍ .....	4
6. SYMBOLY .....	4
7.OBECNÝ POPIS .....	4
7.1 Popis částí .....	4
8. MONTÁŽ / DEMONTÁŽ .....	5
8.1 Montáž .....	5
8.2 Demontáž.....	5
9.PŘED POUŽITÍM .....	5
10. POUŽITÍ .....	5
11. ÚDRŽBA .....	5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	5
12.1 Čištění .....	5
12.2 Dezinfekce .....	5
13. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	6
14. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	6
15. TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....	6
16. ZÁRUKA .....	6
17. OPRAVY .....	6
17.1 Záruční oprava .....	6
17.2 Oprava, na níž se záruka nevztahuje .....	7
17.3 Nežjištěné závady .....	7
18.NÁHRADNÍ DÍLY .....	7
19. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI .....	7

**CE** Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017  
o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓD

**MP167** - Sklopná půlená zábrana k lůžku

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali příslušenství MOPEDIA od Moretti. Zábrany k lůžku byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše potřeby pro praktické a bezpečné použití. Tento návod obsahuje několik návrhů pro správné používání výrobku a cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím zábran k lůžku byste si měli pečlivě přečíst celý tento návod.

### POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.
- Moretti S.p.A. se zříká jakékoli odpovědnosti za škody vyplývající z nesprávného použití výrobku nebo jiného použití, než je popsáno v tomto návodu.
- Vyhrazujeme si právo provádět změny výrobku a tohoto návodu bez upozornění za účelem zlepšení vlastností.
- Vždy věnujte zvýšenou pozornost při pohybu kolem pohyblivých částí, které by mohly způsobit sevření končetin a zranění.
- V přítomnosti dětí mějte děti pod dohledem.

## 3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Sklopné půlené zábrany k lůžku jsou doplňkem navrženým tak, aby zabránil nechtěnému pádu osoby z jakékoli postele. Může poskytovat užitečnou podporu pro usnadnění sedu a vstávání z lůžka a může být umístěn volitelně na obou stranách lůžka.

## 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že produkt vyrobený a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny BEDS - TULIPANO vyhovuje ustanovením nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Zařízení splňuje požadavky na obecnou bezpečnost a výkon požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Dané zařízení NENÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ.
3. Dané zařízení NENÍ VYROBENO PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Dané zařízení je dodáváno v NESTERILNÍM OBALU.
5. Prostředky patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení
6. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od poslední sériové výroby.

Poznámka: Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou součástí prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.


## 5. OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Informace o správném použití výrobku naleznete v tomto návodu.
- O správném používání zařízení se poraďte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost příslušenství je dána opotřebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- V přítomnosti dětí mějte děti pod dozorem.
- Zábрана k lůžku není určena k tomu, aby unesla plnou váhu jednotlivce. Tento produkt je určen pouze k poskytování rovnováhy a opory při sezení a vstávání.
- Uživatel a/nebo pacient bude je povinen každou vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s výrobkem, nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient pobývá.

## 6. SYMBOLY

	Kód výrobku
	Jedinečná identifikace zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace

## 7. OBECNÝ POPIS

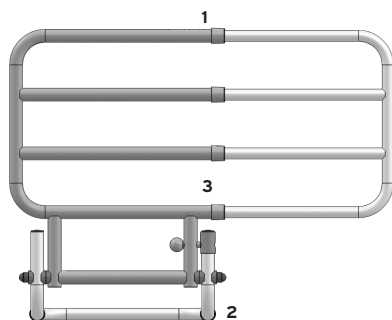


### 7.1 Seznam částí

1. Teleskopická zábрана (1)
2. Rám (1)
3. Spojení zábраны a rámu (1)

## 8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

### 8.1 Montáž

1. Připojte zábranu k hlavnímu rámu pomocí pojistných kolíků.
2. Nasadte teleskopické trubky k rámu a upravte délku zábran.
3. Umístěte sestavený rám mezi matrací a rám postele.

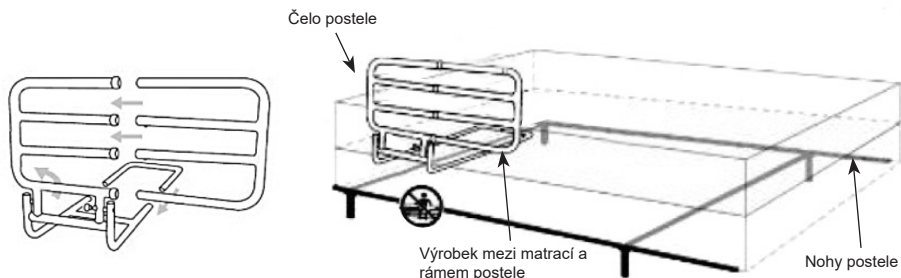

### 8.2 Demontáž

Postupujte podle výše popsaného postupu v opačném pořadí.

## 9. PŘED POUŽITÍM

- Vždy kontrolujte opotřebení a funkčnost spojů mechanických částí, abyste zajistili naprosto bezpečné používání výrobku.
- Dvakrát zkontrolujte správnou montáž zařízení a věnujte pozornost upevnění zábradlí na rámu postele.

## 10. POUŽITÍ

Sestavte výrobek podle návodu k použití, šířku teleskopické zábrany upravte podle svých potřeb pomocí pojistných kolíků. Umístěte zábranu mezi matrací a rám postele. Pro sklopení / přiklopení zábrany použijte černý zajišťovací kolík. Vytáhněte jej směrem ven, abyste uvolnili zábranu a poté ji zvedněte nebo spustíte.

**POZNÁMKA:** Vždy zkontrolujte, zda je zábrana v zajištěné poloze.

## 11. ÚDRŽBA

Zařízení MOPEDIA od Moretti S.P.A. jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolovány a dodávány s označením CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat výrobek každé 2 roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovaným prodejcem. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

## 12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 12.1 Čištění

Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím důkladně osušte.

### 12.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

**POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady nebo rozpouštědla, jako je aceton nebo ředidlo

### 13. PODMÍNKY LIKVIDACE




V případě likvidace nepoužívejte běžný kontejner pro komunální odpad. Doporučujeme zařízení zlikvidovat v odpovídajících prostorách pro recyklaci.

### 14. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v hlavním katalogu MORETTI. Používejte pouze originální příslušenství MORETTI. Pokud tak neučiníte, dojde ke ztrátě odpovědnosti společností MORETTI za jakýkoli incident způsobený nesprávným použitím.

### 15. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

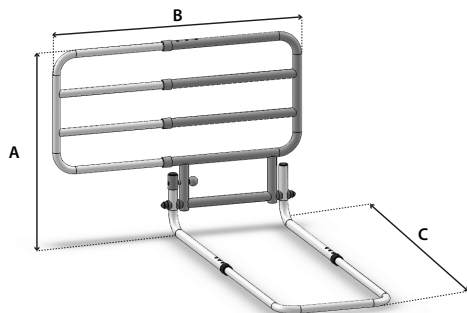

#### Rozměry

**A** - Výška od rámu postele 55 cm

**B** - Nastavitelná šířka - 66 až 71 cm

**C** - Nastavitelná hloubka - 83 až 88 cm

- Rám z eloxovaného hliníku
- Když se nepoužívá, lze ji sklopit ke spodní části postele
- Užitečná opora pro usnadnění sedu a vstávání z lůžka
- Stabilizační rám se vkládá pod matraci

### 16. ZÁRUKA

Na Výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou omezení a výjimek uvedených níže. Záruka se nevztahuje na případy škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka nebude platná, pokud nebudou přísně dodrženy pokyny pro použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v této příručce. Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím nebo v souvislosti s ní. Společnost Moretti neručí za škody na výrobcích nebo vady za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (pokud je k dispozici) použitím náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, nepovolená změna, poškození při přepravě (jiné než původní balení Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení během správného používání zařízení.

### 17. OPRAVY

#### 15.1 Záruční oprava

V případě, že výrobek Moretti bude mít v záruční době vady materiálu nebo výrobní závady, společnost Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na závadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit předmět záruky v obchodním zastoupení Moretti nebo v místě výroby. Mzdové náklady na opravu mohou být společnosti Moretti účtovány v případě, že se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna záruky neobnovuje ani prodlužuje záruku.

### 17.2 Oprava, na níž se záruka nevztahuje

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, může být vrácen k opravě pouze po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu za opravu, na kterou se nevztahuje záruka, nese zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, je poskytována záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

### 17.3 Nežjištěné závady

Zákazník bude informován, pokud Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. Zboží bude vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

### 18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 měsíců od data obdržení.

### 19. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákonů společnost Moretti nenabízí žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti neručí za to, že používání výrobku Moretti bude bez přerušení nebo bez chyb. Trvání jakýchkoli implikovaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezeno na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení délky předpokládané záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V těchto státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá vyloučení odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



## ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek \_\_\_\_\_

Datum nákupu \_\_\_\_\_

Prodejce \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Město \_\_\_\_\_

Zákazník \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Město \_\_\_\_\_

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.



#### **PRAHA**

Ronkova 13/353

180 00 Praha 8

Tel./fax: 266 313 652

ortoservis@ortoservis.cz

#### **BRNO**

Minská 100

616 00 Brno - Žabovřesky

Tel./fax: 541 240 393

brno@ortoservis.cz

#### **ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Staroměstská 2608

370 04 České Budějovice

Tel./fax: 387 432 502

cb@ortoservis.cz

#### **OPAVA**

Pivovarská 7/71

746 01 Opava

Tel./fax: 553 775 226

opava@ortoservis.cz

[www.ortoservis.cz](http://www.ortoservis.cz)

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014.

**MORETTI S.p.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano

52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)